



GoTo Seat

GoTo Seat Benutzeranleitung



Family Freedom

Deutsche

Der Firefly GoTo Seat ist ein leichter, mobiler Sitz, der die Teilhabe von Kindern erleichtert und fördert. Er ist ein sicherer, stützender, vielseitig einsetzbarer Helfer für Zuhause und unterwegs.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Nutzung des GoTo Seat beginnen. Sie können diese Anleitung ebenfalls, nebst Videos, Diagrammen und anderen nützlichen Downloads, auf unserer Webseite **www.fireflyfriends.com** herunterladen.

Contents

01 Verwendungszweck	p.3
02 Zertifizierung	p.4
03 Warn- Und Sicherheitshinweise	p.4
04 Gewährleistungsbedingungen	p.6
05 Informationen zur Sicherheit	p.6
06 Vorsichtsmaßnahmen Und Kontraindikationen	p.8
07 Reinigungs- und Pflegehinweise	p.9
08 Produktservice	p.11
09 Wichtige Nutzungsrichtlinien	p.11
10 Überprüfung des Produkts	p.12
11 Die Wiederausgabe von Firefly-Produkten	p.12
12 Zusammenbau Ihres GoTo Seat	p.14
13 Nutzung des GoTo Seat auf einem Stuhl mit fester Rückenlehne	p.16
14 Nutzung des GoTo Seat im Einkaufswagen	p.20
15 Anbringen des GoTo Seat an die Floorsitter-Plattform	p.21
16 Empfohlene Positionen der Rückenlehne	p.23
17 Verlegung des GoTo Seat sowie Entfernung der Polster	p.26
18 Wiederanbringung der Polsterung sowie Zusammenbau des GoTo Seat	p.30
19 Größeninformationen	p.33
20 Tabelle der Symbole	p.34

ABSCHNITT 01:

Verwendungszweck

Verwendungszweck

GoTo Seat ist eine tragbare Sitzvorrichtung zur Unterstützung von Kindern mit leichten bis komplexen Haltungsproblemen. GoTo Seat ist für die Befestigung an einer Fremdoberfläche vorgesehen, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, der Standardstühle, Flugzeugsitze und Parkschaukeln. Der Sitz GoTo Seat kann auch allein verwendet werden, wenn er an einer Bodenstation befestigt wird. GoTo Seat ist aber nicht als Ersatz für einen Kinderautositz gedacht.

Indikationen

GoTo Seat wurde entwickelt, um Kindern mit Behinderungen eine zusätzliche Haltungsunterstützung für ihren Oberkörper zu bieten. Der Sitz muss zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit jederzeit an einem Stuhl oder einer ähnlichen Stützstruktur befestigt werden. GoTo Seat ist aufgrund der begrenzten Unterstützung und Druckentlastung für den gelegentlichen Gebrauch gedacht und sollte daher nicht als primäres Sitzsystem für ein Kind mit Behinderung verwendet werden. GoTo Seat ist in 2 Größenoptionen erhältlich. Die Größe 1 ist für Kinder im Alter zwischen 1 und 3 Jahren mit einem Höchstgewicht von 15 kg/33 lbs* vorgesehen, während die Größe 2 für Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren mit einem Höchstgewicht von 30 kg/60 lbs* gedacht ist.

Im Falle, dass das Produkt außerhalb des dafür bestimmten sicheren Gebrauchs verwendet wird, können wir keine Verantwortung übernehmen. Folgende Aktivitäten wurden für die tägliche Nutzung des GoTo Seat von Firefly by Leckey getestet und anerkannt:

1. Befestigt an einem Stuhl mit fester Rückenlehne, beim Essen mit Familie und Freunden.
2. Nutzung in einem Einkaufswagen-Sitz zur Erleichterung des Einkaufs für den Elternteil/den Betreuer.
3. Nutzung des GoTo Seat als Floorsitter mit Floorsitter-Plattform.

Bitte denken Sie immer daran, dass ihr Kind sich während der Nutzung des Floorsitters über den Boden bewegen kann. Daher sollte der Floorsitter nur unter Aufsicht verwendet werden. Sollten Sie etwaige Zweifel haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice von Firefly auf: **customer.enquiries@fireflyfriends.com**



*Bitte beachten Sie, dass Einkaufswagen-sitze standardmäßig für Kinder mit einem Maximalgewicht von 13 Kilogramm konzipiert sind.

ABSCHNITT 02: Zertifizierung

GoTo Seat ist nach den Vorschriften der EU und Großbritanniens als ein Medizinprodukt der Klasse I eingestuft. James Leckey Design Limited erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt mit der Medizinprodukte-Verordnung (2017/745) der EU, UK Medical Device Regulations 2002 (Britische Medizinprodukte-Verordnung), sowie mit Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte und EN 12182:2012, Technische Hilfen für behinderte Menschen – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren, konform ist.

Hinweis für den Anwender und/oder den Patienten:

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

HINWEIS:

Allgemeine Empfehlungen für den Benutzer.

Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann das zu Körperverletzung, Beschädigung des Produkts oder Umweltschäden führen!

ABSCHNITT 03: WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Warnung Kippgefahr

- Lassen Sie das Produkt niemals auf einer schiefen Ebene stehen, die mehr als 5 Grad geneigt ist.

Warnung Fingereinklemmgefahr

- Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer oder die Pflegekraft keine beweglichen Gelenke oder Drehpunkte berühren, die nicht verriegelt sind.

- Die Pflegekraft sollte die Einstellungen am Produkt möglichst auf ein Minimum beschränken, während sich der Benutzer im Produkt befindet.

Warnung Insassensicherheit

- Der Transfer des Benutzers in das und aus dem Produkt muss mit geeigneter Ausrüstung und Personal erfolgen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Gurte sicher angelegt sind.
- Wenn der Benutzer irgendeine Form von Stress zeigt, transfer-

ieren Sie ihn so schnell und sicher wie möglich aus dem Produkt.

- Die Benutzer sollten während der Verwendung von Leckey Geräten zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt bleiben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gurte während der Verwendung des Produkts und bei den Transfers ausreichend Abstand zum Hals des Benutzers haben, um ein Strangulationsrisiko zu vermeiden.

Vorsicht Fingerquetschgefahr

- Die Pflegekraft sollte die Einstellungen am Produkt möglichst auf ein Minimum beschränken, während sich der Benutzer im Produkt befindet.
- Achten Sie bei der Montage oder Positionsverstellung der Produktkomponenten darauf, dass Ihre Finger beim Positionieren der Komponenten und beim Festziehen der Halterungen nicht gequetscht werden.
- Die Pflegekraft sollte das Risiko vermeiden, sich während der Montage und Einstellung des Produkts, die Finger an den Gelenken oder Drehpunkten des Produkts zu quetschen.
- Die Pflegekraft sollte während des Transfers und der Einstellungen das Risiko vermeiden, sich die Finger an den Schnallen zu quetschen.

Vorsicht Tägliche Überprüfungen

- Das Produkt ist täglich vor der Benutzung zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass alle Kom-

ponenten sicher befestigt sind und eine sichere Benutzung des Produkts gewährleistet ist.

Vorsicht Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern. Angesammelter Schmutz kann zu einem vorzeitigen Verschleiß der Gewebekomponenten führen und die Korrosion am Produkt fördern. Verwenden Sie ausschließlich nicht scheuernde Haushaltsreiniger und feuchte Tücher. Verwenden Sie kein fließendes Wasser für das Polster, solange es noch am Produkt befestigt ist. Siehe Abschnitt Informationen zu Reinigung und Pflege im Benutzerhandbuch

Vorsicht Bei Der Reinigung Mit Hochdruckreinigern/Schläuchen

- Verwenden Sie keine Schläuche und Hochdruckreiniger zur Reinigung des Produkts. Siehe Abschnitt Reinigungs- und Pflegehinweise im Benutzerhandbuch.

Vorsicht Bei Der Entsorgung

- Wenn Sie das Produkt über eine kommunale Abfallentsorgungsstelle entsorgen, sollten die Komponenten gegebenenfalls getrennt entsorgt werden.

Vorsicht Bei Der Inbetriebnahme

- Lassen Sie das Produkt vor der Benutzung 2 Stunden lang auf Raumtemperatur akklimatisieren.

ABSCHNITT 04: Gewährleistungsbedingungen

Gewährleistungen für den GoTo Seat greifen nur, wenn das Produkt unter den vom Hersteller angegebenen spezifischen Bedingungen und für den entsprechenden Verwendungszweck eingesetzt wurde. Für dieses Produkt von James Leckey Design Ltd. gilt ein Gewährleistungsanspruch von einem Jahr.

Waren können, zur Reparatur oder zum Umtausch, innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt, an uns zurückgeschickt werden. Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, veranlassen wir die Abholung der Waren zu unseren Kosten. Bei Ankunft der Waren werden diese entweder von uns repariert oder umgetauscht. Anschließend schicken wir die Waren innerhalb von 14 Tagen an Sie zurück. In allen Fällen obliegt es dem Kunden, die zurückgeschickte Ware angemessen, vorzugsweise in der Originalverpackung, zu verpacken.

ABSCHNITT 05: Informationen zur Sicherheit

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die gesamte Anleitung durch.
2. Kinder sollten zu keiner Zeit in diesem Produkt unbeaufsichtigt bleiben.
3. Prüfen Sie stets den Stuhl/den Trolley auf Eignung und Stabilität, bevor Sie den GoTo Seat daran montieren.
4. Stellen Sie vor der Nutzung stets sicher, dass der GoTo Seat gut befestigt und die Gurte fest angezogen sind.
5. Der GoTo Seat wurde bisher nicht in Crashtests geprüft und kann deshalb nicht als Sitz in Beförderungsmitteln verwendet werden. Manche
6. Nutzen Sie den GoTo Seat nie in Einkaufswagen mit einer Sitzebene, die um mehr als 10 Grad geneigt ist, um jedwedes Risiko des Hinüberfallens zu vermeiden.
7. Bevor Sie das Kind in den GoTo Seat setzen, sollte der Floorsitter angebracht und entsprechend eingestellt werden.

8. Der Floorsitter sollte nur auf solidem und ebenmäßigem Untergrund verwendet werden.
9. Der GoTo Seat verfügt über Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten. Stellen Sie daher vor der Nutzung sicher, dass alle Komponenten, auch (Dreh-)knöpfe und Gurte, sicherheitsgemäß befestigt wurden.
10. Nehmen Sie keine Veränderungen am GoTo Seat vor. Eine falsche Befolgung der Benutzeranleitung kann die Sicherheit des Kindes gefährden. Ebenso kann der Garantieanspruch erlöschen.
11. Der GoTo Seat sollte gewissenhaft und flach zusammengelegt verstaut und aufbewahrt werden, damit er keinen Schaden nimmt. Er sollte nicht genutzt werden, wenn etwaige Teile beschädigt oder fehlerhaft sind.
12. Der GoTo Seat sollte vor jedweden Hitzequellen, wie z. B. Zigaretten, elektronischen und gasbetriebenen Herden und offenen Flammen, ferngehalten werden.
13. Bei Zweifeln an der Sicherheit des GoTo Seat oder beim Versagen von Teilen stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein und nehmen Kontakt mit dem Firefly Kundendienst unter **customer.enquiries@fireflyfriends.com**.

Kombinationen von Medizinprodukten

Dieses Medizinprodukt kann unter Umständen mit einem oder mehreren anderen Medizinprodukten bzw. anderen Produkten kombiniert werden.

Informationen darüber, welche Kombinationen möglich sind, finden Sie unter [leckey.com](https://www.leckey.com).

Alle aufgeführten Kombinationen wurden überprüft, um die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Artikel 14.1 der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte zu erfüllen.

Leitlinien zum Kombinieren wie etwa die Montage finden Sie unter [leckey.com](https://www.leckey.com)

ABSCHNITT 06: Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

Vorsichtsmaßnahmen

- Fixierte Wirbelsäulendeformitäten wie Skoliose oder Kyphose
- Schwere Muskelkontrakturen
- Schwere muskuläre oder skelettale Asymmetrie einschließlich Hüftluxation
- Progressive und Muskelschwundzustände
- Hohes Risiko von Knochenbrüchen in der Vorgeschichte
- Hohes Risiko für druckbedingte Verletzungen oder offene Wunden
- Starke, unkontrollierte Bewegungsmuster
- Schlecht eingestellte Krampfanfälle
- Kinder mit einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG)
- Medizinische Instabilität einschließlich eingeschränkter Atem- oder Herz-Kreislauf-Funktion
- Abhängig von lebenserhaltenden Fremdgeräten wie Sauerstoffflaschen

- Signifikante Lernbehinderungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten

Kontraindikationen

Es gibt keine Kontraindikationen im Zusammenhang mit dem GoTo Seat.

Alle Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen liegen im Ermessen des/r verordnenden Kliniklers/in oder der Eltern. Leckey und Firefly empfehlen die Anwesenheit eines/r geschulten und erfahrenen Kliniklers/ in bei der Erstbeurteilung, Einrichtung, Konfiguration und Wiederausgabe, um das Risiko zu minimieren.

ABSCHNITT 7: Reinigungs- und Pflegehinweise

Kunststoff-Sitzbasis

1. Zur Reinigung der Kunststoff-Sitzbasis empfehlen wir ausschließliche Verwendung von warmen Wasser und scheuermittelfreien Reinigungsmitteln bzw. Geschirrspülmitteln.
2. Antiseptische Reinigungsmittel wie Ethanol und Isopropylalkohol sind für die Reinigung der Kunststofffläche geeignet.
3. Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel oder Reinigungsflüssigkeiten.

Polsterung und Textilien

1. Reinigen und pflegen Sie die Textilien regelmäßig. Saugen Sie diese mit einem Polsteraufsatz ab, um so Staub zu entfernen, und wischen Sie sie anschließend mit einem angefeuchteten Lappen ab.
2. Mikrofaserlappen sind auch ohne Seife sehr effektiv und empfehlenswert, da Seife Flecken auf dem Stoff hinterlassen kann.
3. Die Sitzbezüge können von der Kunststoffsitzbasis gelöst werden und bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen werden.
4. Lassen Sie das gesamte Produkt lufttrocknen. Es ist nicht für den Wäschetrockner geeignet.
5. Die Polster können nach dem Entfernen der Riemen, Schnallen und Verschlüsse in der Waschmaschine gewaschen werden. Bewahren Sie diese Teile an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Textilien können, ohne entfernt zu werden, ebenfalls manuell per Hand gereinigt werden. Festsitzende Essensreste können mit einem Spachtel entfernt werden. Reinigen Sie den Stoff mit einem auf Wasser basierenden Produkt wie beispielsweise dem Schaum eines milden Reinigungsmittels und entfernen Sie es mit einem saugfähigen Lappen, einem Handtuch, oder mit einem Schwamm.
7. Für eine sorgfältige Reinigung der Polsterung, ohne übermäßige Befeuchtung oder Verblässen des Stoffes, wird die Nutzung von Produkten empfohlen, die speziell für die Reinigung von Polstern vorgesehen sind.
8. Flecken sollten so schnell wie möglich mit einem aufnahmefähigen Tuch, Handtuch oder Schwamm entfernt werden. Je länger ein Fleck einziehen kann, desto schwieriger wird es, diesen zu entfernen. Auch kann es sonst zu einem Verblässen der Farbe kommen.
9. Das Auftragen von Seife und warmem Wasser mit einem Schwamm ist bei normalen Flecken und unbedeutenden Verschüttungen wirksam. Vermeiden Sie Reibung, da diese zur Abnutzung und Schädigung des Stoffes führen kann. Reinigen Sie die Verschmutzung von außen nach innen, damit sich der Fleck nicht ausbreiten kann.
10. Antiseptische Reinigungsmittel können bei hartnäckigeren Flecken verwendet werden. Desinfizierende Reinigungsflüssigkeiten wie Isopropylalkohol oder Ethanol sind für die Reinigung des GoTo Seat geeignet. Versichern Sie sich, dass alle Reinigungsprodukte vollständig entfernt


sind. Lassen Sie das Produkt lufttrocknen, sodass der gesamte Alkohol vor der Nutzung verdampfen kann.

11. Bitte legen Sie den Polsterüberzug nicht auf die Kunststoffsitzbasis, wenn dieser noch nicht vollständig getrocknet ist. Trocknen Sie alle Teile sorgfältig bevor Sie den GoTo Seat wieder zusammenbauen.
12. Bügeln Sie die Bezüge und Gurte nicht.
13. Bleichen Sie GoTo Seat-Teile nicht.

Tipp:

Einer der effektivsten

Polsterreinigungsmittel ist leicht selbst hergestellt. Geben Sie warmes Wasser (nicht heißes) in eine Mixschüssel und fügen Sie anschließend eine ¼ -Tasse Bio-Spülmittel hinzu. Mixen Sie die Flüssigkeit mit einem elektronischen Mixer so lange, bis ein dickflüssiger Schaum entsteht. Dieser Schaum wird festsitzenden Schmutz und die meisten Essens- und Getränkeflecken beseitigen. Dies ist nicht nur ein simples und günstiges Reinigungsmittel, sondern ebenfalls ungiftig und umweltfreundlich.

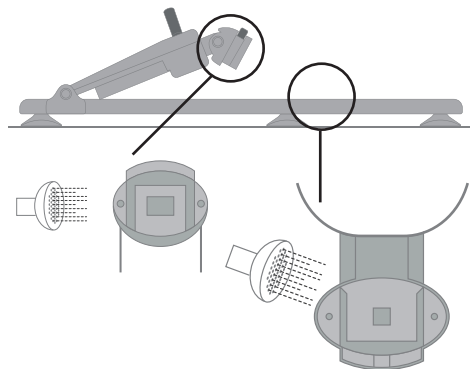

Die Floorsitter-Plattform

1. Stellen Sie sicher, dass die Floorsitter-Plattform nach jedem Gebrauch gereinigt wird.
2. Seife und Wasser sind für die tägliche Reinigung geeignet.
3. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung der Floorsitter-Plattform.
4. Zur Entfernung von Erde, Sand, Grass oder anderen kleinen Partikeln, die sich in der Floorsitter-Sitzverbindung befinden könnten, hilft ein leichtes Klopfen gegen die Verbindung, um diese herausfallen zu lassen. Spülen Sie die Verbindung ausgiebig ab, um sicherzustellen, dass sich keine Partikel festsetzen. Bei hartnäckigen Festsetzungen am Floorsitter kann das Zurückschnellen des Schnappverschlusses mit dem Daumen dabei helfen, Rückstände zu lockern und zu entfernen.
5. Sollte Ihr Floorsitter mit Salzwasser in Kontakt kommen, spülen Sie alle Teile sorgfältig mit frischen, sauberen Wasser ab.



Falls Ihr Floorsitter außerhalb des Hauses (beispielsweise am Strand oder im Garten) verwendet wurde, sollte dieser immer gründlich abgespült werden, um die Festsetzung von Partikeln und eine damit verbundene Einschränkung von Funktionen und Mechanismen zu vermeiden.

ABSCHNITT 08: Produktservice

Für etwaige Belange zum Produktservice gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.fireflyfriends.com oder kontaktieren Sie den Kundenservice von Firefly online unter customer.enquiries@fireflyfriends.com

ABSCHNITT 09: Wichtige Nutzungsrichtlinien

Platzierung des Kindes in den GoTo Seat

1. Der GoTo Seat muss, entsprechend für die geplante Nutzung, sicher zusammenmontiert und befestigt sein, bevor das Kind hineingesetzt wird.
2. Der Floorsitter sollte nur auf einer ebenmäßigen, soliden Oberfläche verwendet werden. Weiche Oberflächen, wie beispielsweise Teppichböden und Teppiche (vor allem Hochflor) können die Stabilität des Floorsitters beeinträchtigen und sollten daher mit Vorsicht genutzt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass die Gurtbänder das Kind im GoTo Seat nicht behindern. Die Schulter-Gurtbänder sowie die Seitenstütz-Gurtbänder sollten sehr locker sitzen.

4. In einem Einkaufswagen: Führen Sie die Beine des Kindes langsam/ vorsichtig durch die Beinlücken des Einkaufswagens; üben Sie keinen Druck auf die Beine aus.
5. Sobald die Beine sicher platziert sind, führen Sie die Arme des Kindes sanft durch die Schultergurte – diese sollten sehr locker anliegen. Die Polster der Gurte sollten auf den Schultern des Kindes platziert sein.
6. Schließen Sie den Mittelverschluss und passen Sie die Seitengurte an, damit das Kind sicher angeschnallt ist. Die Länge der Schultergurte sollten an den Körper des Kindes angepasst werden.
7. Die Länge der Sitzhose wird mithilfe des Verstellbeschlags, der sich unter dem Polsterbezug befindet, eingestellt. Im GoTo Seat mit der Größe 2 kann die Sitzhose nach außen verstellt werden und kann so mit Ihrem Kind mitwachsen.

Herausheben des Kindes aus dem GoTo Seat

1. Lockern Sie die Schultergurte und die Seitengurte
2. Öffnen Sie den Mittelverschluss, indem Sie den angebrachten Druckknopf drücken.
3. Streifen Sie die Schultergurte ab und nehmen Sie die Arme des Kindes sanft aus dem Gurtzeug.

4. Nur bei Größe 1, bei Nutzung in einem Einkaufswagen: heben Sie das Kind sanft hoch und führen Sie die Beine aus den Beinlücken des Einkaufswagens heraus.

Versuchen Sie nicht das Kind hochzuheben, während es noch am Sitz festgurgtet ist.

ABSCHNITT 10: Überprüfung des Produkts

Wir empfehlen, den GoTo Seat vor dem Gebrauch stets zu prüfen, um zu gewährleisten, dass das Produkt sicher ist.

Die empfohlenen Kontrollen werden nachstehend beschrieben:

1. Prüfen Sie, ob das Gurtzeug korrekt und sicher angeordnet ist.
2. Prüfen Sie die Polster auf Verschleißerscheinungen
3. Prüfen Sie alle Schnallen und Verschlüsse und stellen Sie sicher, dass die Gurte fest am Kunststoffgehäuse befestigt sind.
4. Prüfen Sie die Kunststoffe auf Risse oder andere Schäden
5. Prüfen Sie, ob alle (Dreh-) Knöpfe befestigt sind.
6. Sorgen Sie dafür, dass der GoTo Seat stabil und sicher steht bevor Sie das Kind hineinsetzen.
7. Falls Sie den Floorsitter verwenden,

stellen Sie sicher, dass dieser korrekt und sicher am GoTo Seat befestigt ist.

Sollten Sie etwaige Zweifel an der sicheren Nutzung Ihres Firefly-Produkts haben, oder falls jedwede Teile versagen sollten, stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein und nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unserer Kundendienstabteilung auf.

ABSCHNITT 11: Die Wiederausgabe von Firefly Produkten

Vor der erneuten Zuteilung eines Produkts wird die Desinfektion mit einem der folgenden Verfahren empfohlen:

Hinweis: Entfernen Sie immer zuerst angesammelten Schmutz, bevor Sie das Produkt desinfizieren.


1. Wenn möglich, empfehlen wir, ein automatisiertes „Nebelsystem“ für die Desinfektion zu verwenden, mit dem alle Oberflächen des Produkts mit einem Desinfektionsmittel behandelt werden. Die Anweisungen des Herstellers des gewählten Systems sind vor dem Gebrauch durchzulesen und genau zu beachten.
2. Wenn kein automatisiertes Desinfektionssystem verfügbar ist, sollten alle Oberflächen des Produkts mit desinfizierenden Wischtüchern oder mit einem weichen Tuch, das mit einem

flüssigen Desinfektionsmittel getränkt wurde, abgewischt werden. Dafür sind folgende Produkte geeignet: IPA 70 %, Alkohol 70 % oder verdünnte Bleiche. Die Anweisungen des Herstellers für das ausgewählte Produkt sind zu beachten. Die Bespannung und Stoffe des Produkts sollten wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ in diesem Handbuch beschrieben gründlich gereinigt werden.

Stellen Sie sicher, dass eine Kopie des Benutzerhandbuchs mit dem Produkt mitgeliefert wird. Falls Sie irgendwelche Zweifel an der weiteren sicheren Nutzung Ihres Firefly by Leckey- Produkts haben oder falls Teile versagen sollten, stellen Sie bitte die Benutzung ein und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit unserer Kundendienstabteilung auf:
customer.enquiries@fireflyfriends.com.

ABSCHNITT 12: Zusammenbau des GoTo Seat

12(a) Anpassung des Seitenstützteils

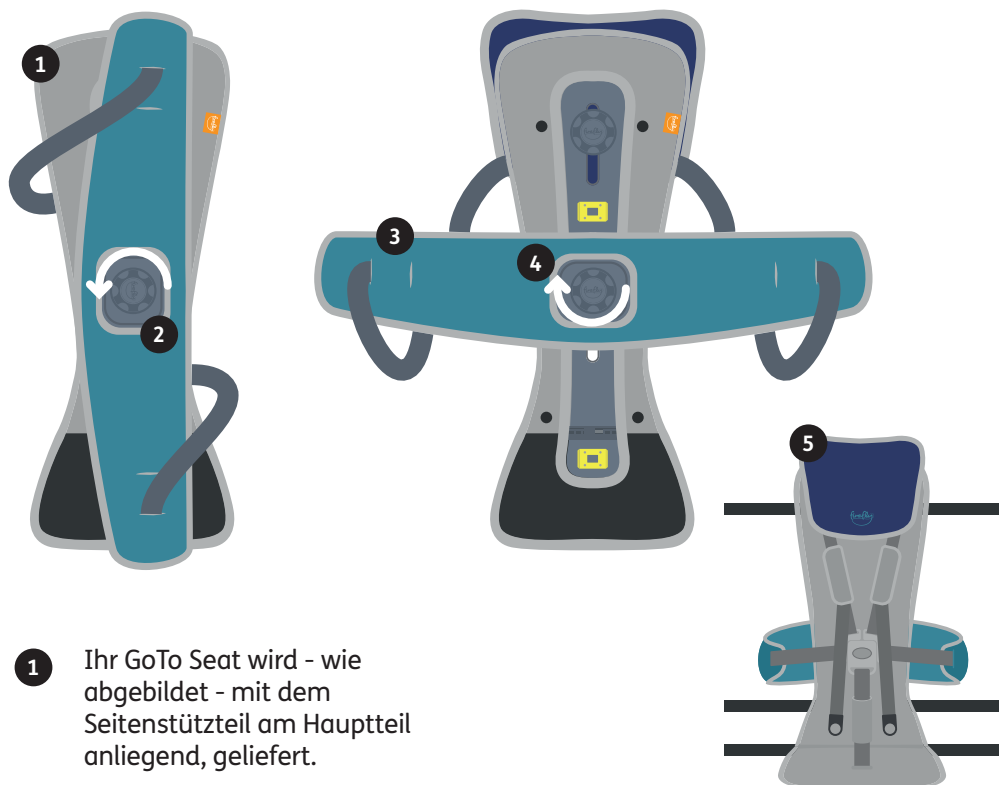


- 1 Ihr GoTo Seat wird - wie abgebildet - mit dem Seitenstützteil am Hauptteil anliegend, geliefert.
- 2 Lösen Sie den Drehknopf nur so weit, bis sie das Seitenstützteil drehen können.
- 3 Drehen Sie das Seitenstützteil gegen den Uhrzeigersinn und bringen sie es in Position.
- 4 Stellen Sie sicher, dass das Seitenstützteil sich im Mittelbereich des Rückenteils befindet und drehen sie dann den Drehknopf wieder fest.
- 5 Drehen Sie ihren GoTo Seat um und knipsen Sie die Gurte des Seitenstützteils in den Mittelverschluss. **Siehe Abschnitt 13(b) für weitere Anleitung.**
Prüfen Sie, ob das Gurtzeug wie abgebildet korrekt angeordnet ist, nachdem Sie die Seitengurte zusammengeknipst haben.


12(b) Der Aufbau der Floorsitter-Plattform

(falls mit GoTo Seat erworben)

Die Floorsitter-Plattform sollte ausschließlich auf festem, soliden und ebenmäßigen Untergrund stehen. Beim Platzieren des Floorsitters auf dem gewünschten Untergrund ist es zwingend erforderlich, dass sich alle Gummifüße in Kontakt mit dem Untergrund befinden.

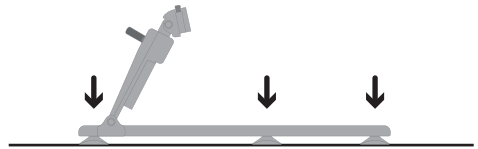


Stellen Sie, sobald der Floorsitter auf dem gewünschten Platz steht, sicher, dass der Rückenlehnenarm in höchster Position eingestellt ist.

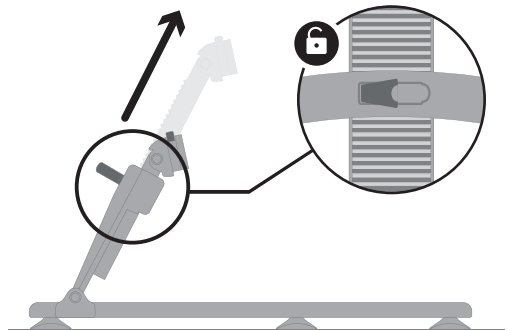


ABSCHNITT 13: Nutzung des GoTo Seat auf einem Stuhl mit fester Rückenlehne

13(a) Die Montage des GoTo Seat an einen Stuhl mit fester Rückenlehne

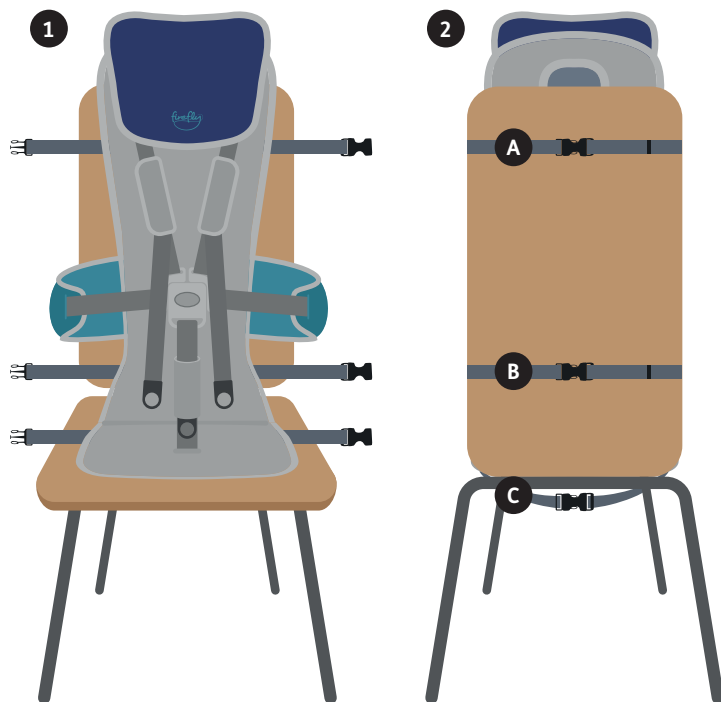


- 1 Sorgen Sie dafür, dass alle Gurte gelockert und nicht aneinander befestigt sind. Legen Sie den GoTo Seat auf den Stuhl.


- 2 Befestigen Sie die Gurte **A** zusammen sicher um den Rücken des Stuhls. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den Gurten **B**. Befestigen Sie die Gurte **C** unterhalb des Stuhls.

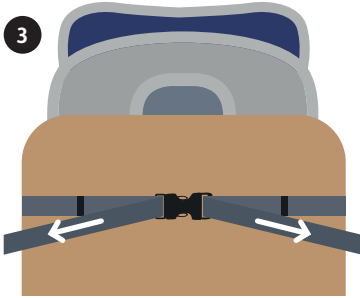

Ziehen Sie gleichmäßig an den Gurten, um sie zu straffen.

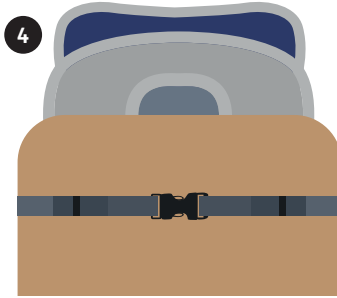

Überstehende Gurtenden werden gerollt und mit den Klipsen gesichert.


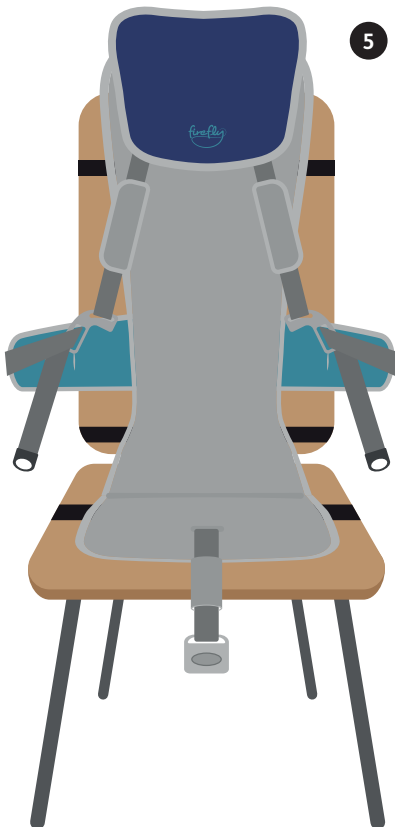


Stellen Sie sicher, dass alle schwarzen Gurte sicher und straff am Rücken des Stuhles sitzen und der 5-Punkte-Verschluss vorne nicht verschlossen ist, bevor Sie das Kind in den GoTo Seat setzen.

13(b) Das Öffnen und Schließen des 5-Punkte-Verschlusses


Bevor Sie beginnen stellen Sie sicher, dass die Schulter-, Seiten- sowie Leistengurte alle gelöst sind.

- 1 Befestigen Sie die Verschlüsse der beiden Seitenstützgurte an den Seiten des Mittelverschlusses.
- 2 Sobald die Verschlüsse befestigt sind, stellen Sie die Schulter-, Seiten- und Leistengurte ein, indem Sie an den Gurtenden ziehen.

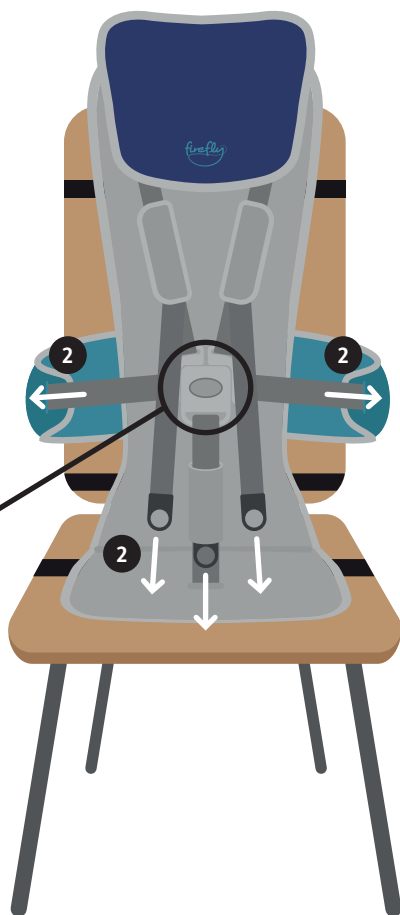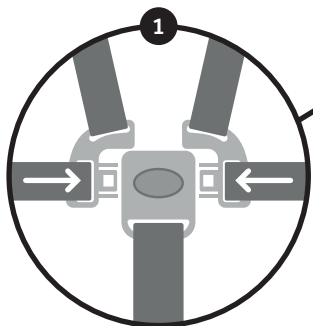

3


Bei dem GoTo Seat in Größe 2 kann die Sitzhose, entsprechend der Bedürfnisse des Kindes, verlängert oder verkürzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Sitzhose fest an der basis des GoTo Seat angebracht

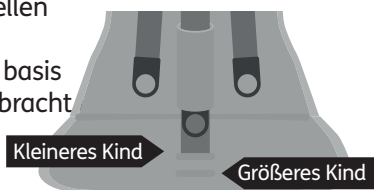

Sorgen Sie dafür, dass die Gurte nicht verdreht sind, wenn der Hauptverschluss geschlossen ist.

13(c) Die Anpassung der Kopfstütze sowie des Seitenstützteils

- 1 Drehen Sie den Drehknopf an der Kopfstütze gegen den Uhrzeigersinn, und lösen Sie ihn von der GoTo Seatbasis. Bewegen Sie die Kopfstütze je nach gewünschter Position nach oben oder unten.
- 2 Sobald sich die Kopfstütze in gewünschter Höhe befindet, drehen Sie den Drehknopf zurück in die GoTo Seatbasis, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen.
- 3 Lösen Sie das Seitenstützteil mittels Drehen des Drehknopfes entgegen dem Uhrzeigersinn. Bewegen Sie das Seitenstützteil aufwärts oder abwärts, bis zur gewünschten Position. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, stellen Sie das Seitenstützteil fest, indem Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen.

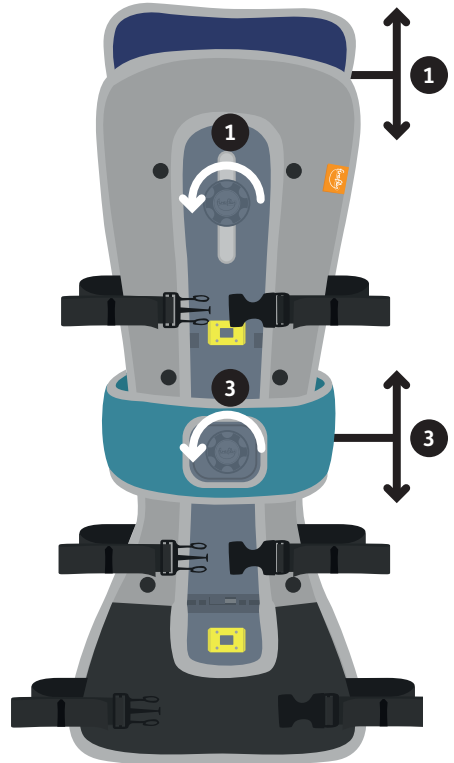


ABSCHNITT 14: Nutzung des GoTo Seat im Einkaufswagen

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Gurte gelockert sind. Platzieren Sie den GoTo Seat in den Sitz des Einkaufswagens. Ziehen Sie die Gurte **A** durch das Gitter des Wagensitzes und verschließen Sie diese. Ziehen Sie an den Gurten, um diese zu straffen.
- 2 Fädeln Sie anschließend die Gurte **B** durch die Metallschleufe des Wagensitzes, ziehen und straffen Sie die Gurte nach Bedarf fest.



Falls sich keine Metallschleufe oberhalb des Einkaufswagensitzes befindet, befestigen Sie die Gurte B an demselben Rahmen wie die Gurte A.

- 3 Befestigen Sie die Gurte **C** unterhalb des Einkaufswagensitzes und ziehen Sie diese fest. Drehen Sie die überschüssigen Gurtteile in Schlaufen und stecken Sie diese fest.
- 4 Stellen Sie sicher, dass der Einkaufswagensitz sicher, mit geöffnetem 5-Punkte-Verschluss und gelockerten Gurten, montiert ist, bevor Sie das Kind hineinsetzen.

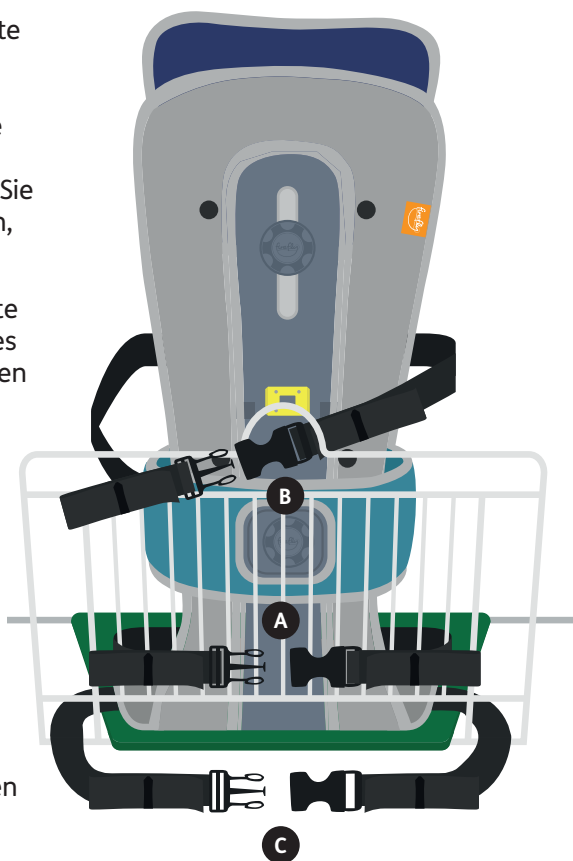


ABSCHNITT 15: Anbringen des GoTo Seat an die Floorsitter-Plattform




Bevor Sie den GoTo Seat am Floorsitter anbringen, folgen Sie bitte der Anleitung in Abschnitt 12(b).

- 1 Legen Sie den GoTo Seat mit der Sitzbasis flach auf den Floorsitter.

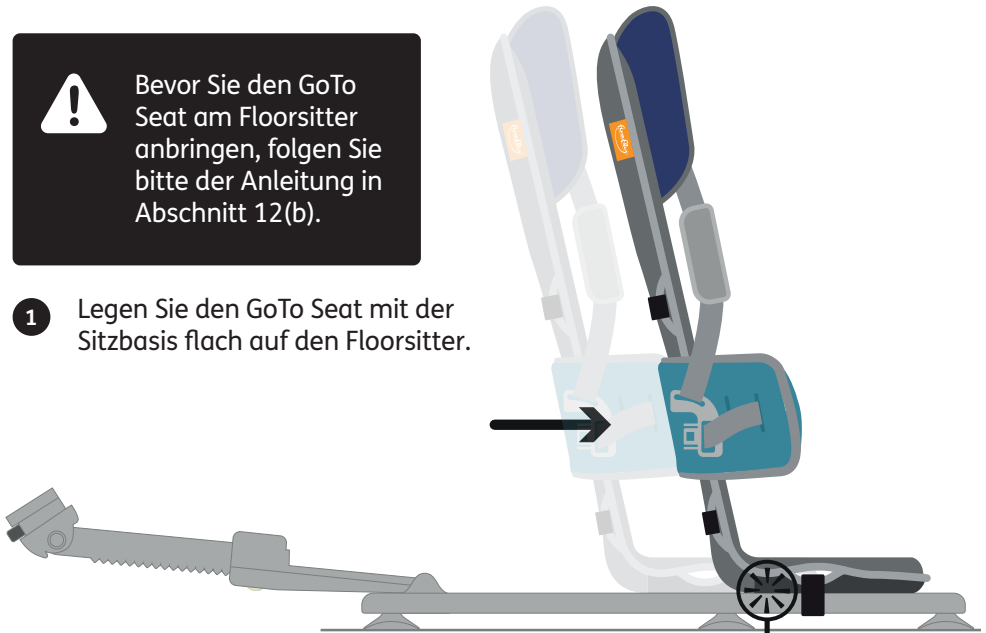


- 2 Stellen Sie sicher, dass die Sitzbasis mittig auf dem Floorsitter angeordnet ist, schieben Sie die Sitzbasis nach vorne, sodass diese in den Verschlusskanal hineingleitet.

- 3 Sobald die Sitzbasis des GoTo Seat in den Floorsitter einrastet hören Sie ein Klickgeräusch. Dann sind beide Teile fest verbunden.

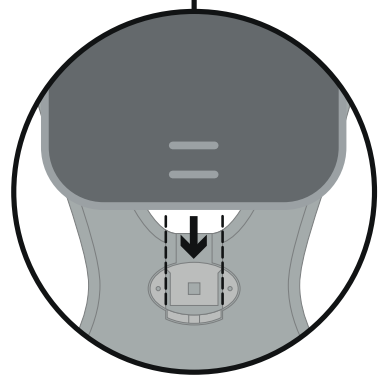

ABSCHNITT 15: Anbringen des GoTo Seat an die Floorsitter-Plattform (Fortsetzung)

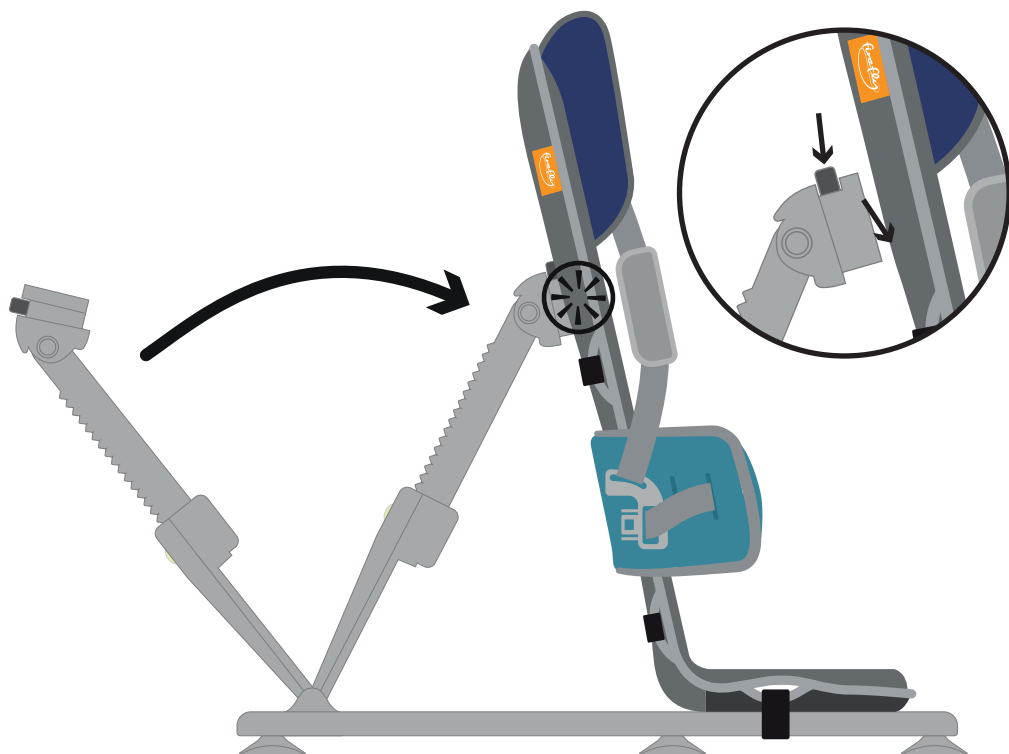

Deutsche

Stellen Sie sicher, dass der Rückenlehnen-Verstellarm des Floorsitter in höchster Position eingestellt ist, bevor Sie diesen an der Rückenlehne befestigen.

Halten Sie mit einer Hand den GoTo Seat; mit der anderen Hand halten Sie den markierten Druckknopf gedrückt und lassen die Verstellarm in die Rückenlehne des GoTo Seat einrasten.



Sobald die Teile korrekt verbunden sind, hören Sie ein deutliches Klickgeräusch. Achten Sie bitte auf dieses Geräusch.

ABSCHNITT 16: Empfohlene Positionen der Rückenlehne


Aufrechte Position – Wenn Ihr Kind eine gute Sitztoleranz besitzt sowie über Rumpfkontrolle verfügt, ist eine aufrechte Sitzposition ggf. möglich.



Mittlere Sitzposition – wir empfehlen Ihnen, während des Hineinhebens Ihres Kindes in den Sitz, die mittlere Sitzposition einzustellen.



Zurückgelehnte Position – für Kinder mit minimaler Kopfkontrolle empfehlen wir, den GoTo Seat in die komplett zurückgelehnte Position zu bringen.

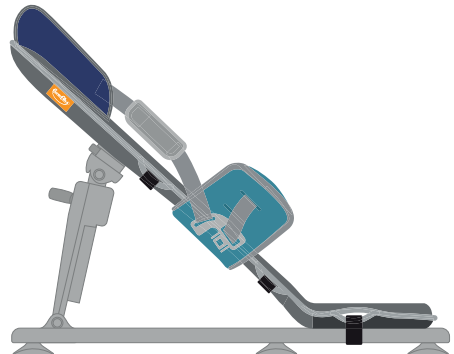


16(a): Nutzung der Neigefunktion der Rückenlehne des GoTo Seat mit Floorsitter

So bald ihr Kind sicher und gestützt sitzt, kann die Neigungsfunktion der Rückenlehne genutzt werden.


Gehen Sie bei der Veränderung der Neigung umsichtig vor. Führen Sie diese Bewegung so sanft wie möglich aus, um eventuelle Ängstlichkeit des Kindes zu vermeiden.

Um die Rückenlehne des GoTo Seat in eine aufrechtere Position zu bringen, legen Sie eine Hand auf den GoTo Seat **A** oberhalb der Rückenlehne; die andere Hand legen Sie auf den grünen Klipp am Verstellarm des Floorsitters **B**.

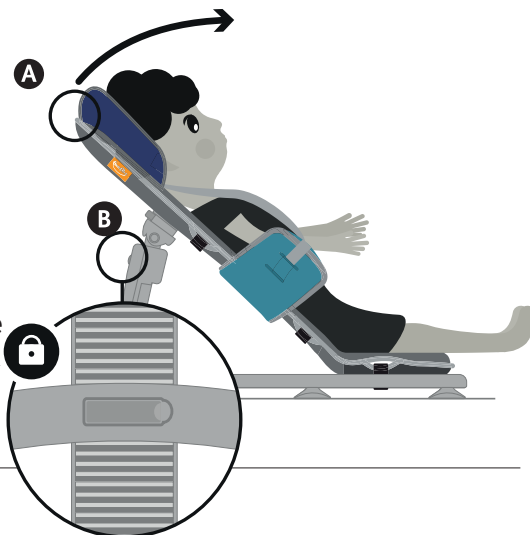


Lösen Sie den Klipp und bringen Sie den Sitz in die gewünschte, dem Kind entsprechende, aufrechte Position. **A**

Befestigen Sie den Klipp am Floorsitter. Sobald Sie ein Klicken hören, ist der Klipp befestigt.

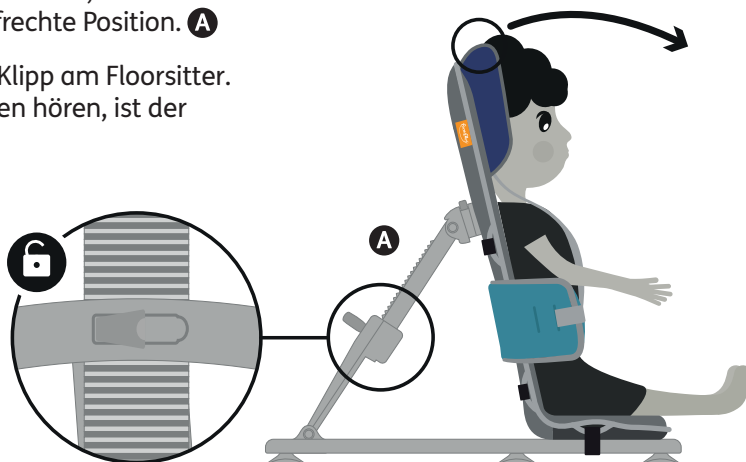


16(b) Entfernung des GoTo Seat vom Floorsitter


Um den GoTo Seat vom Floorsitter zu lösen, drücken Sie den grünen Druckknopf am Verstellarm des Floorsitter und drücken Sie die Rückenlehne des GoTo Seat nach vorne.

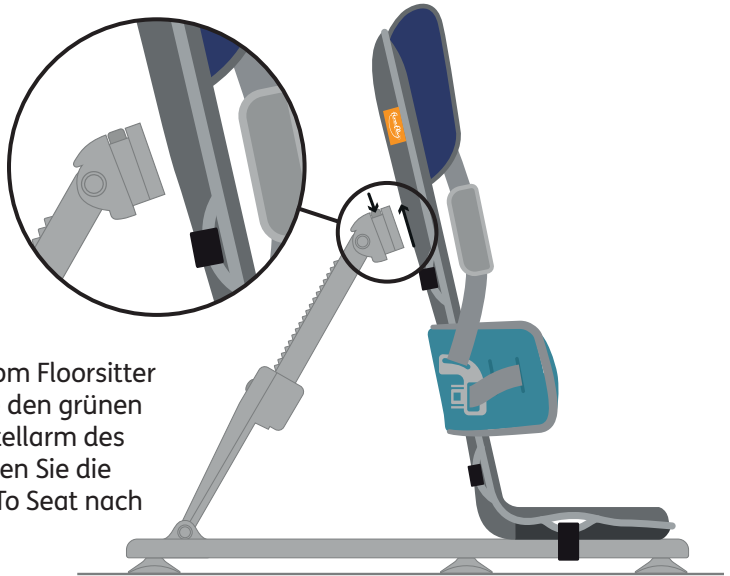

Um die Sitzbasis zu lösen, ziehen Sie an der grünen Kunststoffflasche **A** und gleiten dann mit der Sitzbasis zurück. Heben Sie den GoTo Seat vom Floorsitter. **B**

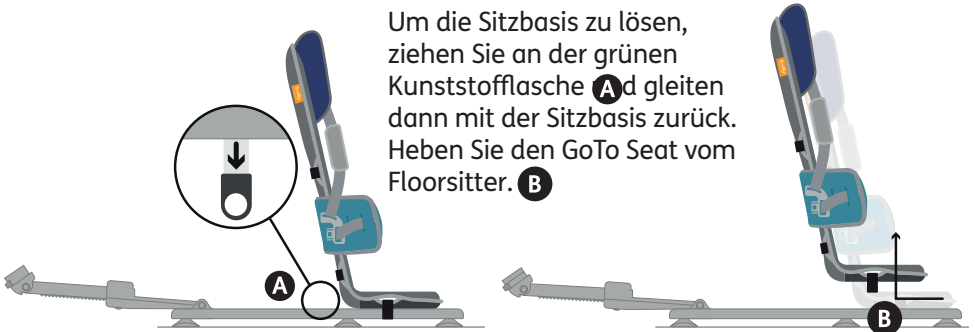

Um den Floorsitter von hölzernen oder gefliesten Boden zu lösen, heben Sie den Rahmen sanft an um so die Gummifüße zu abzulösen. Falls die Gummifüße sich nicht beim ersten Versuch lösen, wenden Sie bitte keine Kraft an. Gleiten Sie mit der Hand (kein Werkzeug) unter die Füße und sie werden sich ablösen.

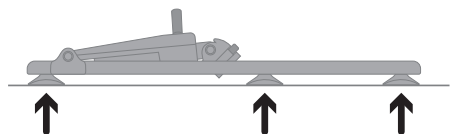


ABSCHNITT 17: Zerlegung des GoTo Seat sowie Entfernung der Polster

17(a) Kopfstütze


- 1 Schrauben Sie den Drehknopf an der Kopfstütze gegen den Uhrzeigersinn auf, um die Kopfstütze von der GoTo Seat-Basis zu lösen.



- 2 Zur sicheren Verwahrung schrauben Sie den Drehknopf am hinteren Teil der Kopfstütze fest.
- 3 Knöpfen Sie die Polsterung beidseitig von der Kopfstütze ab.
- 4 Ziehen sie die Polsterung über die Kopfstütze, um diese abzunehmen.

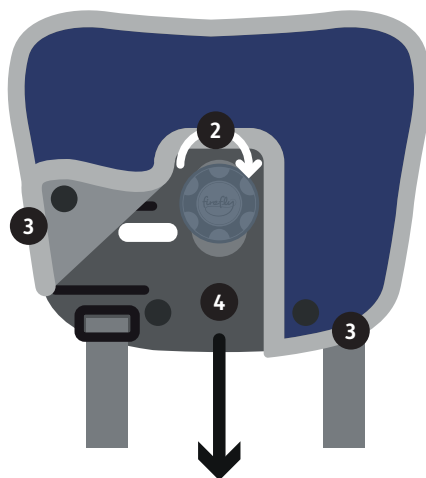


- 5 Lösen Sie die Kopfstütze vollständig von der GoTo Seat-Basis ab, indem Sie die Schultergurtverschlüsse von der Kopfstütze entfernen.

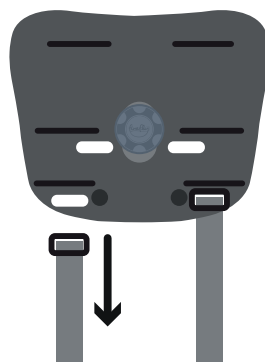


17(b) Seitenstützteil

Beginnen Sie, wie auf der Abbildung dargestellt, mit allen am Verschluss angebrachten Gurten.

- 1 Drehen Sie den GoTo Seat um und lösen Sie das Seitenstützteil, indem Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben.
- 2 Schieben Sie das Seitenstützteil hoch und über die Rückenlehne des GoTo Seat. Befestigen Sie den Drehknopf am Schienenkomponent um einen Verlust zu vermeiden.
- 3 Drehen Sie den GoTo Seat wieder um und legen Sie das Seitenstützteil auf den GoTo Seat.

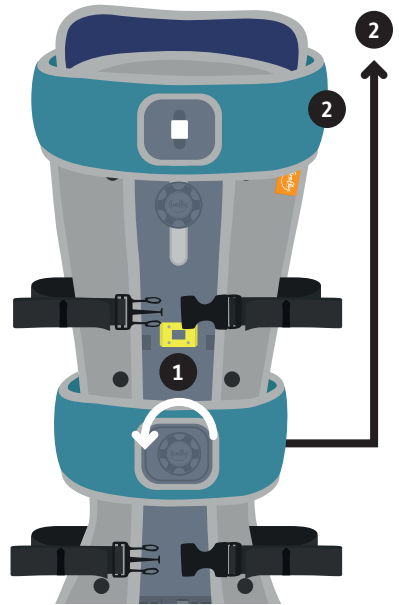

- 4 Lockern Sie die Seitengurte so weit wie möglich, aber lassen Sie dabei den Verschluss geschlossen.
- 5 Ziehen Sie eine Seite des Kunststoffeinsatzes aus der Polsterhülle. Entfernen Sie den Gurt, indem Sie die Kunststoffschnalle durch die Öffnungen und anschließend durch die Polsterung fädeln. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Seite des Seitenstützteils. Sobald die Polsterung vom Seitenstützteil entfernt wurde, kann Sie gewaschen werden.

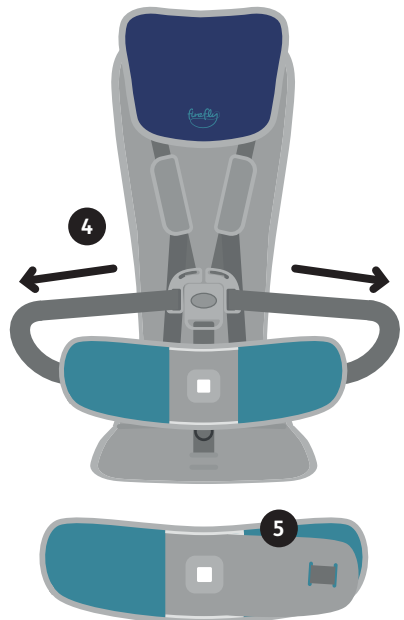


17(c) Gurte

- 1 Legen Sie den GoTo Seat kopfüber vor sich und knöpfen Sie die Polsterung auf. Entfernen Sie die Gurte vom Sitzpolster des GoTo Seat, indem Sie die Schnallen durch die Öffnungen des Polsters und der Kunststoffbasis herausfädeln.




Befestigen Sie die Gurte paarweise miteinander und verstauen Sie diese an einem sicheren Ort. Beachten Sie, dass die Gurte **A** länger sind und nur an der Rückseite des Sitzkissens befestigt werden sollten. Die Gurte **A** haben ein anderes Warnkennzeichen und können so bei Bedarf leicht auseinandergehalten werden.

- 2 Wie bei den obigen Gurten, fädeln Sie die Schnallen der Sitzhose aus den entsprechenden Öffnungen unterhalb der GoTo Seatbasis heraus; danach entfernen Sie die Polsterung.

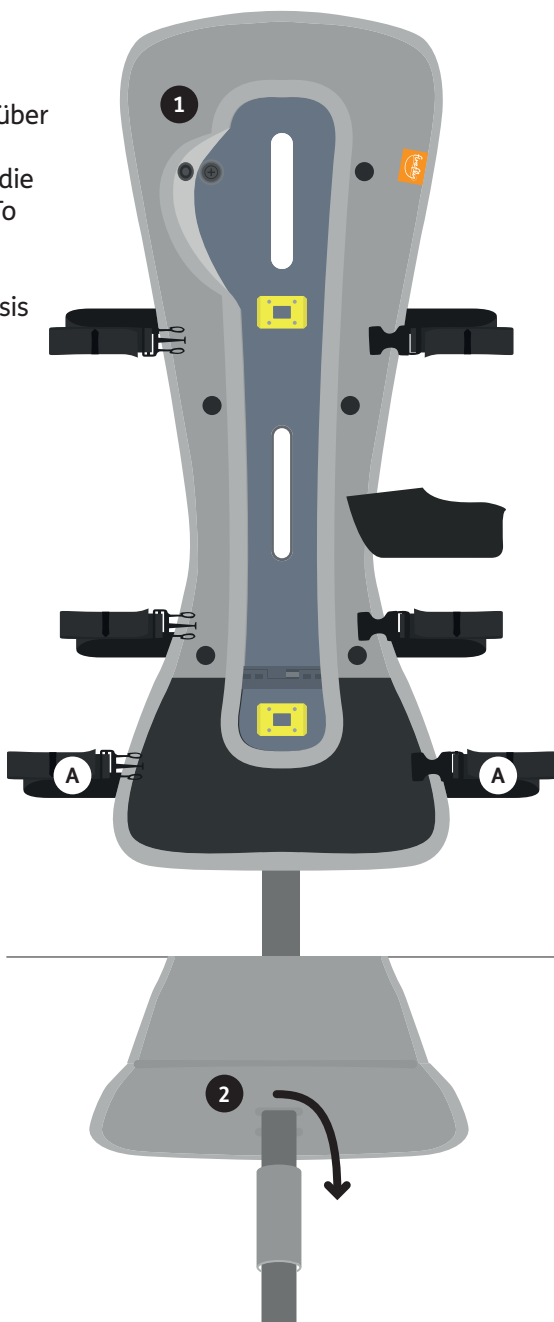



17(d) Polsterung

- 3** Entfernen Sie die Fütterung der Polsterung. Beim GoTo Seat in der Größe 1 lösen Sie das Klettband von der Sitzbasis um die Fütterung zu entfernen.

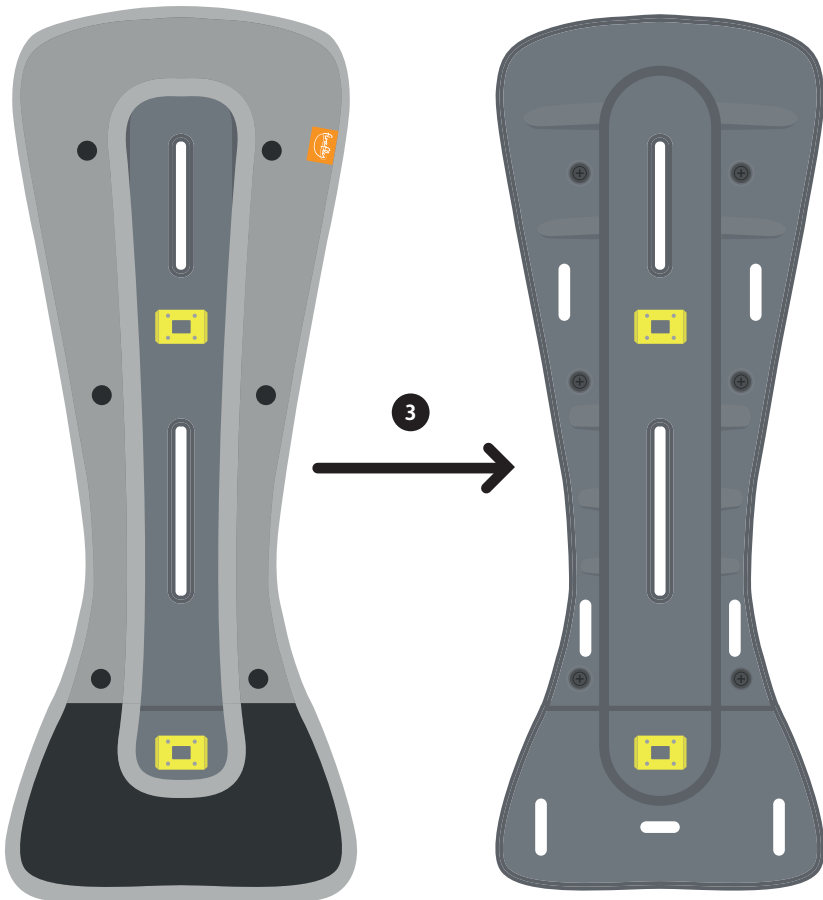

1 Bringen Sie die Gurte **B** und **C** der Einlage des GoTo Seat-Rückenteils der GoTo Seat-Basis wieder an und die Gurte **A** (die längsten Gurte) wieder am Sitzpolster an.

- 1 Bringen Sie die Gurte **B** und **C** der Einlage des GoTo Seat-Rückenteils der GoTo Seat-Basis wieder an und die Gurte **A** (die längsten Gurte) wieder am Sitzpolster an.
- 2 Fädeln Sie die Schnalle eines jeden schwarzen Gurtes (nicht den Verschluss) zuerst durch die Öffnungen im Polster und dann entsprechend durch die Öffnungen im Einsatz.
- 3 Wie bei den obigen Gurten, fädeln Sie die Schnallen der Sitzhose durch die entsprechenden Öffnungen in der GoTo Seatbasis im unteren Teil der Sitzpolsterung sowie durch die Kunststoffbasis.
- 4 Sobald alle Gurte eingeführt sind, führen Sie die Fütterung in die Polsterung ein.

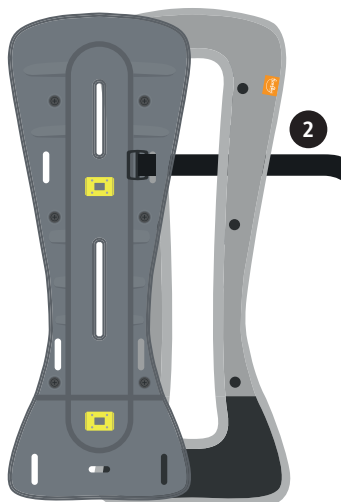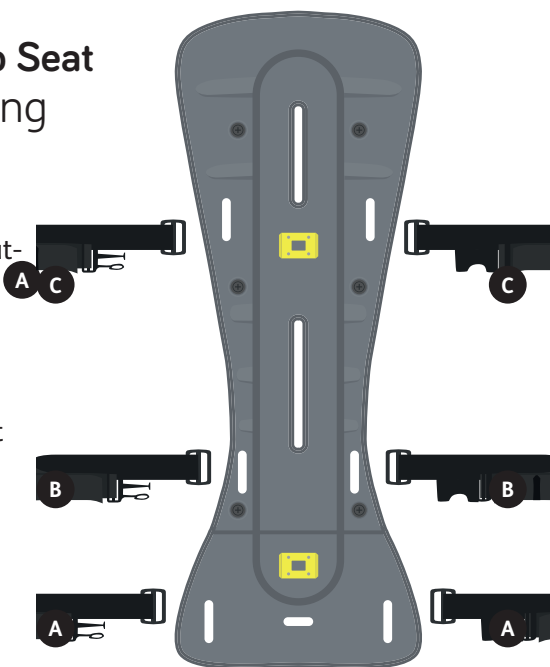

Führen Sie den breitesten Teil der GoTo Seatbasis zuerst in die Polsterung ein. Bei der Größe 1 öffnen Sie bitte vorher den Klettverschluss.

18(b) Seitenstützteil








Bevor Sie beginnen legen Sie bitte anhand der Verschlüsse fest, welcher Stützgurt an welcher Seite der Polsterung des Seitenstützteils befestigt werden soll.

- 1 Lockern Sie die Gurte des Seitenstützteils am Zentralverschluss so gut wie möglich. Ordnen Sie die Polsterbezüge, den Kunststoff-Seitenstütz-Einsatz sowie die Gurte wie oben abgebildet an.
- 2 Führen Sie den Seitenstützgurt durch die Öffnungen der Seitenstütz-Polsterung des Seitenstützteils ein.
- 3 Ziehen Sie den Gurt durch die Polsterung.



Bei kleineren Kindern fädeln Sie den Verschluss durch die innere Öffnung der Polsterung.



- 4 Fädeln Sie den Gurt wie oben dargestellt durch den Seitenstützeinsatz (auf diese Weise ist die Schnalle außerhalb der Seitenstütze angebracht, sodass Irritationen während der Nutzung vermieden werden). Sie können auch eine andere Fädeltechnik verwenden um die Weite der Seitengurte an Ihr Kind anzupassen.
- 5 Führen Sie den Einsatz der Kunststoffseitenstütze in die Polsterung hinein und ziehen Sie anschließend am Gurt, um die diese in die Polsterung zu ziehen.

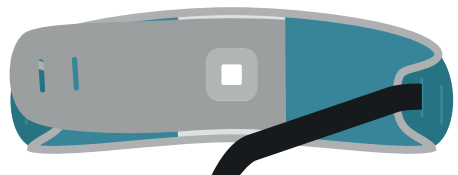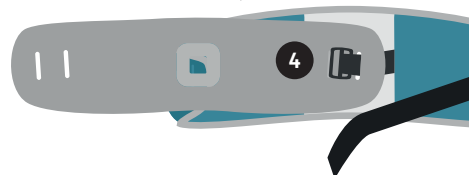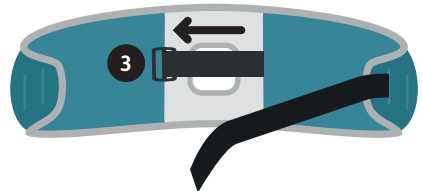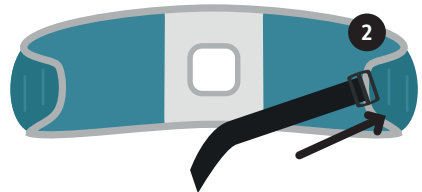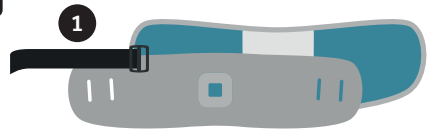

Wiederholen Sie diese Vorgänge auf der anderen Seite.

18(c) Kopfstütze

- 1 Fädeln Sie die Schnalle des Schultergurtes gerade durch die Frontseite der Einlage der Kopfstütze und sichern Sie diese an der Rückseite.
- 2 Führen Sie die Kopfstützeinlage in ihre Polsterung und schließen Sie die Druckknöpfe.
- 3 Befestigen Sie die Kopfstütze an die GoTo Seat-Basis, indem Sie den Drehverschluss der Kopfstütze auf die Öffnung der GoTo Seat-Basis platzieren. Befestigen Sie die Kopfstütze an die GoTo Seat-Basis, indem Sie den Drehverschluss im Uhrzeigersinn zuschrauben

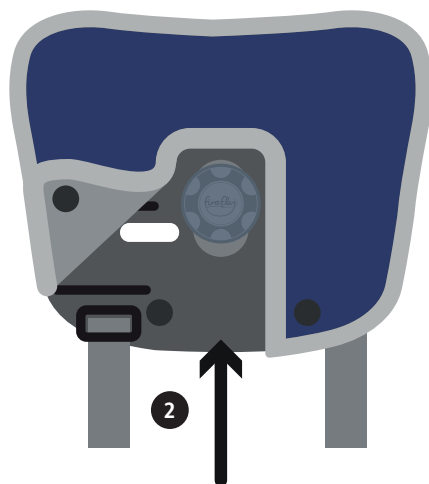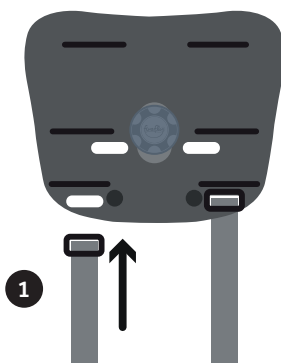

ABSCHNITT 19:

Größeninformationen

	Größe 1	Größe 2
Von der Sitzbasis bis zur Kopfstütze Max. (mm)	540/21	680/27
Von der Sitzbasis bis zur Kopfstütze Min. (mm)	380/14	510/20
Breite des Seitenstützteils Max. (mm)	260/10	300/12
Breite des Seitenstützteils Min. (mm)	190/7.5	210/8
Sitztiefe (mm)	157/7	244/9.5
Maximalgewicht (kg)	15/33*	30/66*
Altersspanne (voraussichtlich)	1-3 Jahre	3-8 Jahre

*(Falls das Kind über 13 kg wiegt, kann der GoTo Seat nicht in einem Einkaufswagen verwendet werden)

ABSCHNITT 20:

Tabelle der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt
	Bedienungsanleitung lesen
	CE-Kennzeichnung
	UKCA-Kennzeichnung
	Warnung
	Hersteller
	Seriennummer
	Modellnummer
	Max. Körpergewicht des Benutzers
	Herstellungsdatum
	Latexfrei
	Kennzeichnungssystem „Unique Device Identification“
	Maschinenwäsche - Wassertemperatur 40°C
	Nicht trocknergeeignet
	Nicht bügeln
	Nicht bleichen
	Nicht chemisch reinigen
	Nur Handwäsche
	Adresse des Importeurs
	Adresse des Bevollmächtigten für die Schweiz

GoTo Seat Vinyl

Reinigungs- und Pflegehinweise

- Wischen Sie es regelmäßig mit einem Mikrofasertuch ab, das nur leicht mit kaltem Wasser befeuchtet wird. Anschließend mit einem sauberen, saugfähigen Tuch trocknen.
 - Verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich mit einem saugfähigen, trockenen Tuch aufnehmen, um Fleckenbildung zu vermeiden. Mit einem Mikrofasertuch reinigen, leicht mit kaltem Wasser befeuchtet.
 - Beachten Sie, dass Farbstoffe und Farbpigmente aus Indigojeans, Kugelschreibern und Filzstiften dauerhaft verfärben können.
 - Wenn sich Verschmutzungen angesammelt haben, verwenden Sie eine milde Seife (nicht alkalisch). Achten Sie darauf, alle Seifenreste zu entfernen. Anschließend mit einem saugfähigen Tuch trocknen.
 - Körperflüssigkeiten und starke Verschmutzungen sofort (innerhalb von 15 Minuten) mit kaltem Wasser entfernen. Wenden Sie Ihr zugelassenes Infektionsschutzprotokoll an: eine 10.000 ppm Natriumchlorid-Bleichlösung, Haz-Tabs oder Chlor-Clean. Alle Produktreste entfernen und mit einem sauberen, saugfähigen Tuch trocknen.
 - Beachten Sie, dass die Dampfreinigung zwar desinfiziert, die Wärmeanwendung jedoch Färbemittel fixieren und zu dauerhaften Spuren führen kann.
 - Tragen Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder andere Chemikalien auf dem Gewebe auf.
 - Gewebe nicht chemisch reinigen und nicht vollständig ins Wasser tauchen. Nicht in den Trockner geben.
-



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera

Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch



Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com

