



# WeGo

Manual do Utilizador WeGo



Family Freedom

[fireflyfriends.com](http://fireflyfriends.com)



**FABRICADO POR**

IBELIEVE SPORTS LTD PARA  
James Leckey Design Ltd.

TEL: +44 (0)28 9260 0750

MODELO: CARRINHO DE PASSEIO WEGO

MÊS E ANO

DA FABRICAÇÃO: 2018/11

IMPLEMENTAÇÃO

DE NORMAS ISO 7176

**NOME DE COMERCIANTE REGISTADO  
E MORADA**

JAMES LECKEY DESIGN LIMITED

19C BALLINDERRY ROAD, LISBURN  
BT28 2SA, UNITED KINGDOM

TEL: +44 (0)28 9260 0750

MODELO: CARRINHO DE PASSEIO WEGO

MÊS E ANO

DA FABRICAÇÃO: 11/2018

IMPLEMENTAÇÃO

DE NORMAS ISO 7176




**AVISO:** Para  
evitar lesões  
graves resultantes

de quedas e deslizos,  
use sempre o arnês de  
segurança. Nunca deixe o  
seu filho desacompanhado  
**IMPORTANTE:** Mantenha  
estas instruções para  
referência futura. A  
segurança do seu filho  
é sua responsabilidade.  
Este carrinho de passeio é  
adequado para uma criança.

**AVISO:** : Este assento não  
é indicado para crianças  
abaixo dos 6 meses.

**RESPEITA A NORMA BRITÂNICA  
1021 – PARTE 1: 2014 REGULA-  
MENTO DE SEGURANÇA PARA  
IGNIÇÃO DE CIGARROS**

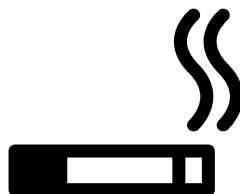

**CUIDADO O DESCUIDO  
CAUSA INCÊNDIOS**

**O Firefly WeGo é um carrinho de passeio leve que é completamente dobrável e permite a execução de atividades diárias e viagens com facilidade.**

---

## **CONTEÚDOS**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 01 Utilização prevista              | p.04 |
| 02 Certificação                     | p.05 |
| 03 Avisos E Precauções              | p.06 |
| 04 Termos de garantia               | p.08 |
| 05 Informação de segurança          | p.09 |
| 06 Precauções e Contraindicações    | p.10 |
| 07 Limpeza e cuidados               | p.11 |
| 08 Assistência técnica de produtos  | p.11 |
| 09 Diretrizes importantes           | p.12 |
| 10 Inspeção do produto              | p.13 |
| 11 Reutilização de Produtos Firefly | p.13 |
| 12 Configurar o seu WeGo            | p.14 |
| 13 Ajustar WeGo                     | p.20 |
| 14 Utilizar o GoTo Seat com WeGo    | p.22 |
| 15 Ajustar o arnês WeGo             | p.25 |
| 16 Dimensões WeGo                   | p.26 |

---

# SECÇÃO 01: UTILIZAÇÃO PREVISTA

## Utilização prevista

A cadeira de passeio WeGo destina-se a proporcionar mobilidade a crianças que não conseguem andar sozinhas até um peso máximo de 30kg. Também é adequado para crianças que precisam de apoio adicional para a parte superior do corpo e que não podem sentar-se sozinhas.

## Indicações para uso

A WeGo é indicada para uso prescritivo e não prescritivo para crianças que requerem níveis leves de suporte postural ou que têm dificuldades com a deambulação. A WeGo é principalmente um dispositivo não prescritivo disponível diretamente para pais/responsáveis. Os utilizadores podem incluir, mas não estão limitados a, crianças não deambuladoras com um distúrbio neuromuscular, congénito ou cromossómico, lesão da medula espinhal ou atraso global de desenvolvimento. Estas condições normalmente afetam a capacidade da pessoa de se sentar sem apoio. A WeGo foi desenhada para ser compatível com a GoTo Seat; um dispositivo de assento portátil fabricado pela Leckey e desenhado para fornecer níveis mais elevados de suporte postural de curto prazo para crianças com deficiência. Para crianças que requerem este nível mais alto de suporte postural, a WeGo indica que requer o uso adicional da GoTo Seat. A WeGo é desenhada apenas para uso de curto



**Aviso:** A criança deve estar segura no arnês de 5 pontos em qualquer altura e nunca a deixar sem supervisão enquanto se encontra no carrinho de passeio.

**Aviso:** Quando a sua WeGo estiver parado, recomendamos que o travão esteja a funcionar corretamente de modo a prevenir qualquer movimento não desejado.

prazo e não oferece suporte postural de longo prazo adequado para uma criança com necessidades adicionais. O dispositivo é indicado para promover a inclusão na comunidade e auxiliar no transporte do cuidador. Devido ao cuidado pessoal íntimo associado às crianças, este produto foi desenhado de forma a que a pele e os fluidos corporais, incluindo urina e fezes, possam estar em contacto com o dispositivo. Todos os dispositivos foram desenhados com isto em mente e as instruções de limpeza são fornecidas para garantir que a saúde de uma criança ou de um adulto não seja comprometida.

## SECÇÃO 02: CERTIFICAÇÃO

O WeGo está classificado como um dispositivo médico de Classe I, segundo os regulamentos da UE e do Reino Unido. Como fabricante, James Leckey Design Limited, declara que este produto está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745), Regulamentos de Dispositivos Médicos do Reino Unido de 2002, Diretiva de Dispositivos Médicos (93/42 EEC) e EN 12182: 2012 Produtos de apoio para pessoas com deficiência, requisitos gerais e métodos de teste.

**Aviso ao utilizador e/ou doente:**  
**Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro, no qual o utilizador e/ou doente está estabelecido.**



**NOTA:**  
**Conselhos gerais para o utilizador.**

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em ferimentos físicos, danos no produto ou no meio ambiente!

## SECÇÃO 03: AVISOS E PRECAUÇÕES

### 1. AVISO RISCO DE TROPEÇAR:

- Nunca deixe o WeGo num terreno irregular.
- Nunca deixe a criança sozinha sentada no WeGo, por exemplo, quando dorme.
- Verifique sempre se a inclinação, as fivelas de fixação do GoTo Seat e a cobertura estão seguras antes do utilizador ser transferido para o carrinho. Fixe o arnês de 5 pontos ou o arnês de 5 pontos GoTo Seat assim que o utilizador for colocado no carrinho.
- Certifique-se de que o travão está totalmente engatado e seguro (deve ouvir um “clique”).
- Evite pendurar sacos pesados nas pegas.
- Verifique se o corpo do carrinho ou a unidade do assento ou os dispositivos de fixação do assento do carrinho estão corretamente encaixados antes de usar.

### 2. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS:

- Cuidado para que os dedos do operador ou da criança não fiquem presos nos espaços entre o assento e a estrutura.

### 3. AVISO DE SEGURANÇA DO OCUPANTE:

- O WeGo não é adequado para crianças com menos de 6 meses.
- Antes de colocar o utilizador no WeGo, ajuste o produto para a sua orientação de terapia e verifique a sua estabilidade e se a estrutura do carrinho de bebé está totalmente travada e o travão de mão está totalmente engatado.
- As transferências do utilizador para dentro e para fora do produto devem ser realizadas com equipamentos e pessoal adequados.
- Certifique-se que existe espaço de acesso adequado antes de fazer uma transferência para o dispositivo e que todos os cliques e fivelas estão seguros (ou seja, fivelas de fixação do GoTo Seat). Não é aconselhável deslocar o utilizador enquanto estiver sentado ou qualquer ajuste do assento enquanto o utilizador estiver sentado.
- Certifique-se de que todos os arneses de 5 pontos do ocupante estão apertados e ajustados para prender o ocupante com segurança no lugar antes de usar o WeGo. Nunca deixe a criança sozinha quando estiver no WeGo. Risco de estrangulamento ou sufocamento se os utilizadores ficarem presos em partes do carrinho.

- Se o utilizador apresentar qualquer forma de desconforto, retire-o em segurança do produto o mais rapidamente possível.
- Para evitar ferimentos, mantenha a criança afastada ao desdobrar e a dobrar este produto.
- Não deixe a criança brincar com este produto.
- Este produto não é adequado para corridas ou patinagem.
- Nunca use este carrinho para mais de uma criança.

#### **4. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS:**

- Cuidado ao montar ou ajustar a posição dos componentes do assento para que os dedos da criança e dos seus não fiquem esmagados ao posicionar os componentes do assento e a apertar as fixações.
- O cuidador não deve tocar em nenhuma articulação ou eixo móvel que não se encontre travada.
- Cuidado ao montar, desdobrar e dobrar a estrutura do carrinho de passeio para que os dedos não fiquem presos, e também ao ajustar a inclinação do encosto.

#### **5. VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE PRECAUÇÃO:**

- O WeGo deve ser verificada diariamente antes da utilização para garantir que todos os arneses

e elementos da armação estão fixos com segurança.

- Inspeccione sempre visualmente o produto antes de o usar. Em caso de dúvida, PARE. Se suspeitar ou verificar que o produto ou alguma peça estão danificados, PARE. Contacte o serviço de apoio ao cliente ou o distribuidor local, o mais rapidamente possível.

#### **6. CUIDADOS DE LIMPEZA:**

- Limpe o produto regularmente para evitar a acumulação de sujidade. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente o tecido dos componentes e estimular a corrosão no produto. Use apenas produtos de limpeza não abrasivos e panos húmidos. Não use água corrente nos estofos quando ainda estiverem presos ao produto. Certifique-se sempre de que o produto está seco antes de usar. Consulte a informação sobre Limpeza e Cuidados no manual do utilizador.

#### **7. LAVADORAS/MANGUEIRAS DE LIMPEZA:**

- Não use mangueiras ou lavadoras de pressão nos componentes da estrutura, já que a mesma não é vedada contra água corrente e pode ficar danificada com a entrada de água.

#### **8. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO:**

- O produto deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de

calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.

## 9. CUIDADOS ELIMINAÇÃO:

- Elimine o WeGo apenas num local de eliminação de resíduos comunitários na categoria de reciclagem correta.

**Este produto é adequado para uma criança que não consegue sentar-se sem ajuda, rolar e não consegue levantar-se apoiada nas mãos e nos joelhos. Peso máximo da criança: 30 kg**

---

## SECÇÃO 04: TERMOS DE GARANTIA

A garantia para o WeGo aplica-se apenas quando o produto é usado de acordo com a utilização prevista, cumprindo todas as especificações do fabricante. Está incluído um ano de garantia com este produto fabricado pela James Leckey Design Ltd.

Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Uma vez que entre em contacto connosco, organizaremos a recolha dos produtos por nossa conta e, uma vez devolvidos procederemos à sua substituição e respetiva devolução num prazo de 14 dias. Em todos os casos, é responsabilidade do cliente garantir que os produtos são devolvidos devidamente, corretamente embalados, de preferência, na embalagem original.

Para maior segurança, recomenda-se que o cordão / pulseira seja usado sempre para evitar que o carrinho de passeio deslize para longe.

- Quando parado, o travão deve ser pressionado firmemente até ser ouvido um clique. Este clique indica que o travão está completamente engatado.
- Não se esqueça de desengatar o travão antes de voltar a movimentar-se. A barra vermelha deve ser retornada para a posição original para desengatar o bloqueio

## SECÇÃO 05: INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Leia sempre as instruções do utilizador completas antes de usar o produto.
2. Verifique sempre a sua WeGo em relação se se encontra adequada antes de colocar lá o seu filho.
3. As crianças não devem ser deixadas nunca sozinhas ou sem supervisão neste produto.
4. O peso máximo do utilizador para o WeGo é de 30 kg (66 lbs). Este peso não deve ser excedido nunca.
5. Não modifique o seu WeGo ou use componentes diferentes dos componentes Firefly aprovados. Isto pode colocar o seu filho em risco e também pode invalidar a sua garantia.
6. O WeGo não foi submetido a testes de colisão, portanto não pode ser utilizada para transportação em veículos motorizados.
7. Este carrinho de passeio foi desenhado para levar uma criança. Não leve itens ou crianças adicionais exceto como se encontra recomendado neste manual. O não cumprimento poderá estragar o carrinho do bebé e/ou torná-lo instável.
8. Sobrecarregá-lo ou dobrá-lo incorretamente poderá causar estragos ao carrinho de passeio.
9. Se está a utilizar um GoTo Seat com o WeGo, assegure-se sempre que está seguro firmemente ao carrinho de passeio prendendo as três alças pretas. Consulte a secção 14 para mais orientações.
10. Tenha cuidado redobrado ao utilizar o carrinho de passeio quando o seu filho está completamente inclinado o que poderá aumentar o risco de queda.
11. Levante sempre as rodas frontais sobre os lancis ou degraus enquanto pressiona a pega.
12. WeGo deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.
13. Este carrinho de passeio não é adequado para correr ou para andar de skate.
14. Nunca deixe que as crianças dobrem, montem ou desmontem o carrinho de passeio.
15. Nunca permita que o carrinho de passeio seja utilizado como brinquedo ou por crianças.
16. Em caso de dúvida sobre a utilização segura do carrinho de bebé ou se alguma parte estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de serviço ao cliente em **customer.enquiries@fireflyfriends.com**



**Aviso:** O não cumprimento destas instruções pode colocar a criança em risco.

**Aviso:** Mantenha a cobertura plástica afastada de crianças para evitar asfixia

## SECÇÃO 06:

# PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

### Precauções

- Deformações espinhais corrigidas, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou esquelética grave, incluindo deslocação da anca
- Condições progressivas e de perda muscular
- Risco elevado ou histórico recente de fraturas ósseas
- Risco elevado de lesão relacionada com pressão ou feridas abertas
- Padrões de movimento fortes e descontrolados
- Atividade convulsiva mal controlada
- Crianças dependentes do uso de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica incluindo função respiratória ou cardiovascular comprometida
- Dependentes de aparelhos de sustentação da vida de terceiros, como tanques de oxigénio
- Dificuldades de aprendizagem significativas e/ou problemas comportamentais

### Contraindicações

- Crianças com idade inferior a 6 anos.

Não existem contraindicações associadas ao uso do WeGo.

Todas as precauções e contraindicações são consideradas a critério do clínico prescritor ou dos pais. A Leckey e a Firefly recomenda que um médico habilitado e experiente esteja presente durante a avaliação ajustes, configurações e reedições para minimizar o risco.

## SECÇÃO 07: LIMPEZA & CUIDADOS

1. O carrinho de passeio pode ser limpo com água fria (300) com detergente neutro.
2. O forro é amovível e lavável na máquina em água fria e detergente neutro. Não lavar a seco.
3. Deixe que o produto seque antes de o dobrar e arrumar.
4. Limpe a armação com um pano húmido e detergente neutro.
5. Não use produtos de limpeza abrasivos no carrinho de passeio.

### **Dica:**

É muito fácil fazer em casa um dos melhores limpa estofos aquosos. Coloque um copo de água morna (não quente) num recipiente misturador e depois adicione 1/4 de copo de sabão de lavar loiça biodegradável. Bata com um batedor elétrico em velocidade média até que o líquido se transforme em espuma grossa. Esta espuma removerá sujidade acumulada e a maior parte das manchas de comida e bebida. Este limpa estofos não é apenas simples de fazer e barato, como também não é tóxico e amigo do ambiente.

## SECÇÃO 08: MANUTENÇÃO DE PRODUTOS

Para todas as questões relacionadas com assistência técnica, consulte o site da Firefly, [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com), ou entre em contacto com a equipa de apoio ao cliente através do endereço **[customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)**

## SECÇÃO 09: ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

1. Evite lesões nos dedos quando desdobra e dobra a armação.
2. Antes de colocar a criança no WeGo, certifique-se que todos os dispositivos de bloqueio estão ativados.
3. Coloque a criança no arnês em segurança assim que é colocada no carrinho de passeio.

### **Posicionar a criança no GoTo Seat**

1. O GoTo Seat deve ser apertado firmemente no seu lugar para o seu uso destinado antes de colocar a criança no assento.
2. Assegurar que o as alças do arnês não perturbam a colocação da criança no GoTo Seat. As alças do ombro e as alças de apoio lateral devem ser muito frouxas.
3. Fechar a fivela ao centro e ajustar as alças de suporte laterais para garantir que a criança está segura no assento com o arnês. O comprimento da alça deve ser ajustado para o tamanho do seu filho, com segurança.
4. O comprimento das alças da virilha pode ser ajustado através do acesso ao encaixe por baixo da cobertura acolchoada do ajuste. No Tamanho 2 do GoTo Seat, a localização da alça de virilha pode ser movida para o exterior para proporcionar mais espaço para o seu filho à medida que cresce.

### **Remoção da criança do GoTo Seat**

1. Solte as alças e alças laterais suporte.
2. Desbloqueie a fivela central utilizando botão de libertação no arnês.
3. Deslize as alças dos ombros da criança e remova cuidadosamente os braços da criança
4. Uma vez que as pernas estejam em segurança, passe suavemente os braços da criança através de alças – as alças devem estar com folga. Certifique-se que as almofadas das alças estão sobre os ombros da criança.

## SECÇÃO 10: INSPEÇÃO DO PRODUTO

Recomendamos que sejam efetuadas diversas verificações ao equipamento antes da sua utilização para garantir que o produto é seguro.

1. Verificar todos os sinais de desgaste e danos dos estofos.
2. Verificar que todas as ferramentas funcionam corretamente.
3. Verificar que todos os elementos dobrados estão seguros e funcionam corretamente antes de cada utilização.
4. Assegure-se que todos os dispositivos de bloqueio estão acionados antes da sua utilização.
5. Verificar que os travões funcionam corretamente.
6. Não utilize o carrinho de passeio se alguma parte estiver danificada ou em falta.

**Nota: Limpe sempre o produto primeiro, para remover a sujidade acumulada, antes de o desinfetar / higienizar.**

- Sempre que possível, recomendamos o uso de um sistema de desinfecção automatizado por “nebulização”, que é usado para cobrir completamente as superfícies do produto com um agente desinfetante. As instruções do fabricante para o sistema escolhido devem ser consultadas, antes da utilização e seguidas rigorosamente.
- Se o sistema de desinfecção automatizado não estiver disponível, todas as superfícies do produto devem ser limpas com lenços desinfetantes para superfícies ou com desinfetante líquido, num pano macio. Os produtos adequados são 70% IPA, 70% álcool ou lixívia diluída. As instruções do fabricante para o produto escolhido devem ser seguidas. O estofamento e os tecidos do produto devem ser limpos, minuciosamente, de acordo com a secção Informações sobre Limpeza e Cuidados, deste manual.


## SECÇÃO 11: REUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FIREFLY

Antes de reemitir um produto, é recomendado que este seja desinfetado, seguindo um dos seguintes procedimentos:

Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Firefly ou se alguma estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de serviço ao cliente o mais rápido possível para: **[customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)**


## SECÇÃO 12: CONFIGURAR O SEU WEGO

1. Abra a armação do WeGo levantando o guiador e colocando o seu pé no tubo do eixo traseiro como indicado. **A**
2. Levante a pega **B** até ouvir um clique, isto indicará que a armação está aberta. **C**
3. Assegurar que os fechos de segurança estão acionados.
4. Para recolher as alavancas de travamento de ambos os lados para cima. **D**

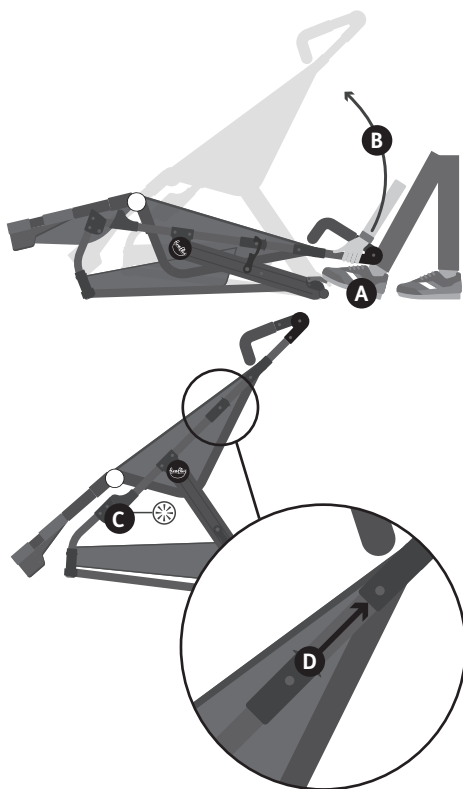

### 12.1 – MONTAGEM DE RODAS TRASEIRAS

1. Levante o tubo do eixo traseiro e insira o eixo da roda traseira até ouvir um clique o que indicará que a roda está presa na sua posição. Repita para a segunda roda.
2. Assegure-se que as rodas estão propriamente configuradas antes de utilizar o WeGo. Para inspecionar, puxe a roda para verificar que a mesma está presa na sua posição.

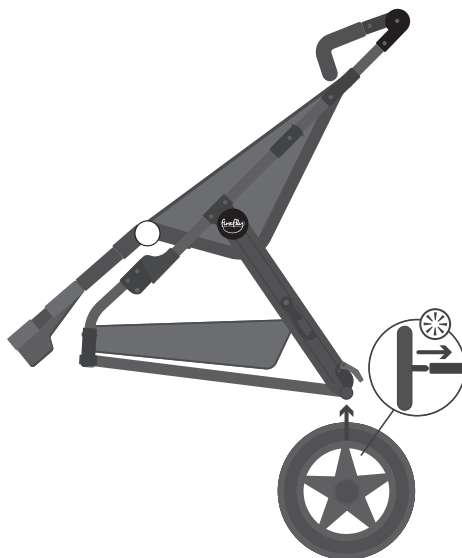


## 12.2 – MONTAGEM DE RODAS DIANTEIRAS

1. Levante o tubo do eixo dianteiro do carrinho de passeio e insira o eixo da roda dianteira até ouvir um clique o que indicará que a roda está presa na sua posição. Repita para a segunda roda. **A**
2. Assegure-se que as rodas estão propriamente configuradas antes de utilizar a WeGo. Para inspecionar, puxe a roda para verificar que a mesma está presa na sua posição.




3. Para trancar as rodas em posição, alinhe-as para a frente e deslize para baixo o cadeado da roda frontal. **A**
4. Para destrancar as rodas frontais, deslize para cima o cadeado da roda frontal.

O clique sonoro indica que o travão está completamente engatado.

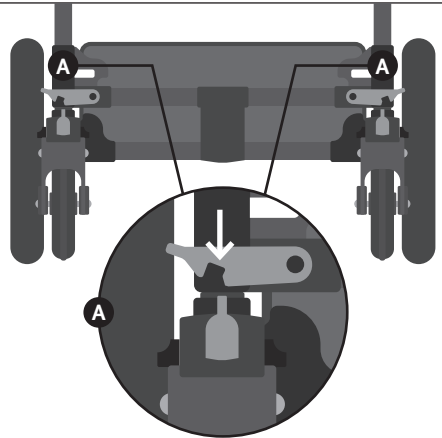

## 12.3 – USAR O TRAVÃO

1. Para ativar o travão, pressione a barra de travão vermelha até que as rodas estejam presas.
2. Para largar o travão, puxe a barra de travão vermelha para a sua posição original.

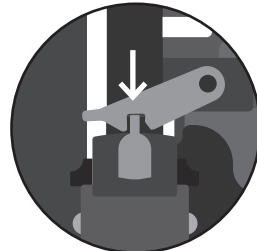


## 12.4 – AJUSTAR O GUIADOR

1. Para ajustar o guiador, Pressione os botões pretos no interior do guiador para ajustá-lo para a posição desejada. **A**




## SECÇÃO 12.5 – ANEXAR O CAPÔ

1. Anexar a forquilha de plástico ao carrinho de passeio deslizando para a anexação demonstrada. **A**

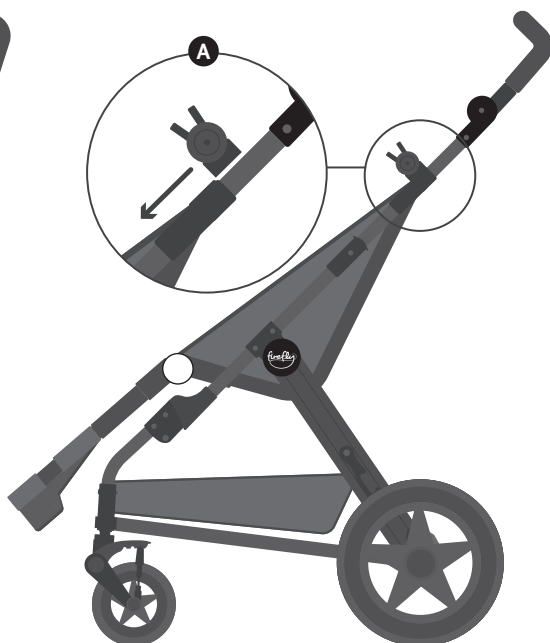

2. Passe os hastes de plástico pelo material do capô como demonstrado na imagem.

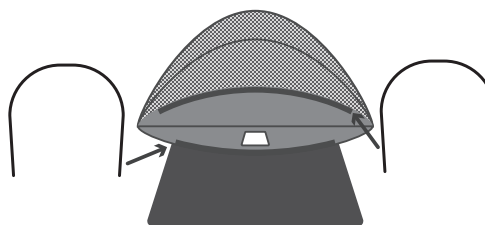

Continuação →

3. Insira as hastes nas forquilhas de plástico de ambos os lados do carrinho do bebé e pressione as mesmas. **B**
4. Enlace os elásticos negros por volta dos ganchos por trás da armação do carrinho de passeio.
5. Conecte o velcro no capô para assegurar que o capô está seguro. **C**



## SECÇÃO 12.6 – ANEXAR A CAPA DA CHUVA

1. Começando com o apoio para os pés, puxe a capa da chupa por cima do carrinho de passeio e puxe para cima do capô e debaixo da parte traseira do WeGo.
2. Puxe as asas para o lado e prenda dentro da armação. **A**
3. Enlace os elásticos negros por volta dos ganchos por trás da armação do carrinho de passeio. **B**

Dica – Para colocar o encosto numa posição completamente vertical, puxe-o para a frente e aperte o máximo possível antes de anexar o capô.




## SECÇÃO 12.7 – ANEXAR O SACO DE DORMIR

1. Puxe o saco de dormir para o apoio para os pés e passe os botões através dos laços de ambos os lados do carrinho de passeio. **A**



As crianças não devem ser deixadas nunca sozinhas/sem supervisão neste produto.

Por favor assegure-se que todas as partes de ajustamento do carrinho de dormir são mantidas afastadas da criança.

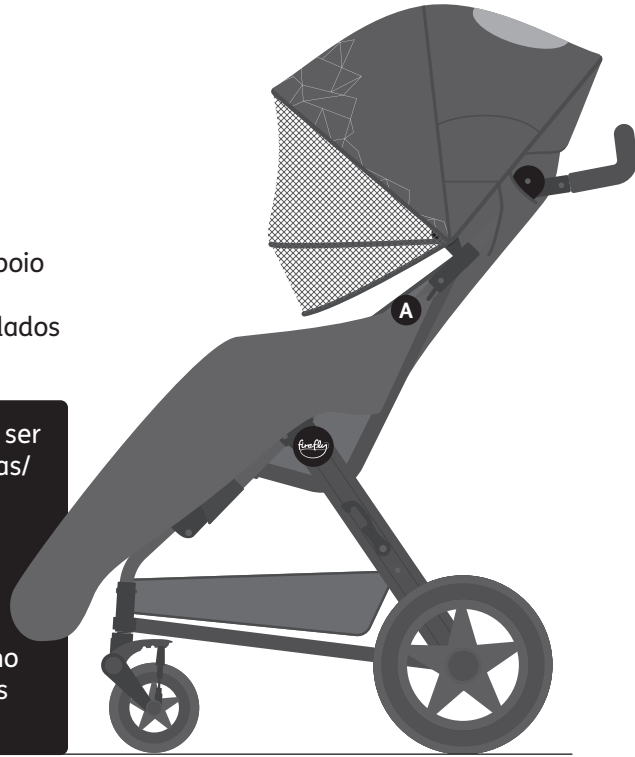

## SECÇÃO 12.8 – ANEXAR O MOSQUITEIRO


1. Coloque o mosquiteiro no carrinho de passeio e anexe-o utilizando os fechos – passe os fechos através dos dois laços em ambos os lados do carrinho de passeio.



Aviso: Por favor, coloque apenas bebidas frias no suporte de copos

## SECÇÃO 12.9 – ANEXAR O SUPORTE DE COPOS

1. Deslize o suporte de copos na ranhura no lado direito da armação do carrinho de passeio.

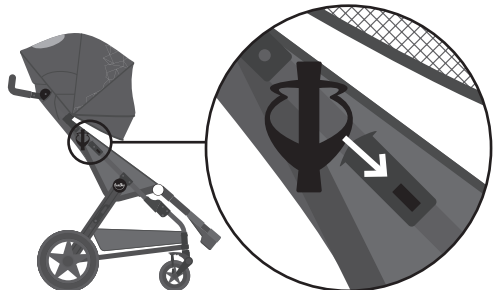

## SECÇÃO 13: AJUSTAR O WEGO



### 13.1 – AJUSTAR O ENCOSTO

1. Para ajustar o encosto para trás, puxe a alavanca de plástico cinzenta na sua direção para o seu ângulo desejado. **A**
2. Para ajustar o encosto verticalmente, puxe os anéis com uma forma de D na sua direção para o ângulo desejado. **B**
3. Para colocar o assento numa posição completamente vertical, puxe o encosto para além da armação e prenda puxando os anéis de plástico com forma de D.

Inclinação do assento **100°**

Inclinação completa **140°**



Inclinação fixa **15°**

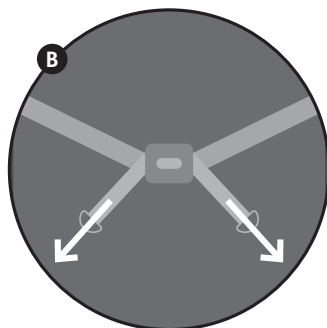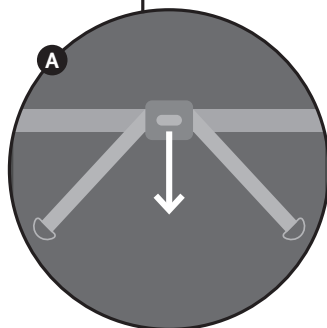


Aviso – nunca tente ajustar o WeGo quando uma criança estiver no assento.

## 13.2 – AJUSTAR O APOIO PARA OS PÉS

1. Para fixar o apoio para os pés na configuração mais curta, puxe o mais possível para cima e pressione o botão de cima em cada lado do tecido. Por favor assegure-se que estão ambos acionados.
2. Para fixar o apoio para os pés na configuração mais longa, desprenda os botões e puxe até o cadeado ter feito um clique e engate os botões inferiores em cada lado.

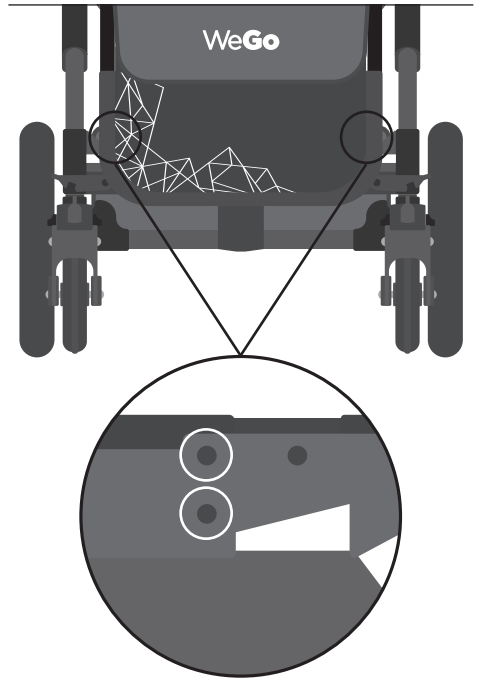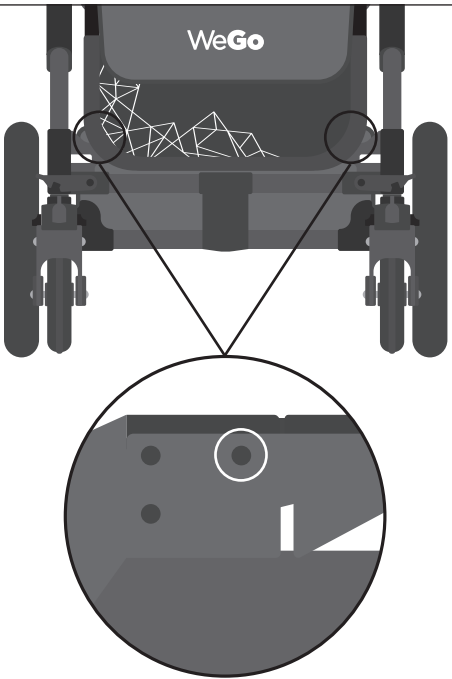


3. A platina pode ser inclinada para o ângulo desejado pressionando o botão branco na dobradiça lateral da platina.

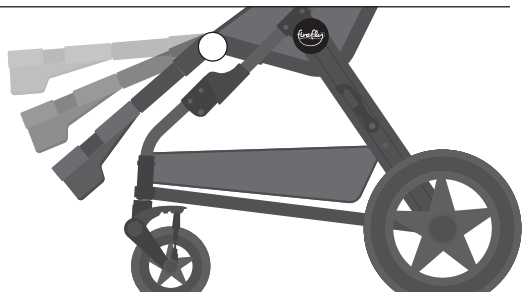


## SECÇÃO 14: UTILIZAR O GOTO SEAT COM WEGO


1. Assegure-se que todas as alças no GoTo Seat estão soltas e não seguras umas com as outras. Coloque o GoTo Seat no carrinho de passeio.

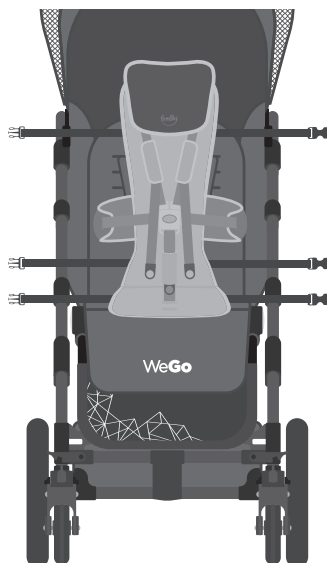

2. Passe as alças através das ranhuras demonstradas e prenda-as em ambos os lados.

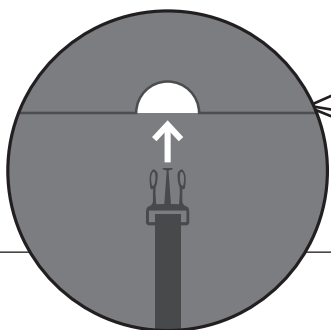

3. Puxe as alças para fora de modo a prendê-las. **A**
4. Arrume as alças em excesso em nós e prenda-os em presilhas. **B**
5. Assegure-se que todas as alças pretas estão apertadas de forma segura em volta do carrinho de passeio e a fivela de cinco pontos na frente está desapertada antes de colocar a criança no GoTo Seat.

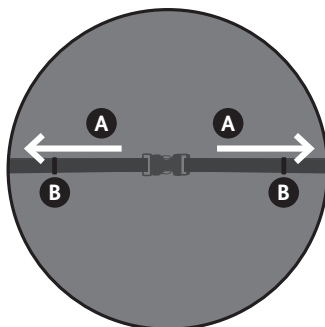


Continuação →

## SECÇÃO 14.1: ABRIR E FECHAR A FIVELA DE CINCO PONTOS

Antes de começar, certifique-se que as tiras de ombro, apoio lateral e virilha estão soltas e desapertadas.

Conecte os dois fechos laterais de apoio nos lados do ponto médio da fivela. **A**

Uma vez preso, ajuste as alças, as correias de suporte lateral e virilha puxando as alças para apertar. **B**

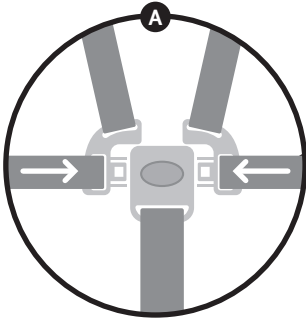

Certifique-se as correias não estão torcidas quando a fivela está fechada.

No Tamanho 2 GoTo Seat o local de montagem da cinta da virilha pode ser movido para trás ou para a frente de acordo com as necessidades do seu filho. Certifique-se de que esteja firmemente montado na base de plástico GoTo Seat. **C**




## SECÇÃO 14.2: AJUSTAR O ENCOSTO DA CABEÇA E SUPORTE LATERAL

Desaperte o botão no encosto de cabeça no sentido contrário aos ponteiros do relógio e remova o encosto de cabeça da base do GoTo Seat. Transfira o encosto da cabeça para cima ou para baixo para obter a posição desejada. **A**

Quando tiver o encosto da cabeça na altura desejada, aperte de volta o botão na base do GoTo Seat no sentido dos ponteiros do relógio. **B**

Seque o suporte lateral virando o botão no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Mexa o suporte lateral para cima ou para baixo para obter a sua posição desejada. Uma vez que tenha a sua altura desejada, prenda o suporte lateral novamente girando o botão no sentido dos ponteiros do relógio. **C**



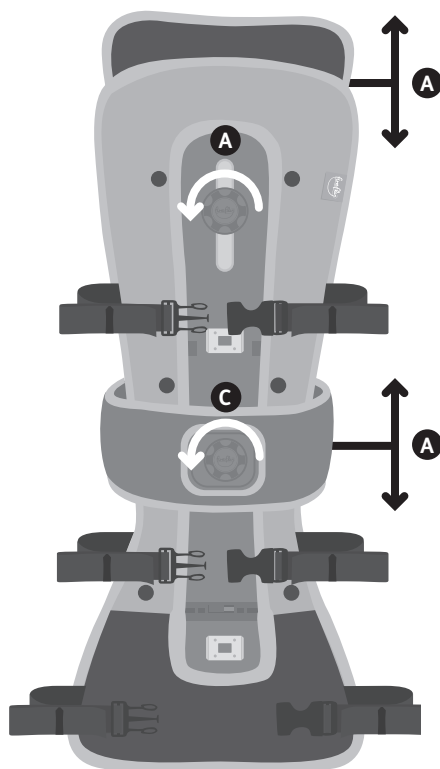


## SECÇÃO 15: AJUSTAR O ARNÊS WEGO

Para ajustar as alças dos ombros do WeGo, deslize a ponta da fivela para trás do encosto das costas através da ranhura traseira. **A**

Passa a fivela através da ranhura da altura desejada. **B**


Pode apertar ou desapertar as alças ajustando as fivelas nas alças.

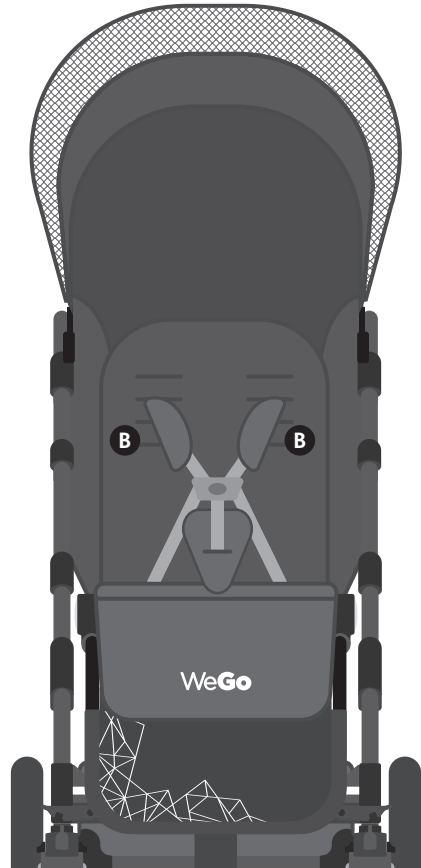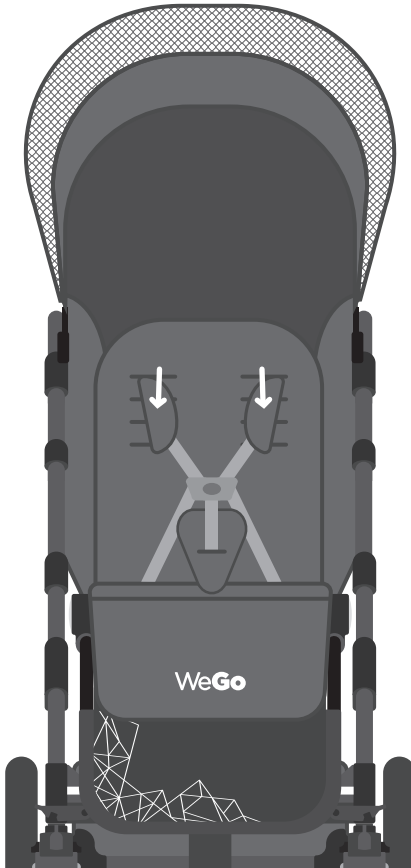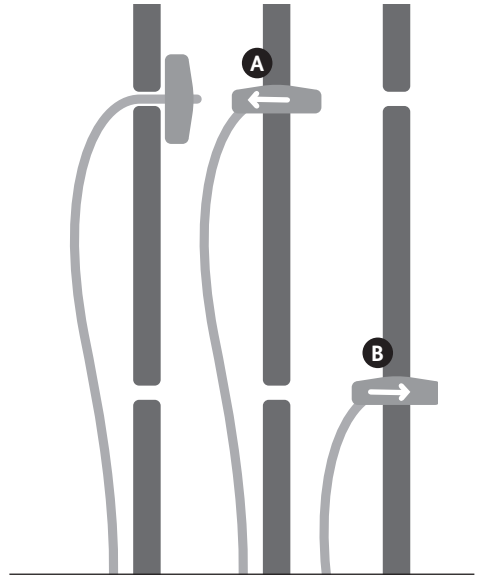

# SECÇÃO 16: DIMENSÕES WEGO

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Comprimento da montagem (dobrado)        | 116cm |
| Altura da montagem (dobrado)             | 38cm  |
| Altura do WeGo                           | 122cm |
| Profundidade do Assento                  | 26cm  |
| Altura do Assento                        | 50cm  |
| Largura do assento                       | 35cm  |
| Apoio para os pés mais curto comprimento | 25cm  |
| Comprimento máximo do apoio para os pé   | 33cm  |
| Peso do WeGo                             | 11kg  |
| Peso do WeGo com GoTo Seat               | 13kg  |

Informamos que nem todas as crianças que usam o GoTo Seat tamanho 2 poderão usar a WeGo. Por favor consulte o nosso guia de tamanhos.

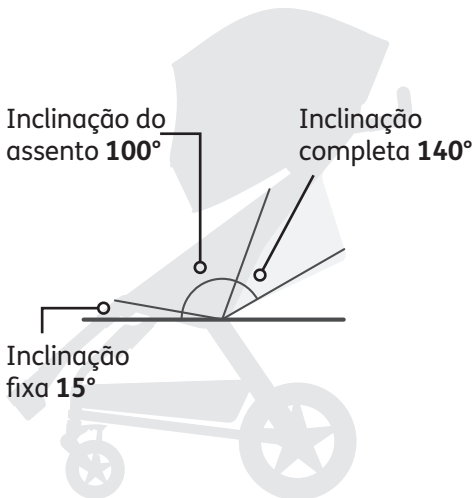

## Tabela dos Símbolos

| Símbolo                                                                             | Significado                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Aparelho Médico                    |
|    | Ler as Instruções Antes de Usar    |
|    | Marca CE                           |
|    | Aviso                              |
|    | Fabricante                         |
|    | Código do Produto                  |
|    | Número de Série                    |
|   | Peso Máximo de Ocupação            |
|  | Data de Fabricação                 |
|  | Livre de Latex                     |
|  | Identificação Única de Dispositivo |



Fireflyfriends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879  
[hello@fireflyfriends.com](mailto:hello@fireflyfriends.com)



LS1087-01