



Scoot

Manual do usuário



Family Freedom



Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar o Scooot. Todas as instruções podem ser encontradas no nosso site www.fireflyfriends.com juntamente com vídeos, diagramas e FAQs.

Conteúdos

1. Utilização prevista	p.03
2. Certificação	p.05
3. Avisos e precauções	p.05
4. Termos de garantia	p.07
5. Informação de segurança	p.07
6. Precautions and contraindications	p.09
7. Informação sobre limpeza e cuidados	p.10
8. Inspeção diária e manutenção do produto	p.11
9. Reutilização de produtos Firefly	p.12
10. Assistência a produtos	p.12
11. Instruções para utilização	
11.1 Como saber se o Scooot é adequado para o seu filho	p.13
11.2 Como desembalar e montar o seu Scooot	p.14
11.3 Transferir o seu filho para o Scooot	p.20
11.4 Como usar o Scooot	p.24
12. Informação técnica	p.25
13. Perguntas frequentes	p.27

SECÇÃO 01:

Utilização Prevista

O Scooot é um andador de mobilidade 4-em-1 configurável previsto para ajudar crianças com necessidades especiais a brincar, explorar e a participar de forma adaptada nas suas capacidades físicas e cognitivas.

Indicações para uso

O Scooot é indicado como um produto de baixa avaliação, disponível diretamente para os pais. Os utilizadores podem incluir, mas não estão limitados a, crianças não deambuladoras com um distúrbio neuromuscular, congénito ou cromossómico, lesão da medula espinhal ou atraso global de desenvolvimento. Estas condições afetam geralmente as capacidades motoras grossas e a postura da pessoa. O Scooot foi desenhado para oferecer uma variedade de configurações, cada uma com a sua própria finalidade:

Crawl (gatinhar): Destina-se a apoiar o tronco da criança numa posição inclinada, permitindo que as mãos e os pés fiquem livres para se mobilizarem. Nesta posição, a criança trabalha para desenvolver o controlo da cabeça e do tronco, estabilidade dos ombros e os movimentos dos membros superiores.

Scoot: Destina-se a apoiar a pélvis e o tronco da criança numa postura sentada vertical. Nesta posição, a

criança trabalha para desenvolver a força e a coordenação dos membros inferiores, enquanto desenvolve continuamente o controlo da cabeça.

Ride (passear): Destina-se a apoiar a pélvis, tronco e os membros inferiores da criança numa postura sentada vertical. Nesta posição, a criança trabalha para desenvolver a força e a coordenação dos membros superiores, assim como o controlo da cabeça.

Pooosh: Destina-se a apoiar a pélvis, tronco e os membros inferiores da criança numa postura sentada vertical. Nesta posição, a criança trabalha para desenvolver a força e a coordenação dos membros superiores, assim como o controlo da cabeça com a ajuda de um cuidador.

O Scooot é geralmente apropriado para crianças classificadas com paralisia cerebral GMFCS III-V, embora, devido à sua configurabilidade, o uso terapêutico também possa ser garantido para crianças GMFCS I-II. O uso do Scooot para resultados terapêuticos coincidiria provavelmente com a intervenção contínua de uma variedade de equipas multidisciplinares para desenvolver a função física, cognitiva, social e sensorial da criança.

O uso do dispositivo é variável com base nas necessidades dos utilizadores finais. A configuração de crawl seria

utilizada durante curtos períodos de tempo com base na tolerância da criança e, embora não seja a intenção do desenho, as configurações de Scoot and Ride poderiam ser utilizadas como o principal dispositivo de mobilidade da criança e, portanto, até várias horas por dia com base na tolerância.

Recomendamos que o adulto responsável efetue inspeções diárias do produto (de acordo com a Secção 7 deste manual) para garantir a utilização segura do produto.

A James Leckey Design Ltd não se responsabiliza se o produto não for utilizado de acordo com as instruções de segurança e os fins previstos. Em caso de dúvida contacte o Serviço ao Cliente da Firely para o número UK 0800 318265 ou ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com.


Peças do Scoot



Encosto



Cabo Poosh

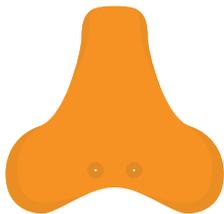

Base Scoot



Revestimento almofadado



Montagem da roda

SECÇÃO 02: Certificação

O Scoot está classificado como um dispositivo médico de Classe I, segundo os regulamentos da UE e do Reino Unido. Como fabricante, James Leckey Design Limited, declara que este produto está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745), Regulamentos de Dispositivos Médicos do Reino Unido de 2002, Diretiva de Dispositivos Médicos (93/42 EEC) e EN 12182: 2012 Produtos de apoio para pessoas com deficiência, requisitos gerais e métodos de teste.

Aviso ao utilizador e/ou doente:
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro, no qual o utilizador e/ou doente está estabelecido.

NOTA:
Conselhos gerais para o utilizador.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar em ferimentos físicos, danos no produto ou no meio ambiente!

SECÇÃO 03: Avisos e precauções

1. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS/MÃOS

- Quando uma criança está na configuração Poosh, certifique-se de que as mãos da criança estão afastadas do conjunto de rodas.
- Cuidado com o perigo de entalamento colocado pelos raios das rodas e entre a base do assento, apoio para os pés, rodízios e o chão.
- Enquanto o utilizador está no produto, o cuidador deve esforçar-se para manter os ajustes do produto no mínimo.

2. RISCO DE ENTALAMENTO DOS PÉS

- Cuidado com o perigo de

entalamento colocado entre a base do assento, apoio para os pés, rodízios e o chão.

- Enquanto o utilizador está no produto, o cuidador deve esforçar-se para manter os ajustes do produto no mínimo.

3. AVISO RISCO DE QUEDA

- Nunca use o produto sobre uma superfície com mais de 5 graus de inclinação ou sobre terreno desnivelado.

4. AVISO DE SEGURANÇA DO OCUPANTE

- As transferências do utilizador para dentro e para fora do produto devem ser realizadas

com equipamentos e pessoal adequados.

- Certifique-se de que o cinto está bem colocado.
- Se o utilizador apresentar qualquer forma de desconforto, retire-o em segurança do produto o mais rapidamente possível.
- Os utilizadores não devem ficar sozinhos em nenhum momento quando estiverem a utilizar o equipamento da Leckey.
- Assegure folga suficiente para as tiras do pescoço do utilizador, durante o uso do produto e as transferências, para evitar riscos de estrangulamento.

5. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS

- Enquanto o utilizador está no produto, o cuidador deve esforçar-se para manter os ajustes do produto no mínimo.
- Cuidado ao montar ou ajustar a posição dos componentes da para que os seus dedos não fiquem presos ao posicionar os componentes do assento e apertar as fixações.
- Durante a montagem e o ajuste do produto, o cuidador deve evitar o risco de entalamento com os dedos das articulações ou pivôs do produto.
- Durante as transferências e os ajustes, o cuidador deve evitar o risco de entalamento dos dedos.

6. VERIFICAÇÕES DIÁRIAS

- O produto deve ser verificado diariamente antes de ser usado para garantir que todos os componentes estão bem fixos e seguros para a utilização.

7. CUIDADOS DE LIMPEZA

- Limpe o produto regularmente para evitar a acumulação de sujidade. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente o tecido dos componentes e estimular a corrosão no produto. Use apenas produtos de limpeza não abrasivos e panos húmidos. Não use água corrente nos estofos quando ainda estiverem presos ao produto. Consulte a informação sobre Limpeza e Cuidados no manual do utilizador.

8. LAVADORAS/MANGUEIRAS DE LIMPEZA

- Não devem ser usadas para limpar o produto, mangueiras e lavadoras de pressão. Consulte a informação sobre Limpeza e Cuidados no manual do utilizador.

9. CUIDADOS ELIMINAÇÃO

- Sempre que eliminar o produto para um centro de reciclagem comunitário, os componentes devem ser eliminados separadamente, se apropriado.

10. CUIDADOS DE COLOCAÇÃO EM UTILIZAÇÃO

- Antes de usar, aguarde 2 horas para que o produto se adapte à temperatura ambiente.

SECÇÃO 04: Termos de garantia

UK / ROI: Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Em todos os casos, é da responsabilidade do cliente garantir que os produtos são devolvidos devidamente, corretamente embalados, de preferência, na embalagem original.

Cientes internacionais: Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Contacte connosco para obter um ID de referência de acordo com os procedimentos internacionais de devolução.

O cliente é responsável pelos custos da devolução dos produtos. Depois de devolvidos procederemos à sua reparação/substituição e respetiva devolução num prazo de 14 dias.

SECÇÃO 05: Informação de segurança

1. O não cumprimento das instruções pode colocá-lo, a si ou ao seu filho, em risco. Antes de usar, leia sempre as instruções do utilizador completas.
2. O Scoot deve ser sempre usado sob supervisão de um adulto.
3. Verifique se todos os componentes estão bem fixados antes de usar.
4. Não modifique o seu Scoot ou use componentes diferentes dos componentes Firefly aprovados. O Scoot não deve ser usado se tiver peças ou componentes avariadas.
5. Não tente usar acessórios alternativos se perder alguma peça do Scoot - sobre as peças de reposição disponíveis entre em contacto com o Serviço ao Cliente da Firely para UK 0800 318265, ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com
6. Mantenha os parafusos soltos, ferramentas e fixações fornecidos com o seu Scoot guardados e longe de crianças pequenas, pois os mesmos podem representar um risco de asfixia.

7. Não esqueça nunca que o Scooot não tem travões e que, por isso, só deve ser usado em superfícies planas e niveladas. O Scooot não deve ser usado em degraus ou escadas nem na sua proximidade.
8. Realize todos os ajustes posicionais e assegure-se de que a fivela do cinto está completamente presa e que o cinto está ajustado ao tamanho do seu filho enquanto ele estiver sentado. No formato Ride (passear), o apoio para os pés deve ser ajustado para que os pés do seu filho não fiquem estendidos para além do apoio para os pés.
9. O cabo Poosh deve ser usado apenas quando o Scooot estiver ajustado para a configuração Ride (passear), com o conjunto de roda maior. Não é seguro usar o cabo na configuração Scoot, que é destinada para crianças com capacidade de propulsão com as próprias pernas. Certifique-se de que o Scooot permanece firme ou apoiado contra uma parede antes de transferir o seu filho.
10. Se o seu filho estiver a usar o Scooot no exterior e autopropulsionado na configuração Ride (passear), é importante verificar sempre se as rodas estão limpas.
11. Quando não estiver a ser usado, o Scooot deve ser guardado cuidadosamente em local seco e longe de temperaturas extremas.
12. Verifique se o entorno é seguro antes de deixar o seu filho usar o Scooot. Os artigos domésticos ou os móveis podem representar perigo se tiverem cantos afiados ou criarem obstáculos.
13. Não force o movimento pois pode ferir o seu filho.
14. Por motivos de segurança, recomendamos que o seu filho use sapatilhas (ténis) ao utilizar o produto. Não é recomendado usar o produto com os pés descalços, sandálias ou chinelos.
15. Ao montar a configuração Ride (passear), certifique-se de que as fixações da proteção da roda estão firmes e que o apoio para os pés foi ajustado e protegido de acordo com a Secção 11.2.
16. Em caso de dúvida sobre o uso seguro do Scooot ou se alguma das peças não funcionar, deixe de usar o produto imediatamente e contacte o Serviço ao Cliente da Firely UK 0800 318265, ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com
17. O estofado do Scooot cumpre com a regulamentação de segurança contra incêndio de acordo com a EN1021-1. O produto deve ser mantido afastado de qualquer chama.
18. Limpe o produto regularmente de acordo com a Secção 6 deste manual. Não use produtos de limpeza abrasivos. Realize verificações de manutenção regularmente para garantir que o seu produto está em boas condições de funcionamento.



Quando uma criança estiver na configuração Poosh, certifique-se de que as mãos da criança estão longe da montagem da roda

SECÇÃO 06: Precauções e Contraindicações

Precauções

- Deformações espinhais corrigidas, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou esquelética grave, incluindo deslocação da anca
- Condições progressivas e de perda muscular
- Risco elevado ou histórico recente de fraturas ósseas
- Risco elevado de lesão relacionada com pressão ou feridas abertas
- Padrões de movimento fortes e descontrolados
- Atividade convulsiva mal controlada
- Crianças dependentes do uso de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica incluindo função respiratória ou cardiovascular comprometida
- Dependentes de aparelhos de sustentação da vida de terceiros, como tanques de oxigénio
- Dificuldades de aprendizagem significativas e/ou problemas comportamentais

Contraindicações

Não existem contraindicações associadas ao uso do Scoot.

Todas as precauções e contraindicações são consideradas a critério do clínico prescritor ou dos pais. A Leckey e a Firefly recomenda que um médico habilitado e experiente esteja presente durante a avaliação ajustes, configurações e reedições para minimizar o risco.

SECÇÃO 07: Informação sobre limpeza e Cuidados

As superfícies em plástico do Scooot podem ser limpas com água morna e sabão e um pano macio ou esponja. Qualquer agente de limpeza abrasivo pode riscar ou marcar o Scooot.

Não limpe nenhuma das peças do Scooot com um agente de limpeza com lixívia.

Cinto e almofada da anca

- O cinto pode ser retirado do encosto para lavagem usando a ferramenta incluída no pacote de instruções. Mantenha os parafusos de fixação num local seguro e afastado das crianças.
 - Os estofos podem ser colocados na máquina de lavar e lavados a 40 °C ou menos. Quando lavar a almofada do Scooot ou o cinto pela primeira vez, lave-os separadamente de outras peças para reduzir o risco de perda da cor.
 - Não seque na máquina ou passar a ferro a almofada ou o cinto.
 - Retire as manchas o mais rapidamente possível, com um pano absorvente, toalha ou esponja. É suficiente passar uma esponja molhada em água quente e sabão em sujidade comum e pequenos derrames, mas com cuidado para não saturar o tecido e espalhar a mancha.
- Podem ser usados agentes de limpeza antissépticos em manchas mais resistentes. Certifique-se de que os produtos de limpeza são totalmente removidos.
 - Não use solventes para limpar ou remover manchas do cinto ou da almofada.
 - Não use lixívia no produto.
 - Não seque na máquina a almofada ou o cinto da anca.

SECÇÃO 08: Inspeção diária do produto

Recomendamos que sejam efetuadas diversas verificações ao Scoot antes da sua utilização para garantir que o produto é seguro. As verificações recomendadas são detalhadas abaixo.

Crawl (gatinhar)

1. Verifique se a almofada está bem fixa como mostrado na Secção 11.2.
2. Verifique se o elástico não está solto ou em contacto com outros acessórios.
3. Confirme se o elástico não está torcido.
4. Verifique se o rodízio frontal está instalado e seguro.

Scoot

5. Assegure-se de que o encosto está bem preso e não se move.
6. Se estiver a usar revestimento, faça também as verificações 1-3.
7. Assegure-se de que o cinto está bem fixo ao encosto e que a fivela funciona corretamente.
8. Verifique se o rodízio frontal está instalado e seguro.

Ride (passear)

9. Certifique-se de que as fixações para a montagem da roda estão seguras.
10. Confirme se o encosto está fixo de acordo com as verificações 5-8.
11. Se usar o revestimento, realize as verificações 1-3.

12. Verifique se o conjunto da roda está bem fixo (consulte a Secção 11.2, Passos 4-7).
13. Certifique-se de que o apoio para os pés está ajustado para se adequar ao seu filho.
14. Assegure-se de que o apoio para os pés está seguro.
15. Verifique se o rodízio frontal foi removido da base.

Poosh

16. Assegure-se de que o encosto está fixo de acordo com as verificações 5-8.
17. Assegure-se de que a pega de empurrar está segura conforme o passo 8 na pág. 15.
18. Assegure-se de que os puxadores soft-touch na pega de empurrar estão bem fixos e aparafusados.

Almofada do encosto avançado

19. Assegure-se de que o revestimento da almofada do encosto avançado está ligado de acordo com a pág.15
20. Certifique-se de que os poppers nas laterais estão ligados corretamente de acordo com a pág.15

Em caso de dúvida sobre o uso contínuo e seguro do seu produto Firefly ou se alguma peça falhar, deixe de usar o produto imediatamente e entre em contacto com o Serviço ao Cliente o mais rapidamente possível.

SECÇÃO 09: Reutilização dos produtos Firefly

Antes de reemitir um produto, é recomendado que este seja desinfetado, seguindo um dos seguintes procedimentos:

Nota: Limpe sempre o produto primeiro, para remover a sujidade acumulada, antes de o desinfetar / higienizar.

1. Sempre que possível, recomendamos o uso de um sistema de desinfecção automatizado por “nebulização”, que é usado para cobrir completamente as superfícies do produto com um agente desinfetante. As instruções do fabricante para o sistema escolhido devem ser consultadas, antes da utilização e seguidas rigorosamente.

2. Se o sistema de desinfecção automatizado não estiver disponível, todas as superfícies do produto devem ser limpas com lenços desinfetantes para superfícies ou com desinfetante líquido, num pano macio. Os produtos adequados são 70% IPA, 70% álcool ou lixívia diluída. As instruções do fabricante para o produto escolhido devem ser seguidas. O estofamento e os tecidos do produto devem ser limpos, minuciosamente, de acordo com a secção Informações sobre Limpeza e Cuidados, deste manual.

SECÇÃO 10: Manutenção de produtos

Os produtos defeituosos podem ser reparados ou substituídos pela Firefly, se ainda estiverem abrangidos pela garantia. Pode ser necessário devolver o produto para a Firefly para uma inspeção mais detalhada que pode incorrer numa pequena taxa para transporte. Para assuntos relacionados com assistência técnica, contacte o Serviço ao Cliente para UK 0800 318265, ROI 1800 626020 ou customer.enquiries@fireflyfriends.com

SECÇÃO 11:

Instruções para utilização

SECÇÃO 11.1: Como saber se o Scoot é adequado para o seu filho

Avaliação e prescrição

O Scoot é um produto de mobilidade precoce, desenhado para proporcionar às crianças uma experiência divertida e a oportunidade de se movimentarem de forma independente. O Scoot foi desenhado para crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos (dependendo do seu tamanho) e para os níveis I - IV do Gross Motor Function Classification System (GMFCS), dependendo do seu nível de desenvolvimento.

O seu filho vai aproveitar ao máximo o Scoot (em todas as configurações) se conseguir segurar a cabeça e tiver um nível razoável de controlo do tronco, o que significa que pode sentar-se com um pouco de apoio pélvico.

Se o controlo da cabeça do seu filho ainda estiver em desenvolvimento, recomendamos espere até melhorar antes de usar o Scoot.

Para mais informações, veja os vídeos online em www.firetyfriends.com.



SECÇÃO 11.2: Desembalar e montar o Scoot

Cuidado para não cortar a caixa, pois pode danificar algumas das peças internas. As peças estão embaladas em sacos de polietileno. Retire-as com cuidado da caixa e verifique se tem todas as peças necessárias.


Como montar o seu Scoot:
Selecione a configuração que pretende montar:



 **Mantenha os sacos de polietileno afastados das crianças.**

O seu Scoot vem com um pacote de instruções com todas as peças e ferramentas necessárias para a montagem.


Peças incluídas com o seu Scoot

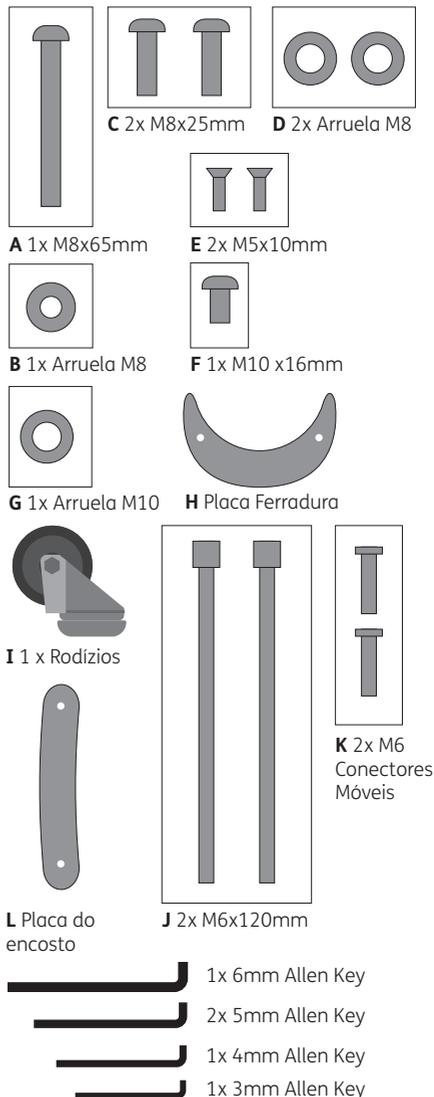

Passo 1

Se pretender usar o Scoot nas configurações Scoot ou Crawl (gatinhar), precisa de fixar o rodízio frontal. Pegue no rodízio I, no encaixe F e na arruela G e fixe à base do Scoot com a ferramenta incluída no pacote do utilizador.


O rodízio frontal não deve ser encaixado se estiver a usar o Scoot na configuração Ride (passar) ou Poosh.

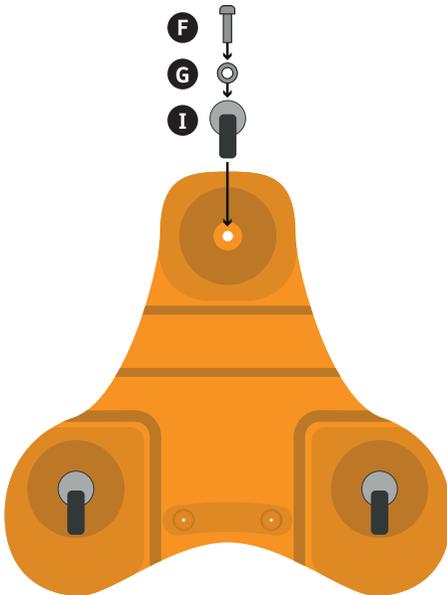

Passo 2

Coloque o revestimento acolchoado na base. Segure a almofada com as tiras elásticas com o lado macio voltado para cima. Alinhe a ranhura no estofo com os dois orifícios na parte superior da base.

O seu Scoot está agora pronto para ser usado na configuração Crawl (gatinhar).

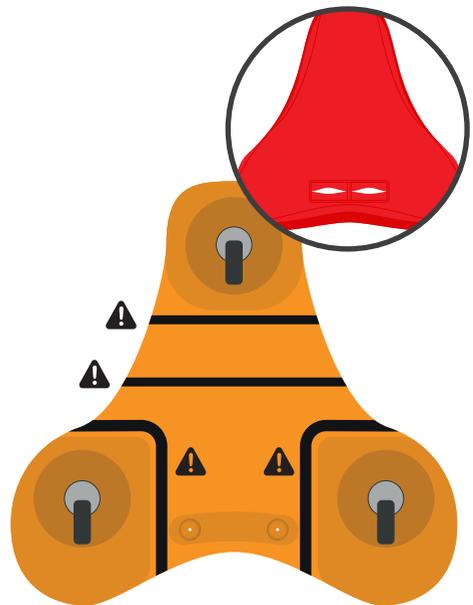



Monte o elástico como mostrado, confirmando que não prendem nos rodízios.

Passo 3

Para fixar o encosto, introduza os pinos do encosto nas ranhuras do estofo para que ambos assentem com segurança nos orifícios da base do Scoot.

Fixe os conectores do encosto, do suporte e os móveis à parte inferior com a placa e os parafusos disponíveis. Use as ferramentas fornecidas para apertar os parafusos e fixar o encosto. Certifique-se de que o encosto não oscila.


É agora possível usar o produto na configuração Scoot.

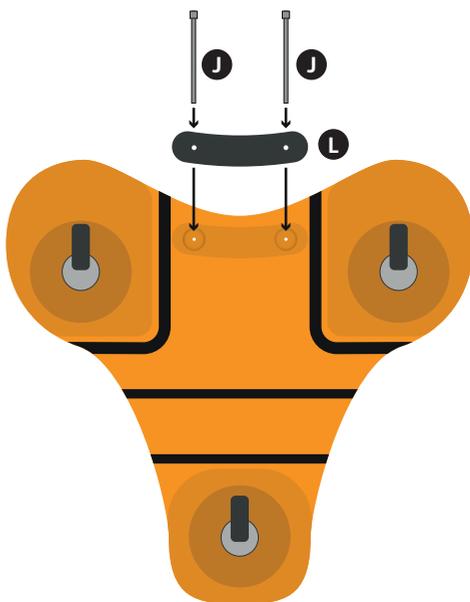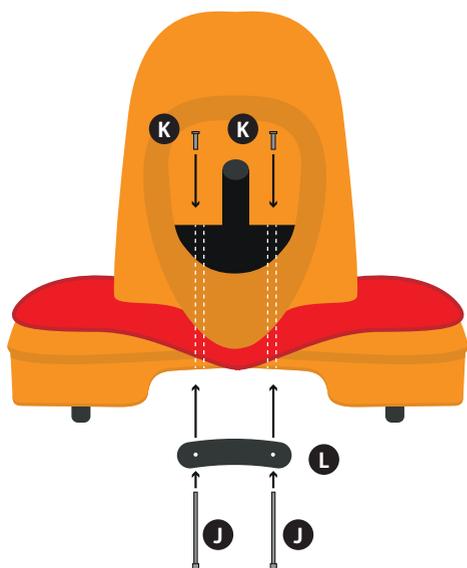

Se o encosto ainda se mover, aperte os parafusos até estarem muito bem apertados.

Passo 4

Deslize a base do Scoot para cima e sobre os três pinos salientes do conjunto da roda, para que encaixem nos orifícios correspondentes.

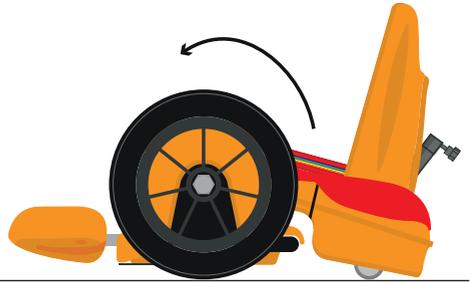


Passo 5

Vire o Scoot para aceder à parte de baixo. Usando os parafusos e arruelas assinaladas, fixe o Andador em três locais usando a ferramenta fornecida.




Confirme se o conjunto da roda está seguro.

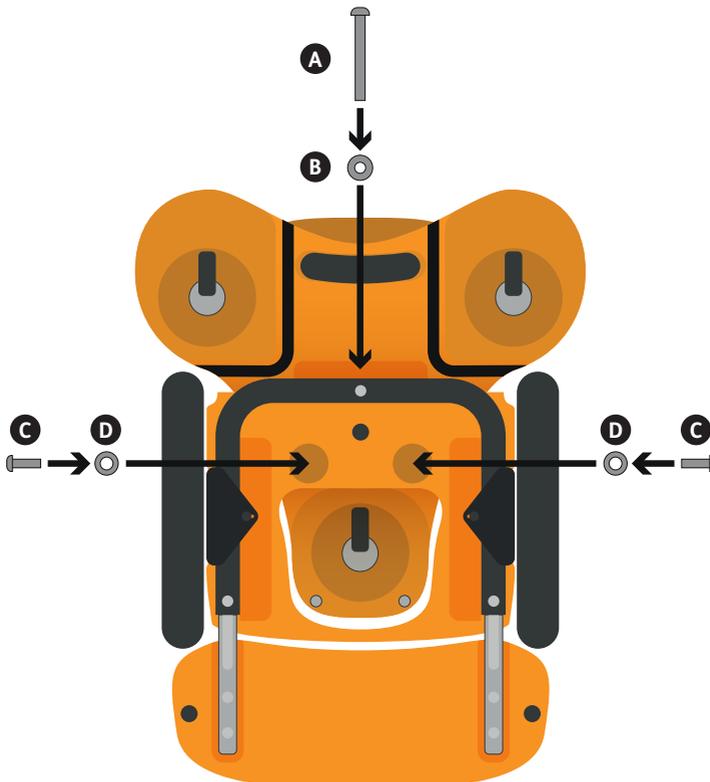

Passo 6

Ajuste o comprimento do apoio para os pés de acordo com o seu filho despertando os parafusos assinalados e deslizando o apoio para os pés para dentro ou para fora.

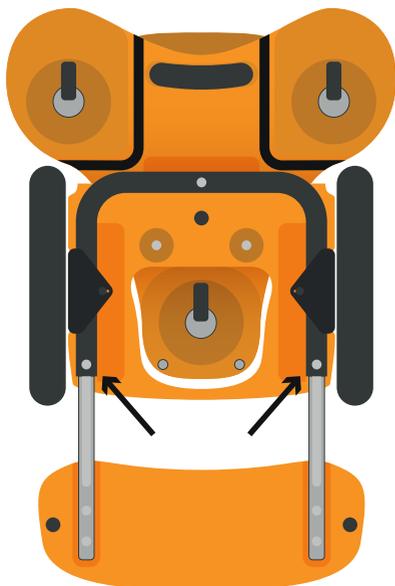


Passo 7

Use os dois fixadores (E) para prender a placa em ferradura (H) à frente do Scoot, como apresentado.

⚠ Na configuração Ride (passear) é necessário remover o rodízio frontal antes de usar o andador.

Remover o rodízio e os acessórios (partes F,G,I) e guardar num local seguro.

Pode agora usar o Sooot na configuração Ride (passear).

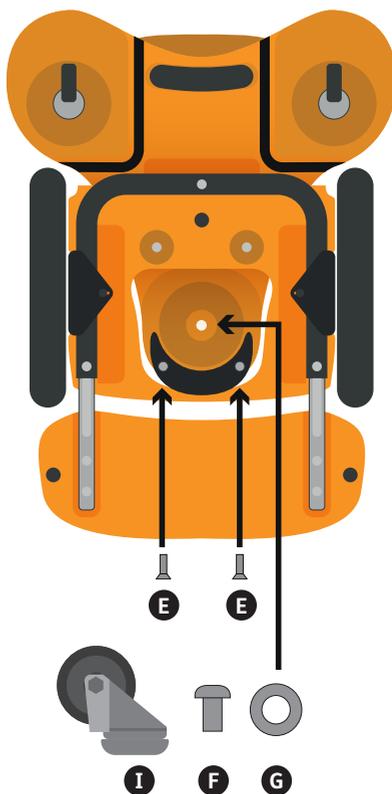


Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados antes de deixar o seu filho usar o Scoot.

Passo 8

Para fixar a pega de empurrar, coloque o cabo no interior da área apresentada. Aperte o parafuso A para garantir que o cabo está seguro. Ajuste o cabo à sua altura e aperte com o parafuso B.

Certifique-se de que o cabo está seguro antes de usar.


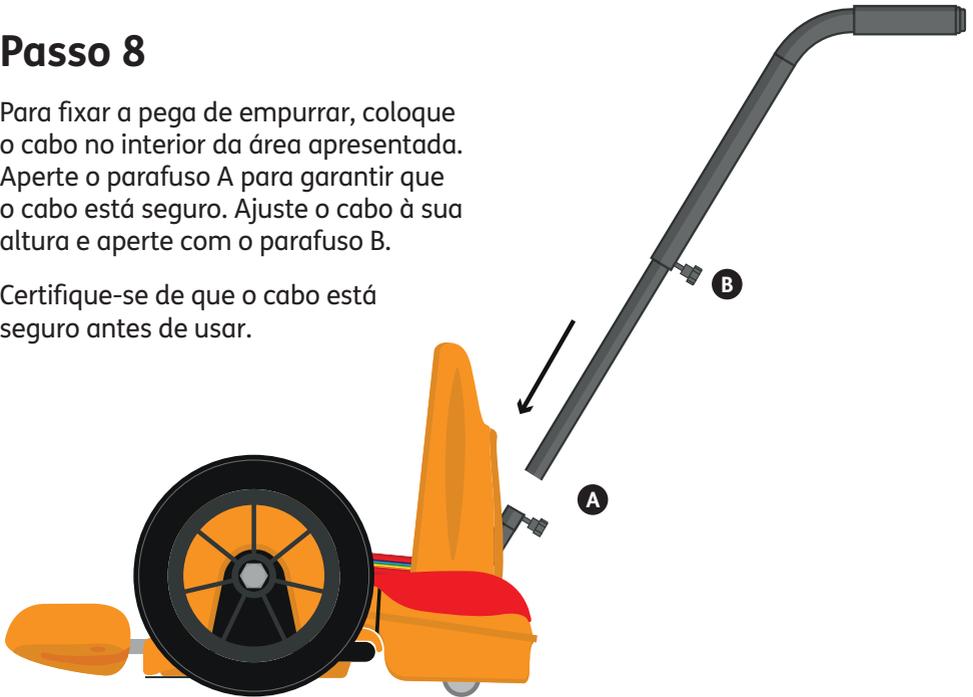


Fixar o encosto avançado

Se tiver escolhido a almofada de encosto avançado como acessório adicional, deslize-a para o encosto antes de colocar o encostado Scoot.

Puxe o revestimento sobre o encosto de plástico. Prenda o elástico para segurar o revestimento ao encosto. Prenda a ponta do revestimento à ponta do encosto. Coloque as suas laterais nas ranhuras mostradas e prenda-as aos poppers.

Para ajustar a altura das laterais, mova as laterais para cima e para baixo entre os quatro poppers.

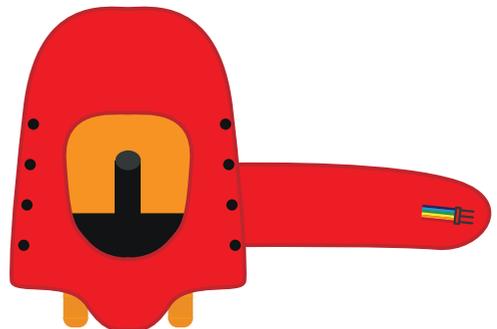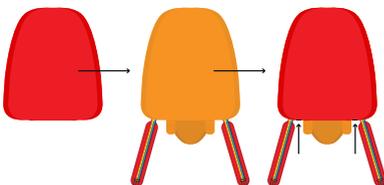

SECÇÃO 11.3: Transferir o seu filho para o Scoot

Antes de começar a usar o Scoot, certifique-se de que todos os componentes estão seguros e ajustados corretamente. Verifique se as tiras elásticas não estão danificadas, desgastadas ou rasgadas.

Se detetar algum sinal de danos, não use o produto e telefone para o Serviço ao Cliente para instruções. Posicione o Scoot para que não se mova enquanto transfere o seu filho para o mesmo. Mantenha-o firme ou coloque-o contra a parede para apoio extra.

1

Usar na configuração crawl (gatinhar)

O seu filho deve usar crawl (gatinhar) deitado sobre a barriga, como mostrado abaixo. A cabeça da criança fica voltada para a frente do Scoot (onde se encontra o logótipo da Firefly).

Não esqueça que o Scoot não tem travões, pelo que deve usar a configuração Crawl (gatinhar) apenas sobre superfícies planas. Supervisione o seu filho para garantir que não chegam aos rodízios.



2

Usar na configuração Scoot

Antes de usar o Scoot, prenda e ajuste todos os componentes conforme recomendado na Secção 11.2 e verifique se as tiras elásticas não estão danificadas, desgastadas ou rasgadas.

Se existir algum dano, não use o produto e entre em contacto com o Serviço ao Cliente para instruções. Posicione o Scoot para não se

mover enquanto transfere o seu filho para o mesmo.

Mantenha-o firme ou coloque-o contra a parede para apoio extra.

Certifique-se de que o encosto está bem preso seguindo as instruções de montagem do Passo 3 na Secção 11.2.

Abra o cinto e posicione o seu filho de modo a que as costas fiquem bem encostadas ao encosto.

Prenda o cinto em volta da cintura do seu filho. Prenda o conjunto e puxe os dois anéis D longe da fivela central para apertar o cinto, assegurando que o mesmo não fica torcido.

Ao usar o Scoot, o seu filho pode impulsionar-se para trás, para frente ou para os lados usando as pernas. Não esqueça que o Scoot não tem travões,

pelo que deve ser usado apenas sobre uma superfície plana. Supervisione o seu filho para garantir que não chegam aos rodízios.



Assegure-se de que o seu filho está confortável e estável na configuração Scoot antes de usar.

3

A configuração Ride (passear)

Ajuste e segure todos os componentes conforme recomendado na Secção 9.2 e verifique se as tiras elásticas não estão danificadas, desgastadas ou rasgadas. Se existirem danos, não use o produto e entre em contacto com o Serviço ao Cliente para instruções. Posicione o Scoot para que não se mova enquanto transfere o seu filho para o mesmo.

Ajuste o apoio para os pés de acordo com o comprimento das pernas do seu filho, para que os pés do seu filho não fiquem estendidos para além do apoio para os pés. Consulte os Passos 4-6 da Secção 9.2.

Abra o cinto e assegure que está afastado da área de assento. Coloque o seu filho com as costas contra o encosto.

Prenda o cinto em volta da cintura do seu filho. Aperte em conjunto e afaste os dois anéis D do centro da fivela para apertar o cinto, garantindo que o cinto não fica torcido.

Ao usar a configuração Ride (passear), as crianças conseguem impulsionar-se a si mesmas usando as rodas. Empurrar ambas as rodas para a frente, resulta num movimento para a frente e empurrar para trás resulta num movimento para trás. Empurrar para a frente na roda direita resulta numa curva para a esquerda e empurrar para a frente na roda esquerda resulta numa curva à direita. Empurrar para trás na roda direita resulta numa curva para a direita e empurrar para trás na roda esquerda resulta numa curva à esquerda.



Garanta que seu filho está confortável e estável na configuração Ride (passear) antes de usar.

4

Poosh

Cumpra as instruções de transferência de acordo configuração Ride (passear). Certifique-se de que o cabo de empurrar está bem encaixado no encosto antes de colocar o seu filho no Scoot. Certifique-se de que ambos os puxadores no cabo de empurrar estão bem seguros e fixos.

É necessário que um adulto ou uma criança mais velha empurre e supervisione sempre a criança enquanto esta estiver no Scoot.

Lembre-se de que não há travões no Scoot, pelo que deve usar a configuração Ride (passear) numa superfície plana. Supervisione o seu filho até que ele ser capaz

de se movimentar sozinho.



Atenção à colocação das mãos do seu filho ao usar a função Poosh. Certifique-se de que não se encontram próximas dos raios das rodas para minimizar o risco de as mãos ficarem presas.



Quando uma criança estiver na configuração Poosh, certifique-se de que as mãos da criança estão longe da montagem da roda

SECÇÃO 11.4: O Scoot e o desenvolvimento do seu filho

Independentemente da configuração do Scoot que o seu filho estiver a usar, ele terá a oportunidade de desenvolver capacidades físicas, cognitivas e sensoriais enquanto se diverte muito.

O movimento ativo é conhecido por contribuir para o desenvolvimento cognitivo - ajuda as crianças a aprender instruções direcionais (para a frente, e para trás, etc.), bem como a percepção de profundidade e distância necessária para contornar obstáculos. Ao fazê-lo, a consciência corporal melhora à medida que o seu filho percebe melhor como se relaciona com o ambiente. Isto traduz-se mesmo em manipulação e coordenação olho-mão. Além disso, em toda a variedade de configurações, pernas, braços, pescoço, barriga e costas podem fazer pequenos exercícios. Nas configurações Crawl (gatinhar) e Ride (passear), as pequenas mãos são expostas a uma gama mais ampla de experiências sensoriais e de fortalecimento dos ombros - o que também se traduz em melhoria das capacidades de manipulação.

Dito isto, as crianças que vimos no Scoot não estão interessadas em nada disto - estão é muito ocupadas a dar voltas e a correr com os seus irmãos ou irmãs e a apreciar a liberdade que a mobilidade independente significa.

SECÇÃO 12: Informação técnica

Distância de ajuste da platina do encosto (comprimento da perna sentado das costas até aos pés)	Ajuste mínimo: 520 mm Ajuste máximo: 630 mm (para a frente do apoio para os pés)
Largura do arco da roda	230mm
Largura do assento	230mm
Largura max recomendada da anca	260mm
Largura do encosto	300mm
Tamanho do rastro	Crawl (gatinhar): L 460mm / W 450mm / H 160mm Scoot: L 460mm / W 450mm / H 320mm Ride (passear) (no ajuste mínimo): L 620mm / W 450mm / H 320mm Ride (passear) (no ajuste máximo): L 730mm / W 450mm / H 320mm
Medidas adicionais	Encosto: W 260mm Laterais do encosto avançado W 420mm Cabo Poosh: A 890 mm (max desde o chão) A 800 mm (min desde o chão)

Tabela dos Símbolos

Símbolo	Significado
	Aparelho Médico
	Ler as Instruções Antes de Usar
	Marca CE
	Aviso
	Fabricante
	Código do Produto
	Número de Série
	Peso Máximo de Ocupação
	Data de Fabricação
	Livre de Latex
	Identificação Única de Dispositivo
	Lavagem na Máquina - Temperatura da Água 40° C
	Não Secar a Seco
	Não Passar a Ferro
	Não Utilizar Lixívia
	Não Lavar a Seco

SECÇÃO 13: Perguntas mais frequentes

1. Como saber se o Scoot é adequado para o seu filho?

O Scoot é um produto de mobilidade precoce, desenhado para proporcionar às crianças uma experiência divertida e a oportunidade de se movimentarem de forma independente. O Scoot foi desenhado para crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos (dependendo do seu tamanho) e para os níveis I - IV do Gross Motor Function Classification System (GMFCS) dependendo do seu nível de desenvolvimento.

O seu filho vai aproveitar ao máximo o seu Scoot (em todas as configurações) se conseguir segurar a cabeça e tiver um nível razoável de controlo do tronco, o que significa que pode sentar-se com um pouco de apoio pélvico.

O seu filho terá dificuldade em utilizar o Scoot em qualquer configuração, se tiver um controlo limitado da cabeça e do tronco ou da capacidade de ficar sentado.

No entanto, como as capacidades do seu filho ainda podem estar a surgir, poderão conseguir estar no Scoot durante curtos períodos de tempo antes de ficarem cansados.

Está tudo bem! Siga o ritmo deles e muito rapidamente vai poder ver as capacidades e a resistência necessárias.

Para mais informação sobre a utilização do Scoot, consulte os vídeos online em www.fireflyfriends.com.

2. Existe alguma razão para não usar o Scoot?

Se o seu filho tiver extremos de tónus, ou tiver sido submetido a alguns tipos de cirurgia (para os isquiotibiais curtos, por exemplo), recomendamos que procure alguma orientação do seu fisioterapeuta e/ou médico.

3. Durante quanto tempo o meu filho pode usar o Scoot?

Isto pode variar dependendo das capacidades do seu filho, do seu humor e da hora do dia. Deixe-se levar pelo seu filho, mas evite deixá-lo demasiado cansado, porque isso pode afetar as suas capacidades em outras atividades diárias.

4. Quantas vezes por semana posso usar o Scoot?

O seu filho pode gostar de usar o Scoot com frequência, e nesse caso o uso diário pode ser adequado. Se o seu filho tiver capacidades posturais emergentes ou problemas sensoriais, pode precisar de andar mais devagar.

5. O meu filho não gosta de uma das configurações. O que devo fazer?

O Scoot é uma atividade divertida que traz benefícios terapêuticos. É muito provável que a criança não goste da configuração Crawl (gatinhar), por ser muito difícil segurar a cabeça contra a gravidade nesta posição. Se pretender trabalhar no controlo da cabeça, então pode querer encorajar esta posição pouco a pouco, mas sem forçar o seu filho. Não é necessário usar o Scoot em todas as configurações.

6. O meu filho tem um tónus muscular muito alto/baixo. Pode usar o Scoot?

Se o seu filho tiver extremos de tónus, pode achar difícil usar o Scoot. Em caso de dúvida, consulte o seu terapeuta.

7. Posso usar o Scoot no exterior?

O Scoot pode ser usado no exterior em superfícies planas e niveladas. O cascalho e a relva não são recomendados. Se o seu filho é autopropulsionado, é importante que verifique sempre se as rodas estão sempre limpas.





Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

fireflyfriends.com

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com



LS1083-01