



# WeGo

Mode d'emploi du WeGo





**FABRIQUÉ PAR**

IBELIEVE SPORTS LTD POUR  
JAMES LECKEY DESIGN LTD

TÉL. : +44 (0)28 9260 0750  
MODÈLE : POUSETTE WEGO

MOIS ET ANNÉE  
DE FABRICATION : 11/2018

APPLICATION  
DES NORMES : ISO 7176

---

**NOM COMMERCIAL ENREGISTRÉ  
ET ADRESSE**

JAMES LECKEY DESIGN LIMITED

19C BALLINDERRY ROAD, LISBURN  
BT28 2SA, ROYAUME-UNI

TÉL. : +44 (0)28 9260 0750  
MODÈLE : POUSETTE WEGO

MOIS ET ANNÉE  
DE FABRICATION : 11/2018

APPLICATION  
DES NORMES : ISO 7176



**ATTENTION:** Pour éviter les blessures graves en cas de chute ou de glissement, toujours utiliser le harnais de siège. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. **IMPORTANT:** Conservez ces instructions pour référence ultérieure. La sécurité d'un enfant est de votre responsabilité. Cette poussette est conçue pour un enfant. **ATTENTION:** Ce siège n'est pas adapté à des enfants de moins de 6 mois.

**CONFORME À LA NORME BS  
1021- PARTIE 1 : RÈGLEMENT DE  
SÉCURITÉ DE 2014 POUR L'AL-  
LUMAGE DE CIGARETTES**



**MISE EN GARDE : LA  
NÉGLIGENCE PEUT ÊTRE  
LA CAUSE D'INCENDIE**

- **IMPORTANT:**

Conservez ces instructions pour référence future

- **WARNING:**

Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance

- **WARNING:**

S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation

- **WARNING:**

Pour éviter les blessures, veillez à ce que votre enfant soit tenu à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit.

- **WARNING:**

Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit

- **WARNING:**

Ce dispositif d'assise n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois

- **WARNING:**

Toujours utiliser le système de retenue

- **WARNING:**

Vérifier que la structure de la poussette, le siège ou les dispositifs de fixation du siège-auto sont correctement enclenchés avant l'utilisation.

- **WARNING:**

Ce produit ne convient pas à la course ou au patinage

- **WARNING:**

Conçu pour les enfants à partir de 1 an jusqu'à un poids maximum de 30 kg.

- **WARNING:**

Cette poussette a été conçue comme un dispositif médical et ne doit pas être utilisée en voiture

- **WARNING:**

Ne jamais utiliser cette poussette pour plus d'un enfant

- **WARNING:**

Tenir à l'écart de tout foyer

**Ce produit convient à un enfant qui ne peut pas s'asseoir sans aide, se retourner et de mettre à quatre pattes. Poids maximum de l'enfant: 30kg**

# La WeGo Firefly est une poussette légère qui se replie complètement et facilite les déplacements et les activités quotidiennes.

---

## SOMMAIRE

01 Usage prévu	p.115
02 Déclaration de conformité	p.115
03 Conditions de garantie	p.116
04 Consignes de sécurité	p.116
05 Nettoyage et entretien	p.118
06 Maintenance du produit	p.118
07 Directives importantes	p.119
08 Inspection du produit	p.120
09 Réutilisation des produits Firefly	p.120
10 Montage de votre WeGo	p.121
11 Réglage du WeGo	p.127
12 Utilisation du siège GoTo avec le WeGo	p.129
13 Réglage du harnais WeGo	p.132
14 Dimensions du WeGo	p.133

---

## SECTION 01: USAGE PRÉVU

La WeGo a été conçue pour fournir un soutien supplémentaire au haut du corps. Elle est destinée à être utilisée par les enfants d'un poids maximal de 30 kg.

La WeGo est prévue pour un usage occasionnel, en remplacement du système d'assise de base ou d'un fauteuil roulant.

La WeGo est compatible avec le siège Firefly GoTo, taille 1 et 2. Les revêtements tissu et vinyle sont adaptés.

Pour en savoir plus sur le dimensionnement du GoTo, consultez le site [www.fireflyfriends.com/uk/our-products/goto-seat](http://www.fireflyfriends.com/uk/our-products/goto-seat)

La WeGo peut ne pas convenir aux enfants et aux jeunes dans les cas suivants :

- Déformations fixes de la colonne vertébrale de type scoliose ou cyphose
- Contractures musculaires intenses
- Enfants atteints de dégénérescence musculaire, comme la dystrophie musculaire ou la sclérose latérale amyotrophique
- Enfants à haut risque de fractures osseuses
- Risque élevé de blessure liée à la



Attention – L'enfant doit être maintenu en permanence dans le harnais 5 points et jamais laissé sans surveillance quand il est dans la poussette.

Attention – Quand la WeGo est stationnaire, nous recommandons de serrer le frein à fond afin d'éviter tout déplacement involontaire.

pression

- Mouvements violents et incontrôlés
- Enfants souffrant d'une insuffisance respiratoire
- Enfants dépendant de dispositifs médicaux de survie tels que des bonbonnes d'oxygène
- Enfants âgés de 6 mois à 1 année
- Enfants qui ne peuvent pas garder leur tête en position médiane avec un soutien dorsal

Contre-indications

- La WeGo ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.

Leckey recommande de consulter un clinicien formé et expérimenté et de lui demander d'être présent lors de l'installation afin de minimiser les risques.

## SECTION 02 : DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le WeGo est classé comme une classe I Dispositif médical dans le cadre de l'UE et du Royaume-Uni règlement. Conception de James Leckey Ltd en tant que fabricant avec semelle responsabilité déclare que le Firefly WeGo se conforme aux exigences des lignes directrices 93/42/CEE, Règlement sur les dispositifs médicaux 2017, Royaume-Uni Règlement sur les dispositifs 2002 et EN 12182

Aides techniques pour les personnes handicapées et méthodes d'essai.

## SECTION 03 : CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie relative à la WeGo s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément à l'usage prévu, en respectant toutes les spécifications du fabricant. Une garantie d'un an est

fournie avec ce produit fabriqué par James Leckey Design Ltd.

Les marchandises peuvent nous être retournées dans le cadre de la garantie de 12 mois en vue de réparation ou d'échange. Dès que vous nous contactez, nous nous chargeons de la collecte des marchandises à vos frais, puis nous les réparons ou les remplaçons à réception de celles-ci et vous les retournons dans un délai de 14 jours. Dans tous les cas, il incombe au client de s'assurer que les marchandises à retourner sont correctement emballées, de préférence dans leur emballage d'origine.

Pour plus de sécurité, il est recommandé de porter la courroie d'attache/bracelet en permanence pour éviter que la poussette ne bouge.

- À l'arrêt, il faut appuyer fermement sur le frein jusqu'à ce que l'on entende un clic audible. Ce clic indique que le frein est bien enclenché.
- Veiller à débloquer le frein avant de pousser la poussette. La barre rouge doit être remise dans sa position initiale pour débloquer le verrou

## SECTION 04 :

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Toujours lire attentivement toutes les instructions du mode d'emploi avant utilisation.
2. Toujours veiller à évaluer l'adéquation de la WeGo avant d'y installer l'enfant.
3. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à aucun moment pendant l'utilisation de ce produit.
4. Le poids maximal de l'utilisateur de la WeGo est de 30 kg. Celui-ci ne doit jamais être dépassé.
5. Ne pas modifier la WeGo et ne jamais utiliser avec la WeGo des composants autres que ceux agréés. Cela pourrait mettre votre enfant en danger et également entraîner l'annulation de votre garantie.
6. La WeGo n'a pas fait l'objet d'essais de collision et ne peut donc pas être utilisée pour le transport dans des véhicules à moteur.
7. Cette poussette a été conçue pour transporter un enfant. Ne pas transporter pas d'objets ou d'enfants supplémentaires, sauf comme indiqué dans ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut endommager la poussette et/ou la rendre instable.
8. Une surcharge ou un pliage incorrect peut endommager la poussette.
9. Si vous utilisez le siège GoTo avec la WeGo, toujours s'assurer qu'il est fermement fixé à la poussette en attachant les trois sangles noires. Veuillez consulter la section 17 pour de plus amples détails.
10. Redoubler de prudence lors de l'utilisation de la poussette avec votre enfant en position complètement inclinée, car cela peut augmenter les risques de basculement.
11. Toujours soulever les roulettes avant par-dessus les bordures ou les marches en appuyant sur la poignée.
12. La WeGo doit être tenue à l'écart



**Attention :** Le non-respect de ces instructions peut mettre votre enfant ou vous-même en danger.

**Attention :** Conserver la protection en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation

de toute source de chaleur directe, notamment des flammes nues, cigarettes, radiateurs électriques et à gaz.

13. Cette poussette ne convient pas à la course et au patinage.
14. Ne jamais autoriser des enfants à plier, monter ou démonter la poussette.
15. Ne jamais laisser des enfants se servir de la poussette comme jouer ou pour transporter d'autres enfants.
16. En cas de doute concernant l'utilisation sûre de la WeGo, ou de défaillance de toute pièce, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le service d'assistance clientèle de Firefly par e-mail à l'adresse [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

## SECTION 05 – NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. La poussette peut être nettoyée avec de l'eau froide (300) et un détergent doux.
2. La housse est amovible et lavable en machine à l'eau froide avec un détergent doux. Ne pas passer au sèche-linge.

3. Toujours laisser sécher le produit avant de le plier et de le ranger
4. Nettoyer le cadre avec un chiffon humide et un détergent doux.
5. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs sur la poussette.

### **Conseil:**

L'un des meilleurs nettoyeurs à base d'eau pour revêtement est très facile à faire à la maison. Verser une tasse d'eau tiède (non chaude) dans un bol à mélanger, puis ajouter 1/4 tasse de savon à vaisselle biodégradable. Mélanger à l'aide d'un mixeur électrique à vitesse moyenne jusqu'à obtention d'une mousse épaisse. Cette mousse enlèvera la saleté accumulée et la plupart des taches de nourriture ou de boisson. Ce nettoyeur est non seulement facile à réaliser et économique, mais également non toxique et respectueux de l'environnement.

## SECTION 06 – MAINTENANCE DU PRODUIT

For all service related issues please refer to the firefly website [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com) or contact the Firefly Customer Services team on [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

## SECTION 07 – DIRECTIVES IMPORTANTES

1. Prendre soin d'éviter de se coincer les doigts lors du dépliage et du repliage du cadre.
2. Avant de placer l'enfant dans la WeGo, s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés.
3. Sécuriser l'enfant dans le harnais dès qu'il est installé dans la poussette.
4. La longueur de la sangle d'aine peut être ajustée à l'aide de la ferrure de réglage située sous la housse rembourrée. Sur le siège GoTo, taille 2, la position de la sangle d'aine peut être avancée afin de laisser plus d'espace à l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit.

### Placement de l'enfant dans le siège GoTo

1. Le siège GoTo doit être fermement maintenu en place pour son usage prévu avant d'y installer un enfant.
2. S'assurer que les sangles du harnais ne gênent pas le placement de l'enfant dans le siège GoTo. Les sangles d'épaule et les sangles de soutien latéral doivent être très lâches.
3. Fermer la boucle centrale et régler les sangles de soutien latéral pour s'assurer que l'enfant est fermement maintenu dans le harnais de siège. La longueur des sangles d'épaule doit être ajustée pour un maintien ferme et sûr de l'enfant.

### Retrait de l'enfant du siège GoTo

1. Desserrer les sangles d'épaule et les sangles de soutien latéral.
2. Déverrouiller la boucle centrale à l'aide du bouton de dégagement du harnais.
3. Faire glisser les sangles d'épaule des épaules de l'enfant et enlever doucement les bras de l'enfant du harnais.
4. Une fois que les jambes sont bien en place, passer doucement les bras de l'enfant à travers les sangles d'épaule – les sangles d'épaule doivent être très lâches. S'assurer que les parties rembourrées sont bien positionnées sur les épaules de l'enfant.

## SECTION 08 : INSPECTION DU PRODUIT

Nous recommandons de procéder à divers contrôles de l'équipement afin de garantir à chaque fois une utilisation sûre du produit.

1. Vérifier que le revêtement ne présente pas de signes d'usure.
2. Vérifier que toutes les boucles fonctionnent bien.
3. Vérifier que tous les éléments pliables sont sûrs et fonctionnent correctement avant chaque utilisation.
4. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
5. Vérifier que les freins fonctionnent bien.
6. Ne pas utiliser la poussette en cas de pièce endommagée ou manquante.


## SECTION 09 : RÉUTILISATION DES PRODUITS FIREFLY

S'assurer que le produit a été soigneusement nettoyé conformément à la Section 5 de ce manuel pour éviter tout risque d'infection.

S'assurer qu'un exemplaire du mode d'emploi est fourni avec le produit. En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit Firefly fabriqué par Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cesser d'utiliser le produit et contacter notre équipe du service assistance clientèle Firefly dès que possible par e-mail à l'adresse : **[customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)**


## SECTION 10 : MONTAGE DE VOTRE WEGO

1. Déplier le cadre de la WeGo en tirant le guidon vers le haut et en plaçant le pied sur le tube de l'essieu arrière comme indiqué. **A**
2. Soulever la poignée **B** jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, cela indiquera que le cadre est bloqué en position ouverte. **C**
3. S'assurer que les verrous de sécurité sont tous les deux enclenchés.
4. Pour réduire, tirez les leviers de verrouillage des deux côtés vers le haut. **D**

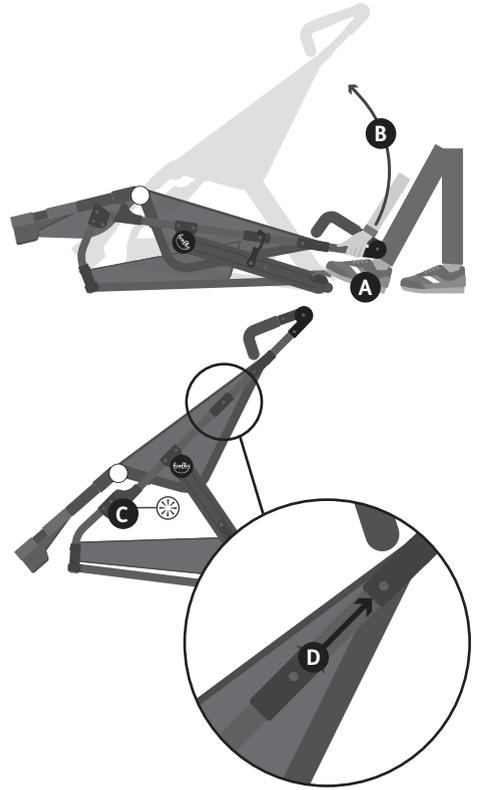

### 10.1 – MONTAGE DES ROUES ARRIÈRE

1. Soulevez le tube de l'essieu arrière de la poussette et insérez l'essieu de roue arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, ce qui indique que la roue est bloquée en position. Répétez l'opération pour la deuxième roue.
2. S'assurer que les roues sont correctement installées avant d'utiliser la WeGo. Tirer sur chaque roue pour vérifier qu'elles sont bien en position bloquée.

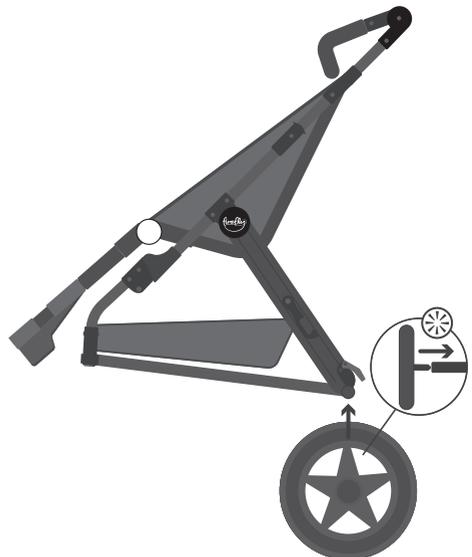


## 10.2 – MONTAGE DES ROUES ARRIÈRE

1. Soulever le tube de l'essieu avant de la poussette et insérer l'essieu de roue avant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, ce qui indique que la roue est bloquée en position. Répéter l'opération pour la deuxième roue. **A**
2. S'assurer que les roues sont correctement installées avant d'utiliser la WeGo. Tirer sur chaque roue pour vérifier qu'elles sont bien en position bloquée.



3. Pour bloquer les roues avant en position, les aligner vers l'avant et faire glisser le guide de blocage des roues avant vers le bas. **A**
4. Pour débloquer les roues avant, faire glisser le guide de blocage des roues avant vers le haut.

Vous entendrez un clic audible qui indique que le frein est bien enclenché.

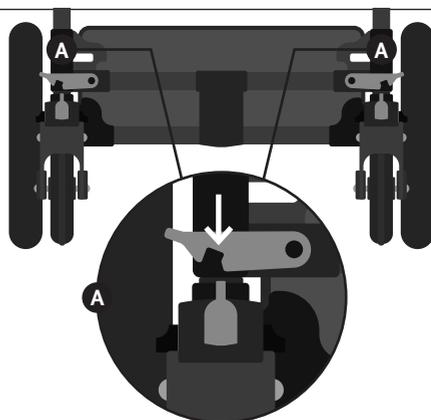

## 10.3 – UTILISATION DU FREIN

1. Pour activer le frein, appuyer sur la barre de frein rouge jusqu'à ce que les roues soient bloquées.
2. Pour relâcher le frein, tirez la barre de frein rouge vers le haut jusqu'à sa position d'origine.




## 10.4 – RÉGLAGE DU GUIDON

1. Pour régler le guidon, appuyer sur les boutons noirs situés sur la partie interne du guidon pour l'ajuster à la position souhaitée. **A**




## SECTION 10.5 – FIXATION DE LA CAPOTE

1. Fixer la broche en plastique à la poussette en la glissant dans l'attache illustrée. **A**

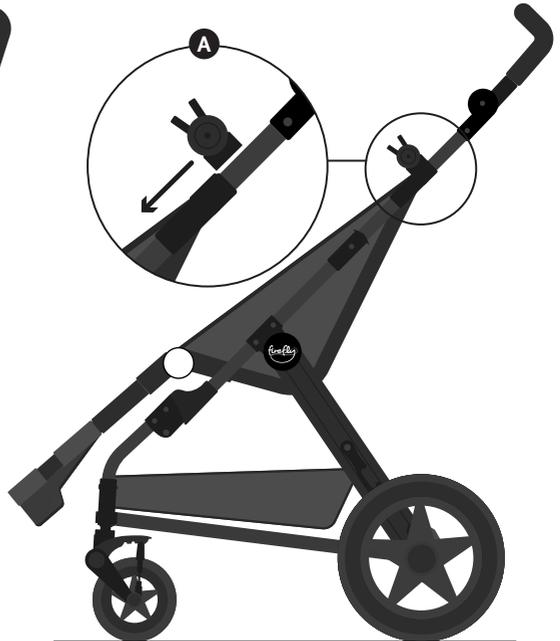

2. Faire passer les tiges en plastique à travers le matériau de la capote comme indiqué sur l'image.

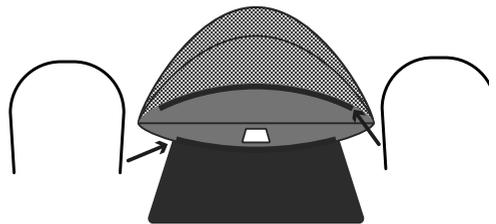

Suite →

3. Insérer les tiges dans les broches en plastique des deux côtés de la poussette et appuyer. **B**
4. Enrouler les élastiques noirs autour des crochets à l'arrière du cadre de la poussette.
5. Appliquer le Velcro sur la capote pour bien la maintenir en place. **C**



## SECTION 10.6 – FIXATION DE LA PROTECTION-PLUIE

1. En commençant par le repose-pied, étendre la protection-pluie au-dessus de la poussette, puis au-dessus de la capote et terminer par l'arrière de la WeGo.
2. Tirer les pans sur les côtés et les fixer en place à l'intérieur du cadre. **A**
3. Enrouler les élastiques noirs autour des crochets à l'arrière du cadre de la poussette. **B**

Conseil – Pour mettre le dossier complètement en position relevée, le tirer vers l'avant et serrer le plus possible avant de fixer la capote.




## SECTION 10.7 – FIXATION DU COUVRE-JAMBES

1. Faire passer le couvre-jambes au-dessus du repose-pied et les boutons de réglage dans les boucles de chaque côté de la poussette. **A**



Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à aucun moment dans ce produit.

Veiller à tenir à l'écart de l'enfant toutes les pièces de réglage du couvre-jambes.

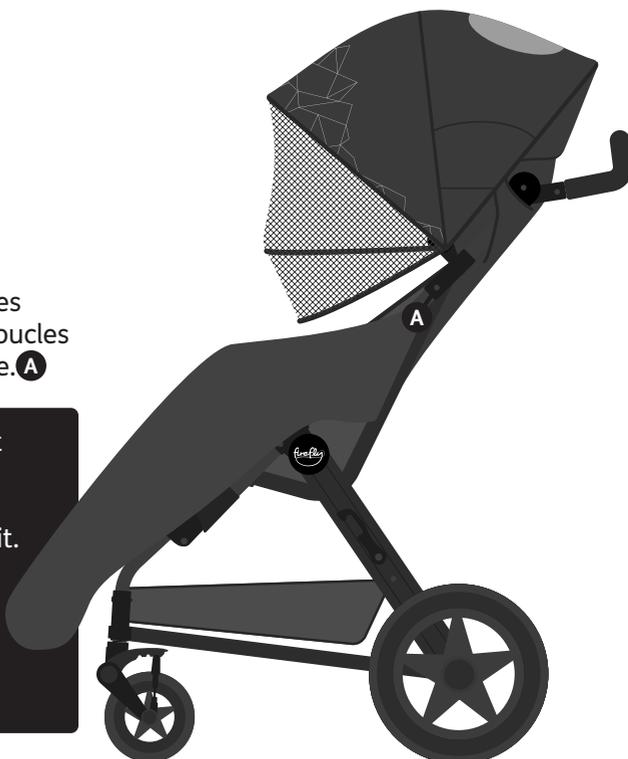

## SECTION 10.8 – FIXATION DE LA MOUSTIQUAIRE


1. Placer la moustiquaire au-dessus de la poussette et l'attacher à l'aide des boutons de réglage – faire passer les boutons de réglage dans les boucles de chaque côté de la poussette.



Attention : Utiliser seulement des boissons froides dans le porte-gobelet

## SECTION 10.9 – FIXATION DU PORTE-GOBELET

1. Glisser le porte-gobelet dans le support sur le côté droit du cadre de la poussette.

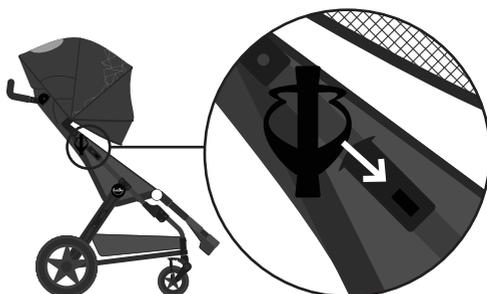

## SECTION 11 : RÉGLAGE DE LA WEGO

### 11.1 – RÉGLAGE DU DOSSIER




1. Pour incliner le dossier vers l'arrière, tirer le levier en plastique gris vers vous et le régler selon l'angle désiré. **A**
2. Pour régler le dossier en position droite, tirer sur les anneaux en plastique gris et fixer selon l'angle désiré. **B**
3. Pour mettre le siège en position verticale, pousser le dossier vers le haut au-delà du cadre et serrer en tirant sur les anneaux en plastique.



Angle d'inclinaison d'assise / dossier  
**100°**

Inclinaison maximale  
**140°**

Angle d'assise  
**15°**

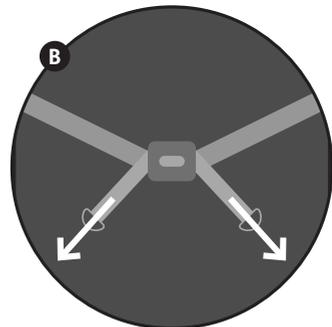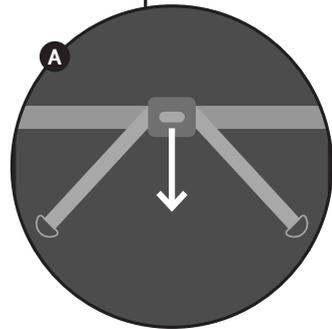
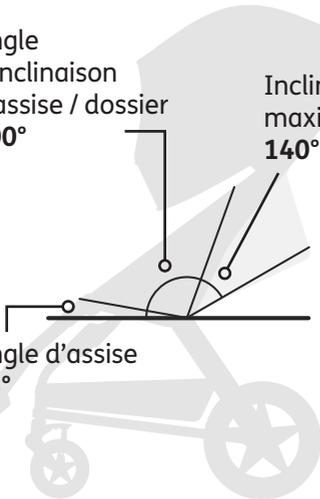


Attention – ne jamais essayer de régler le WeGo quand un enfant est installé dans le siège.

## 11.2 – RÉGLAGE DU REPOSE-PIED

1. Pour fixer le repose-pieds dans la position la plus courte, pousser jusqu'en haut et fixer le bouton-poussoir supérieur de chaque côté sur le tissu. S'assurer qu'ils sont bien engagés.

2. Pour fixer le repose-pieds dans la position la plus longue, relâcher les boutons poussoir et tirer vers le bas jusqu'à ce que la goupille de verrouillage s'enclenche et engage les boutons-poussoir inférieurs de chaque côté.

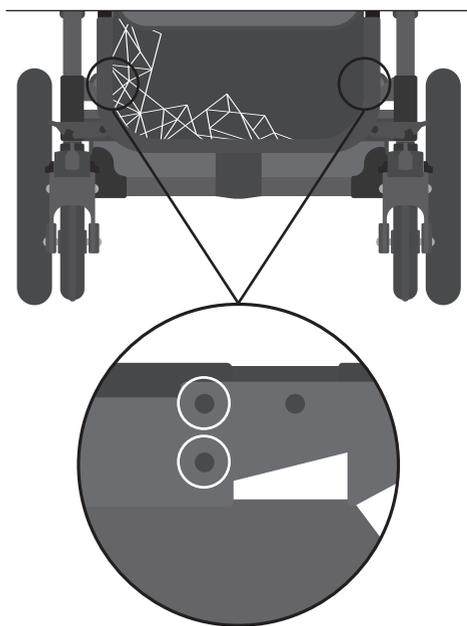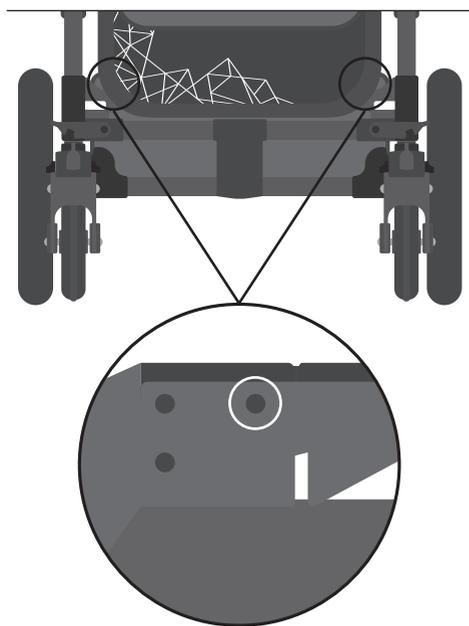


3. Le repose-pieds peut être incliné selon l'angle souhaité en appuyant sur le bouton blanc situé sur la charnière latérale du repose-pieds.




## SECTION 12 : UTILISATION DU SIÈGE GOTO AVEC LA WEGO


1. S'assurer que toutes les sangles du siège GoTo sont desserrées et non attachées entre elles. Placer le siège GoTo dans la poussette.

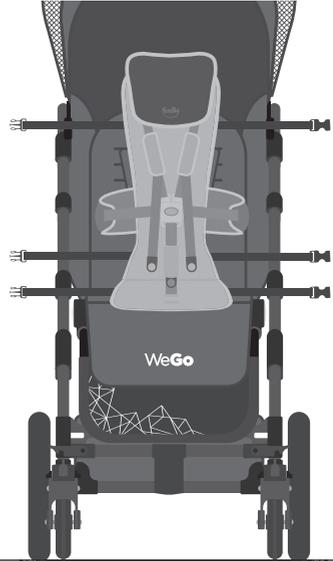

2. Faire passer les sangles dans les fentes indiquées et fermer de chaque côté.

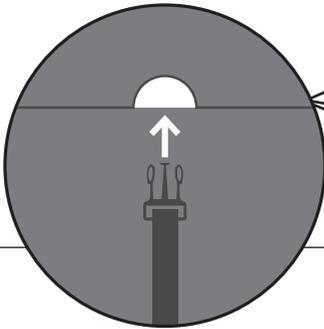

3. Tirer sur les sangles pour serrer. **A**
4. Enrouler ce qui reste de longueur de sangle et les maintenir en place dans les clips. **B**
5. S'assurer que toutes les sangles noires sont bien fixées autour de la poussette et la boucle 5 points ouverte devant avant de placer l'enfant dans le siège GoTo.

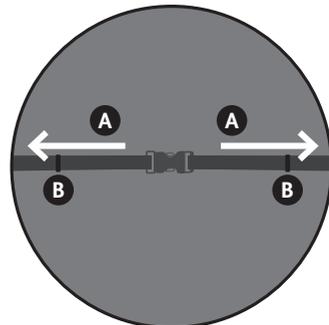


## SECTION 12.1: OUVERTURE ET FERMETURE DE LA BOUCLE 5 POINTS

**Avant de commencer, s'assurer que les sangles d'épaule, de soutien latéral et d'aine sont toutes desserrées et détachées.**


Attacher les deux fixations de soutien latéral sur les côtés de la boucle située à mi-course. **A**

Une fois celle-ci fermée, ajuster les sangles d'épaule, les sangles de soutien latéral et la sangle d'aine en tirant sur les sangles pour les tendre. **B**

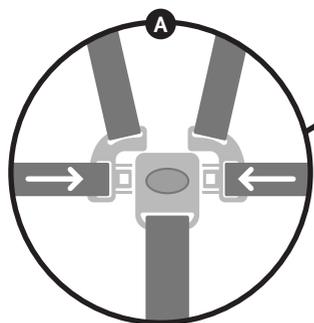

S'assurer que les sangles ne sont pas tordues quand la boucle est fermée.

Sur le GoTo Taille 2, le point de montage de la sangle d'aine peut être reculé ou avancé pour l'adapter aux besoins de l'enfant. S'assurer qu'il est fermement fixé au socle en plastique du siège GoTo. **C**

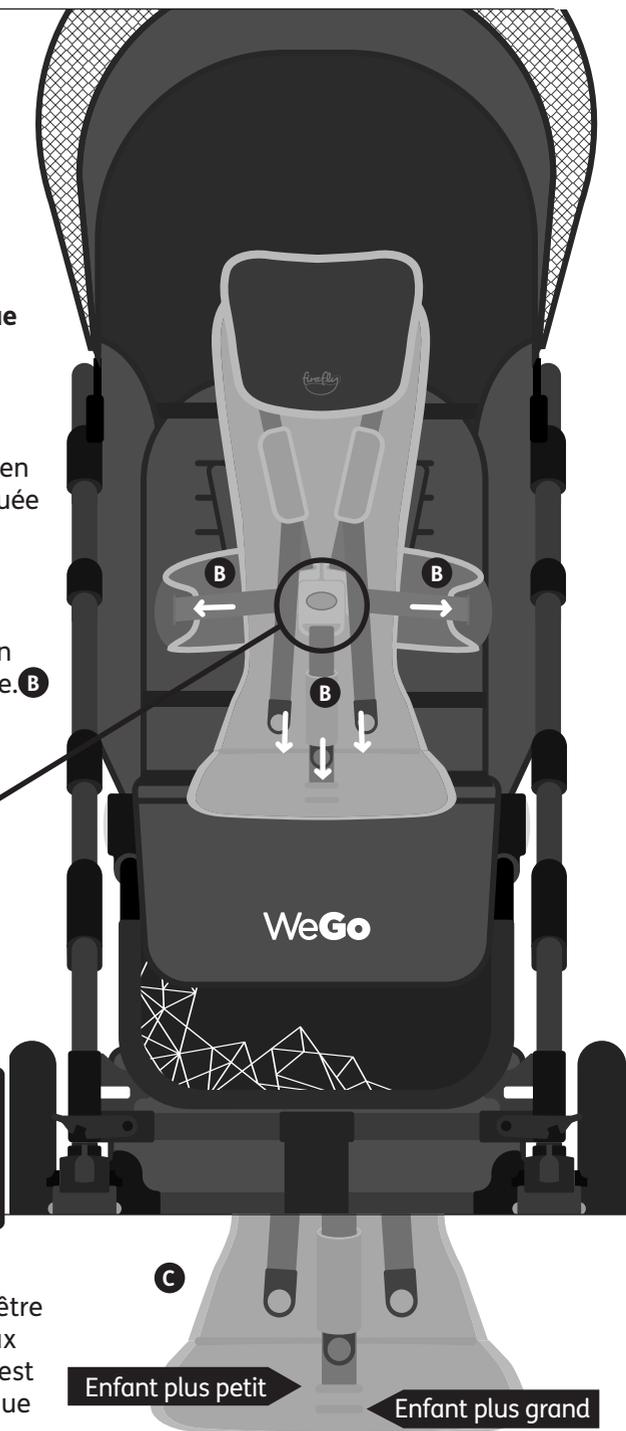


## SECTION 12.2 : RÉGLAGE DU REPOSE-TÊTE ET DU SOUTIEN LATÉRAL

Dévisser la molette du repose-tête en tournant dans le sens anti-horaire pour retirer le repose-tête du socle du siège GoTo. Déplacer le repose-tête vers le haut ou le bas pour atteindre la position désirée. **A**

Dès que le repose-tête est à la bonne hauteur, revisser la molette sur le socle du siège GoTo en tournant dans le sens horaire. **B**

Détacher le soutien latéral en tournant la molette dans le sens anti-horaire. Déplacer le soutien latéral vers le haut ou le bas pour atteindre la position désirée. Dès que le soutien latéral est à la bonne hauteur, le refixer en tournant la molette dans le sens horaire. **C**


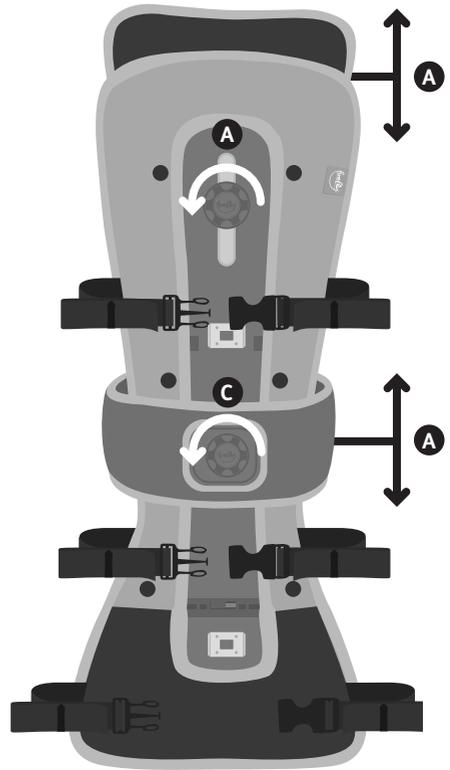


## SECTION 13 : REGLAGE DU HARNAIS WEGO

Pour régler les sangles d'épaule sur la WeGo, glisser la boucle d'extrémité à l'arrière du dossier en la passant dans la fente arrière. **A**

Puis faire passer la boucle dans la fente de hauteur désirée. **B**


Vous pouvez serrer ou desserrer les sangles en ajustant les boucles sur les sangles.

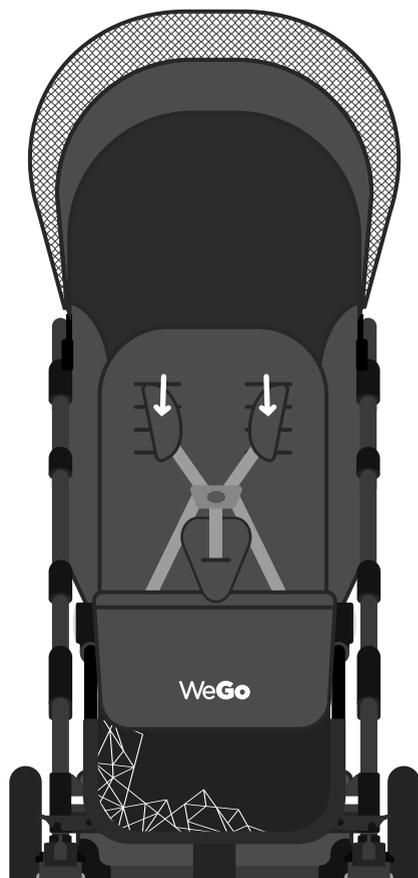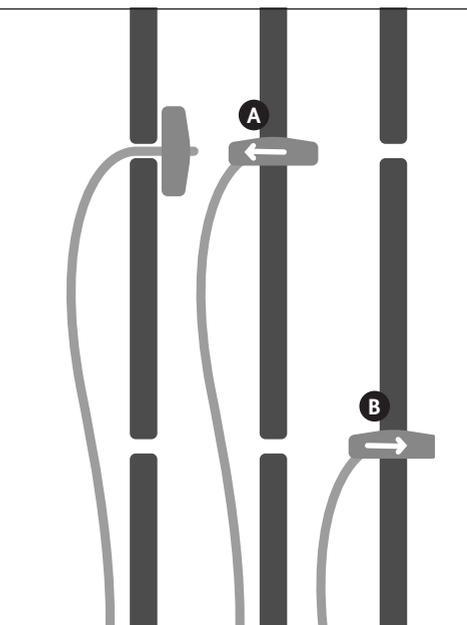

## SECTION 14 : DIMENSIONS DU WEGO

<b>Longueur d'encombrement (replié)</b>	116cm
<b>Hauteur d'encombrement (replié)</b>	38cm
<b>WeGo Hauteur</b>	122cm
<b>Profondeur d'assise</b>	26cm
<b>Hauteur d'assise</b>	50cm
<b>Largeur d'assise</b>	35cm
<b>Repose-pieds le plus court Longueur</b>	25cm
<b>Repose-pieds le plus long Longueur</b>	33cm
<b>WeGo Poids</b>	11kg
<b>WeGo Poids avec GoTo</b>	13kg

Remarque : le siège GoTo Taille 2 ne convient pas à tous les enfants utilisant la poussette WeGo. Veuillez consulter notre guide des tailles.

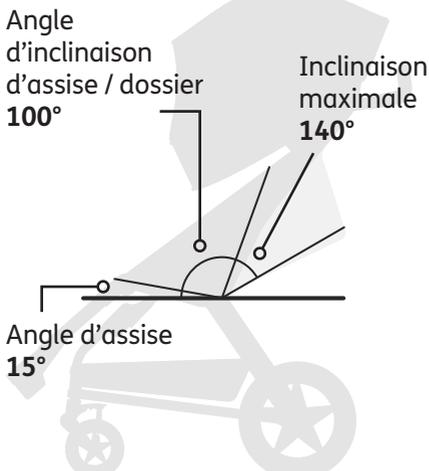

Symbole	Signification
	Fabricant
	Poids maximum de l'utilisateur
	Numéro de série
	Code produit
	Lire le manuel d'utilisation
	Marquage CE
	Marquage UKCA
	Dispositif médical
	Avertissement
	Date de fabrication
	Sans latex
	Numéro unique d'identification du produit





**Sunrise Medical AG**  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera

**T:** +41 (0)31 958 3838  
**F:** +41 (0)31 958 3848  
**www.sunrisemedical.ch**



#### **French Distributor**

Sunrise Medical SAS  
ZI de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
**www.sunrisemedical.fr**

**T:** +(33) (0) 2 47 55 44 00  
**F:** +(33) (0) 2 47 55 44 03  
**E:** info@sunrisemedical.fr

#### **Canadian Distributor**

Sunrise Medical  
237 Romina Drive,  
Unit 3, Concord, Ontario,  
L4K 4V3, Canada  
**www.sunrisemedical.ca**

**T:** +1.800.263.3390  
**F:** +1.800.561.5834  
**E:** mkt.canada@sunmed.com



**FireflyFriends Ltd**  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland  
fireflyfriends.com

(+44) 28 9267 8879  
hello@fireflyfriends.com



Vous pouvez obtenir des informations concernant les distributeurs sur le site Web de Firefly à l'adresse :  
[www.fireflyfriends.com/uk/distributor-information](http://www.fireflyfriends.com/uk/distributor-information)

