



GottaGo

Benutzerhandbuch



Freiheit für die Familie



Der Firefly GottaGo ist ein leichter und tragbarer Sitz zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern durch den unabhängigen Toilettengang. Es handelt sich um einen sicheren Sitz, der die Haltung unterstützt, und kann sowohl zuhause als auch unterwegs verwendet werden.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des GottaGo alle Anweisungen sorgfältig durch. Alle Anweisungen befinden sich auch auf unserer Website **www.fireflyfriends.com/gottago** mit Videos, Diagrammen und FAQ.

Inhalt

- 01 Bestimmungsgemäße Verwendung
 - 02 Zertifizierung
 - 03 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
 - 04 Garantiebedingungen
 - 05 Sicherheitsinformationen
 - 06 Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen
 - 07 Reinigung und Pflege
 - 08 Inspektion und Service
 - 09 Wichtige Leitlinien
 - 10 Neuausgabe der Produkte von Firefly
 - 11 Bedienungsanleitung
 - 12 Einrichten im klinischen Umfeld
 - 13 Demontage und Verstauen des Toilettensitzes
 - 14 Technische Daten
-

ABSCHNITT 01:

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der GottaGo Toilettensitz dient zur Unterstützung der Haltung von behinderten Kindern, um den Toilettengang zu erleichtern.

Der GottaGo ist ein tragbarer Toilettensitz, der den Toilettengang zuhause und unterwegs erleichtern soll.

Indikationen

Wir empfehlen, dass ein Erwachsener eine Inspektion des Produkts gemäß Abschnitt 08 des Benutzerhandbuch durchführt, um den sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

Der GottaGo Toilettensitz ist für die Verwendung in Badezimmern und Toiletten mit einem ebenen Untergrund geeignet. Der Sitz ist für die Unterstützung der Haltung von Kindern mit unterschiedlichen Behinderungen ausgelegt, die deshalb nicht alleine sitzen können. Es kann sich dabei insbesondere um gehunfähige Kinder mit einer neuromuskulären Erkrankung, einem Geburtsfehler oder Chromosomendefekt, einer Rückenmarkverletzung oder einer globalen Entwicklungsverzögerung handeln. GottaGo ist für Kinder mit einem Alter von ca. 2-9 Jahren mit einem Körpergewicht von maximal 30 kg geeignet.



Kinder dürfen beim Gebrauch ihres GottaGo Toilettensitzes nie unbeaufsichtigt bleiben, da sonst Verletzungsgefahr besteht.

ABSCHNITT 02:

Zertifizierung

Der GottaGo ist nach den Vorschriften der EU und Großbritanniens als ein Medizinprodukt der Klasse I eingestuft. James Leckey Design Limited erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt mit der Medizinprodukte-Verordnung (2017/745) der EU, UK Medical Device Regulations 2002 (Britische Medizinprodukte-Verordnung), sowie mit Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte und EN 12182:2012, Technische Hilfen für behinderte Menschen – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren, konform ist.

Hinweis: Allgemeine Empfehlungen für den Benutzer. Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann das zu Körperverletzung, Beschädigung des Produkts oder Umweltschäden führen.

Hinweis: Kinder sollten stets den Sicherheitsgurt tragen, wenn sie im GottaGo sitzen.

ABSCHNITT 03:

Warnungen und Vorsichtsmaßregeln

Vorsichtsmaßregel Tägliche Überprüfungen:

- Der GottaGo muss jeden Tag vor dem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass alle Gurte und Sitzelemente sicher befestigt sind.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Anweisungen sorgfältig durch.
- Führen Sie vor dem Gebrauch des Produkts immer eine Sichtprüfung des Produkts durch. Wenn Sie sich nicht sicher sind – STOP. Wenn Sie vermuten oder wissen, dass das Produkt oder ein Teil defekt ist – STOP. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder Fachhändler vor Ort so bald wie möglich.
- Überprüfen Sie immer, dass das Fußbrett gesichert ist.
- Der Benutzer darf keine beweglichen Verbindungen oder Drehpunkte berühren, die nicht verriegelt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass auf allen Seiten des Produkts genügend Platz für den Zugang bleibt. Das Umsetzen des Benutzers oder eine Verstellung des GottaGo, während der Benutzer darauf sitzt, wird nicht empfohlen.

- Bevor Sie den Benutzer auf das Produkt setzen, vergewissern Sie sich, dass das Produkt den Bedürfnissen des Benutzers entsprechend konfiguriert ist, und überprüfen Sie die Stabilität des Produkts.
- Achten Sie bei der Montage oder Positionierung der Komponenten des Toilettensitzes darauf, dass Ihre Finger nicht eingezwickelt werden.
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Sicherheitsverriegelungen an allen vier Beinen ganz arretiert sind, bevor Sie den Benutzer auf das Produkt setzen.
- Transportieren oder heben Sie den GottaGo nie an, während sich das Kind darauf befindet.

Wenn der Benutzer zum ersten Mal darauf sitzt:

- Der Transfer des Benutzers in das und aus dem Produkt muss mit der geeigneten Ausrüstung und entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.
- Wenn der Benutzer unruhig oder verängstigt wirkt, nehmen Sie den Benutzer so schnell aus dem Produkt, wie das gefahrlos möglich ist.

Vorsichtsmaßregel Einzwickgefahr für die Finger:

- Achten Sie bei der Montage oder beim Verstellen der Position von

Sitzkomponenten darauf, dass Ihre Finger bei der Positionierung von Sitzkomponenten und beim Anziehen von Befestigungsteilen nicht eingezwickelt werden. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der flexiblen Konturierung des GottaGo Toilettensitzes Einwickelgefahr für die Finger zwischen dem Sitz und dem Rahmen besteht, wenn der Benutzer darin sitzt und aktiv ist.

Warnung Umkipppgefahr:

- Legen Sie den Sicherheitsgurt stets an, sobald der Benutzer im GottaGo Platz genommen hat.
- Verwenden Sie den GottaGo nie auf unebenem Untergrund.
- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt, während es auf dem Produkt sitzt.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Fußplatte befestigt ist, bevor der Benutzer in den Sitz platziert wird. Verwenden Sie die Fußriemen des Benutzers erst nach Anlegen des Sicherheitsgurtes.
- Warnung Einklemmgefahr für die Finger: Achten Sie darauf, dass die Finger des Bedieners oder von in der Nähe befindlichen Kindern nicht zwischen dem Sitz und dem Rahmen eingeklemmt werden.
- Warnung Sicherheit des Benutzers: Vergewissern Sie sich, dass die Benutzergurte und vor allem die Fußriemen angelegt und richtig eingestellt sind, damit der Benutzer vor dem Toilettengang ausreichend

gesichert ist. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt, während es auf dem GottaGo sitzt.

Allgemeine Pflege

Vorsichtsmaßregel Reinigung:

- Reinigen Sie den GottaGo regelmäßig, damit sich kein Schmutz auf den Sitzelementen und am Rahmen ansammelt. Wenn sich Schmutz ansammelt, kann das zum Verschleiß der Formteile des Sitzes führen und Korrosion am Rahmen fördern. Verwenden Sie nur normale Haushaltsreiniger und angefeuchtete Tücher, keine Scheuermittel.

Vorsichtsmaßregel Reinigung mit Hochdruckreiniger/ Wassersschläuchen:

- Reinigen Sie den Rahmen nicht mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger, da der Rahmen nicht gegen Wasserstrahl abgedichtet ist und durch das Wasser beschädigt werden kann.

Vorsichtsmaßregel Lagerung:

- Das Produkt muss von allen direkten Wärmequellen, einschließlich offener Flamme, Zigaretten, Elektro- und Gasheizungen ferngehalten werden.

Vorsichtsmaßregel Inbetriebnahme:

- Wenn der GottaGo eingelagert war, warten Sie, bis er sich auf die

Umgebungstemperatur erwärmt hat. Wenn sich Feuchtigkeit am Produkt angesammelt hat, wischen Sie diese zuerst ab.

Vorsichtsmaßregel Entsorgung:

- Entsorgen Sie den GottaGo nur in einem Werkstoffhof unter der richtigen Recyclingkategorie.
- Zusätzliche Reinigung von Metall- und Kunststoffteilen
- Für die tägliche Reinigung kann Wasser und Seife oder ein antibakterielles Spray verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung von Kunststoff- oder Metallteilen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass das Produkt trocken ist.

ABSCHNITT 04: **Garantiebedingungen**

Die Garantie für den GottaGo gilt nur, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird und alle Vorgaben des Herstellers beachtet werden. Auf dieses, von James Leckey Design Ltd. hergestellte Produkt, wird ein Jahr Garantie gewährt.

Waren können bis zu 12 Monate ab dem Erhalt zur Reparatur oder zum Ersatz unter der Garantie an uns zurückgeschickt werden. Wenn Sie uns kontaktieren, werden wir die Abholung der Waren auf unsere Kosten veranlassen. Nach dem Eingang werden wir die Ware reparieren oder ersetzen und innerhalb von 14 Tagen an Sie zurücksenden. In jedem Fall ist der Kunde dafür verantwortlich, dass Waren, die an uns zurückgeschickt werden, ordnungsgemäß und möglichst in der Originalverpackung verpackt sind.

ABSCHNITT 05:

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Gebrauchsanweisung durch.
2. Kinder dürfen beim Gebrauch dieses Produkts nicht unbeaufsichtigt bleiben.
3. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass alle Teile des GottaGo ordnungsgemäß und gemäß der Gebrauchsanweisung montiert wurden.
4. Bitte achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt und der Fußriemen immer angelegt werden.
5. Der GottaGo muss auf einer trockenen, festen und unbeweglichen Oberfläche aufgestellt werden. Verwenden Sie den GottaGo keinesfalls auf abschüssigem Untergrund.
6. Der GottaGo ist für ein maximales Körpergewicht des Benutzers von 30 kg ausgelegt. Dieses Gewicht darf nicht überschritten werden.
7. Das Fußbrett keinesfalls zum Abstützen des Kindes beim Umsetzen verwenden.
8. Nehmen Sie keine Modifizierungen am GottaGo vor und verwenden Sie immer nur durch Firefly zugelassene Komponenten für den GottaGo. Andernfalls könnte Ihr Kind gefährdet und Ihre Garantie ungültig werden.
9. GottaGo muss von allen direkten Wärmequellen, einschließlich offenen Flammen, Zigaretten, Elektro- und Gasheizungen ferngehalten werden.
10. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Abschnitt 07 dieses Benutzerhandbuchs.
11. Führen Sie die Wartungsprüfungen in regelmäßigen Abständen durch, damit Ihr Produkt stets in einem guten Zustand bleibt. GottaGo darf bei Defekten jeglicher Art an Teilen nicht benutzt werden.
12. Wir können keine spezifischen Ratschläge für den Transport und die Handhabung geben, da die Umstände nicht in jeder Familie gleich sind. Wenden Sie sich für eine Beratung zu Transport und Handhabung an Ihren Therapeuten.
13. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der GottaGo gefahrlos verwendet werden kann oder bei Defekten an Teilen verwenden Sie das Produkt nicht mehr und kontaktieren Sie den Kundendienst von Firefly unter der Nummer 0800 318265 (GB) oder 1800 626020 (Irland).



Kinder dürfen beim Gebrauch ihres GottaGo Toilettensitzes nie unbeaufsichtigt bleiben, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Lassen Sie beim Entfalten des Rahmens Vorsicht walten, da sich die Hände dabei in der Nähe von beweglichen Teilen befinden.

ABSCHNITT 06: Vorsichtsmaßregeln und Kontraindikationen

Vorsichtsmaßregeln

Der GottaGo ist unter Umständen nicht für Kinder und junge Leute mit folgenden Diagnosen geeignet:

- Feste Deformitäten der Wirbelsäule wie Skoliose oder Kyphose
- Starke Muskelkontrakturen
- Starke Muskel- oder Skelett-Asymmetrie (Unterschiede zwischen der linken und rechten Seite des Körpers), einschließlich Luxation (Ausrenkung) des Hüftgelenks
- Erkrankungen mit fortschreitendem Verlauf und Muskelschwund
- Hohe Gefahr von Knochenbrüchen
- Hohe Gefahr von durch Druck verursachten Verletzungen oder offenen Wunden
- Starke, unkontrollierte Bewegungsmuster
- Kinder, die auf eine perkutane endoskopische Gastrostomie angewiesen sind
- Medizinische Instabilität, einschließlich beeinträchtigter Atemfunktion
- Auf externe, lebenserhaltende

Ausrüstungen wie Sauerstoffflaschen angewiesen

- Lernbehinderungen und/oder Verhaltensprobleme

•

Contraindications

Es gibt keine Kontraindikationen für den GottaGo.

ABSCHNITT 07:

Reinigung und Pflege

Wir empfehlen, dass Sie für die Reinigung des GottaGo nur warmes Wasser und sanfte Reinigungsmittel verwenden. Es dürfen keine Scheuermittel, organischen Lösungsmittel und chemischen Reinigungsmittel verwendet werden.

Der Sicherheitsgurt und die Fußriemen können abgenommen und bei Bedarf mit warmer Seifenlauge gereinigt werden.

Zur Reinigung des Rahmens kann Wasser und Seife oder ein antibakterielles Spray verwendet werden. Verwenden Sie dafür keine Lösungsmittel.

ABSCHNITT 08:

Inspektion und Service des Produkts

Wir empfehlen, vor jedem Gebrauch des GottaGo verschiedene Überprüfungen durchzuführen, um den sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Wir empfehlen die folgenden Überprüfungen:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz richtig mit dem Rahmen verbunden ist, und überprüfen Sie, dass er gesichert und stabil ist,

bevor Sie das Kind darauf setzen.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt und die Fußriemen sicher am Rücken bzw. am Fußbrett befestigt sind.
3. Überprüfen Sie den Sicherheitsgurt und die Fußriemen auf Abnutzung.
4. Überprüfen Sie die Spanngurte auf Risse oder Beschädigung.
5. Überprüfen Sie, dass sich keine Fremdkörper in den Rahmenverbindungen befinden und dass die Verbindungen keine Anzeichen von Abnutzung aufweisen.

Bei Problemen in Bezug auf den Service besuchen Sie bitte die Firefly Website: www.fireflyfriends.com oder kontaktieren Sie Firefly per E-Mail an customer.enquiries@fireflyfriends.com

ABSCHNITT 09:

Wichtige Leitlinien

Vergewissern Sie sich, dass sich der GottaGo auf einer stabilen Oberfläche befindet, bevor Sie das Kind darauf setzen. Um ein Kind auf das Produkt zu setzen und für Anpassungen nach der sicheren Positionierung des Kindes öffnen Sie den Rücken, indem Sie die Spanngurte lockern. Achten Sie dabei aber darauf, dass das Kind immer richtig gesichert ist.

Sorgen Sie dafür, dass der Sicherheitsgurt und die Fußriemen sofort angelegt werden können, wenn ein Kind auf seinen GottaGo gesetzt wird. Bitte lassen Sie Vorsicht walten und passen Sie gut auf Ihr Kind auf, wenn Sie Anpassungen vornehmen, um den Sicherheitsgurt und/oder die Fußriemen zu verstellen.

ABSCHNITT 10:

Neuausgabe der Produkte von Firefly

Wenn Sie Ihren GottaGo Toilettensitz an eine andere Familie weitergeben möchten, wenn Ihr Kind zu groß dafür geworden ist, empfehlen wir eine gründliche Reinigung von Sitz, Rahmen und Rucksack, um die Hygiene zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, dass ein Exemplar des Benutzerhandbuchs mit dem Produkt übergeben wird. Sie können weitere Exemplare von uns anfordern, indem Sie unseren Kundendienst per E-Mail an customer.enquiries@fireflyfriends.com kontaktieren, oder über unsere Website unter www.fireflyfriends.com/gottago.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Produkt von Firefly gefahrlos verwendet werden kann, oder bei Defekten an Teilen verwenden Sie das Produkt nicht mehr und kontaktieren Sie Firefly über den Kundendienst von Leckey per E-Mail an [**customer.enquiries@fireflyfriends.com**](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

Vor der erneuten Zuteilung eines Produkts wird die Desinfektion mit einem der folgenden Verfahren empfohlen:

Hinweis: Entfernen Sie immer zuerst angesammelten Schmutz, bevor Sie das Produkt desinfizieren.

1. Wenn möglich, empfehlen wir, ein automatisiertes „Nebelsystem“ für die Desinfektion zu verwenden, mit dem alle Oberflächen des Produkts mit einem Desinfektionsmittel behandelt werden. Die Anweisungen des Herstellers des gewählten Systems sind vor dem Gebrauch durchzulesen und genau zu beachten.
2. Wenn kein automatisiertes Desinfektionssystem verfügbar ist, sollten alle Oberflächen des Produkts mit desinfizierenden Wischtüchern oder mit einem weichen Tuch, das mit einem flüssigen Desinfektionsmittel getränkt wurde, abgewischt werden. Dafür sind folgende Produkte geeignet: IPA 70 %, Alkohol 70 % oder verdünnte Bleiche. Die Anweisungen des Herstellers für das ausgewählte Produkt sind zu beachten. Die Bespannung und Stoffe des Produkts sollten wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ in diesem Handbuch beschrieben gründlich gereinigt werden.

ABSCHNITT 11: Bedienungsanleitung

11.1 Rahmen des GottaGo entfalten

So sieht der Rahmen Ihres GottaGo nach dem Auspacken aus.

- | | |
|----------|------------|
| 1 Rahmen | 4 Sitz |
| 2 Gurt | 5 Töpfchen |
| 3 Tasche | 6 Fußbrett |




2



3




4

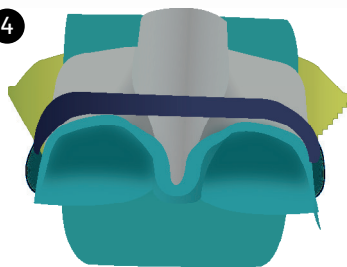


5



6

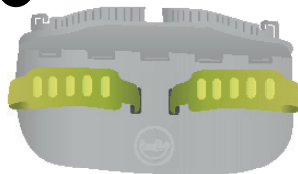

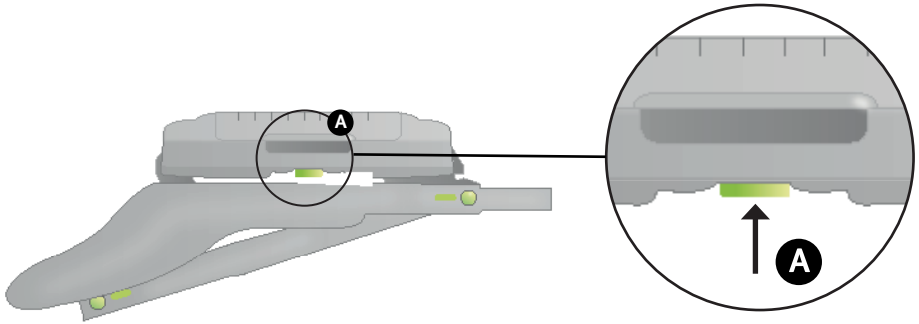

Der GottaGo ist nur für den Gebrauch auf ebenem Untergrund geeignet.

Zum **Entfalten des Rahmens** suchen Sie die Knöpfe **A** an der Unterseite des Rahmens.

Um die Montage zu erleichtern, halten Sie den GottaGo Rahmen von hinten und mit der rechten Seite nach oben (d. h. die Füße sind darunter zusammengeklappt) und drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe **A** um die Füße zu entriegeln. Achten Sie beim Entfalten der Beine darauf, dass sich die Füße auf dem Boden befinden, und nicht in der Luft.

Entfalten Sie die Beine, bis ein Klickgeräusch hörbar ist.

Achten Sie darauf, dass alle vier Beine vollständig auseinander stehen und in ihrer Position verriegelt sind.

Stellen Sie den Rahmen des GottaGo auf einem ebenen Untergrund auf.


11.2 Einstellen des Rahmenhöhe des GottaGo

Der GottaGo verfügt über 3 Höheneinstellungen: Töpfchenhöhe ❶, Höhe von Standard-Toiletten ❷ und Höhe von Behindertentoiletten ❸.




Die Höhe wird durch eine entsprechende **Zahl auf grünem Hintergrund** an jedem Bein angezeigt.

Suchen Sie als nächstes die Knöpfe für die Höhenverstellung an der Innenseite der Beine am Rahmen ❷.

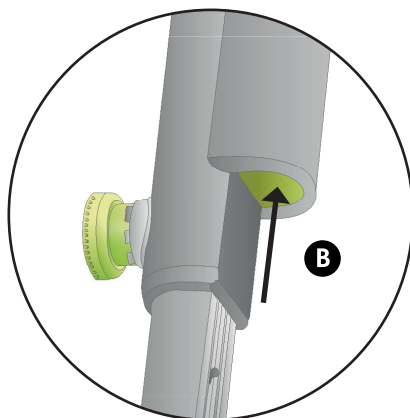


Für die Höhenverstellung des Rahmens sind alle Beine mit einer Sicherheitsverriegelung **A** ausgestattet, die zuerst entriegelt werden muss. Ziehen Sie diesen Sicherungsstift **A** nach außen und drehen Sie ihn dann um eine Vierteldrehung, um die Sicherheitsverriegelung zu entriegeln.

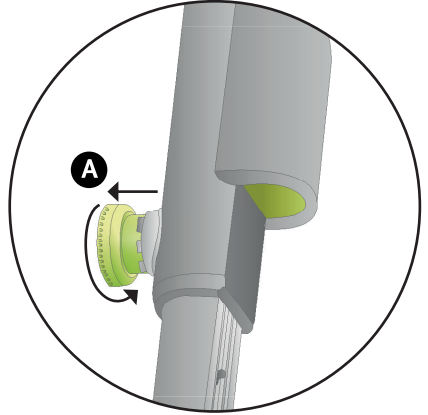


Verstellung auf die Höhe von Standard-Toiletten:

Drücken Sie bei aufrecht gestelltem Rahmen des GottaGo **gleichzeitig** die vorderen Knöpfe **B** und beginnen Sie, den Rahmen des GottaGo vorsichtig nach oben zu ziehen. **Wiederholen** Sie diesen Vorgang mit den hinteren Knöpfen.

Lassen Sie beim Anheben den Knopf wieder los. Dadurch können die Beine auf die Höhe von Standard-Toiletten (2) abgesenkt werden. Sie hören dann ein Klickgeräusch. Wiederholen Sie den Vorgang für die 2 hinteren Beine.

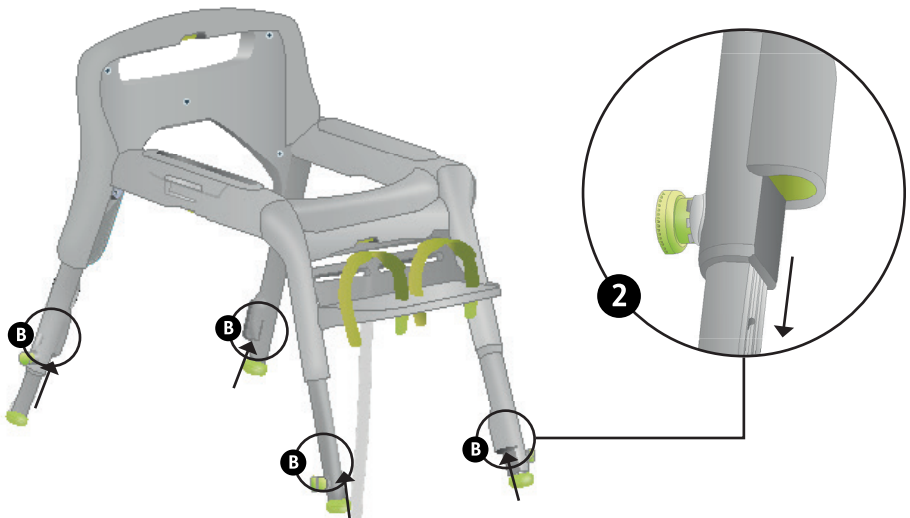

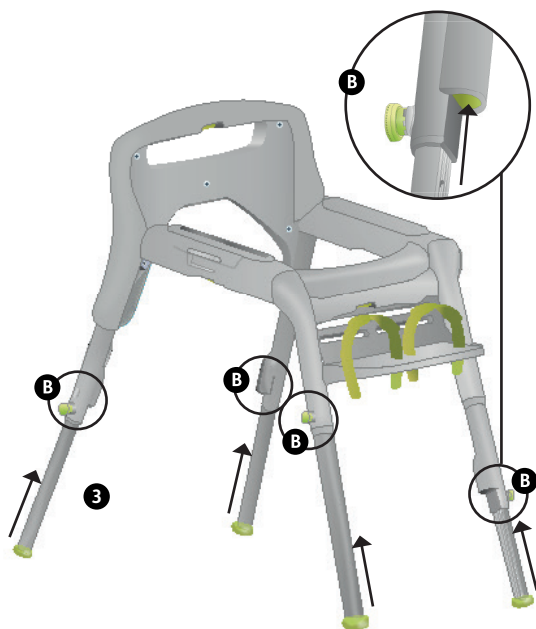

Verstellung auf die Höhe von Behindertentoiletten:

Halten Sie bei aufrecht gestelltem Rahmen des GottaGo **gleichzeitig** die vorderen Knöpfe **B** gedrückt und ziehen Sie den Rahmen des GottaGo vorsichtig nach oben. Dadurch können die Beine auf die ganz ausgefahrne Höhe **3**. ausgefahren werden. Sie hören dann ein Klickgeräusch. Wiederholen Sie den Vorgang für die hinteren Beine.


Vergewissern Sie sich, dass alle Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind. Das erkennen Sie an den **Zahlen auf grünem Hintergrund**.

11.3 Befestigung des Sitzes am Rahmen des GottaGo

Wenn Sie den Rahmen gemäß den Anweisungen in Abschnitt **10:1** und **10:2**, eingerichtet haben, können Sie den Sitz des GottaGo auf den Rahmen setzen. Zuerst müssen die Ratsche **A** und die seitlichen Gurte **B** gesichert werden.

Führen Sie dazu den Spanngurt durch die Ratsche **A**. YDass die Verbindung hergestellt ist, erkennen Sie daran, dass Sie ein Klickgeräusch hören, wenn der Gurt **A** idurch die Ratsche **B**. geschoben wird.


Bringen Sie die Sicherheitsverriegelung wieder in die verriegelte Stellung, indem Sie sie um eine Vierteldrehung drehen und nach innen drücken.

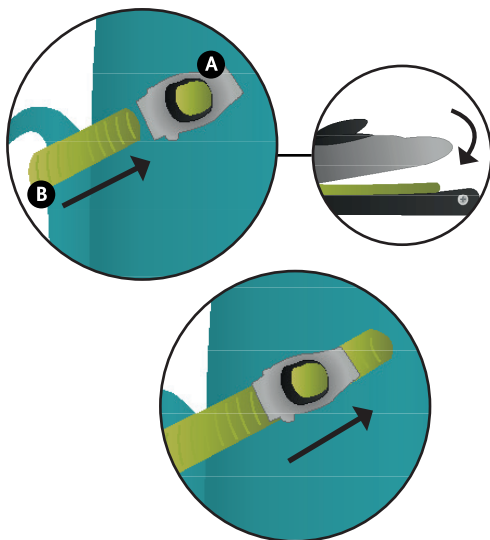





Stellen Sie den Sitz zur Seite, während Sie den Rahmen vorbereiten.

Entriegeln Sie die Rahmenverbindungstücke **C** auf beiden Seiten des grauen Hauptrahmens, indem Sie nach oben ziehen.

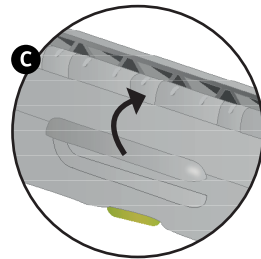

Befestigen Sie den Sitz des GottaGo am Rahmen, indem Sie die Sitzverbindungstücke **D** über der Aufnahme **E** ausrichten. Die Aufnahme **E** weist Kennzeichnungen auf, die die symmetrische Ausrichtung der Sitzverbindungstücke mit dem Rahmen erleichtern. Drücken Sie die Sitzverbindungstücke **D** in die Aufnahme **E** und verriegeln Sie dann die Verbindungsstücke von Sitz und Rahmen **C** indem Sie diese nach unten drücken. Sie hören dann ein Klickgeräusch zur Bestätigung, dass sie verriegelt sind.



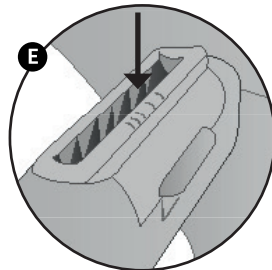
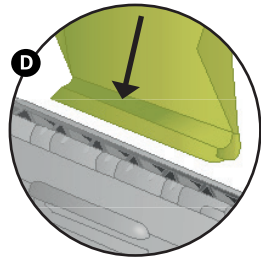


11.4 Befestigung des Fußbretts

Das Fußbrett **A** kann einfach in eine der vier dafür vorgesehenen Positionen am Rahmen **B** eingesteckt werden. Beim Einstecken in den Rahmen wird ein Klickgeräusch hörbar.



Wenn ein Fehler gemacht wurde und die Höhe neu eingestellt werden muss, siehe **section 12.3**. Wenn Sie mit der Höhe des Fußbretts zufrieden sind, betätigen Sie die Sekundärverriegelung. Das muss nur einmal gemacht werden, da der Rahmen mit eingestecktem Fußbrett gefaltet werden kann.

Zur Betätigung der Sekundärverriegelung werden die Verriegelungshaken **C** in die Aufnahmen **D** hinten am Fußbrett eingehängt. Führen Sie die Verriegelungshaken **C** so durch die Aufnahmen **D** dass sich die offene Seite oben befindet **E**.

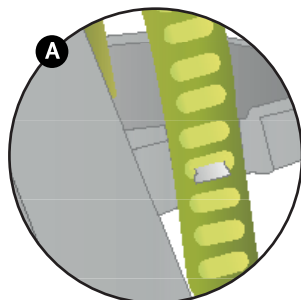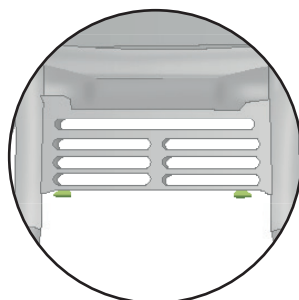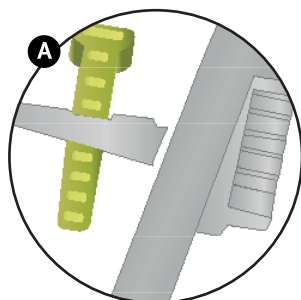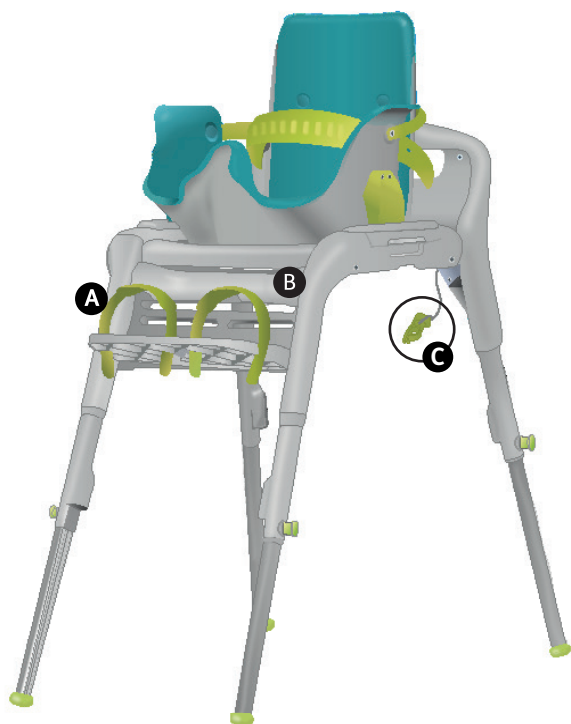


Schlitze zum Einstecken des Fußbretts

Laschen zum Sichern der Fußriemen

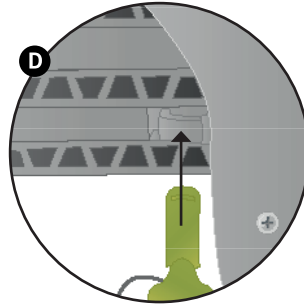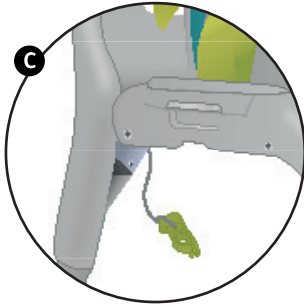



Befestigung der
Sekundärverriegelung

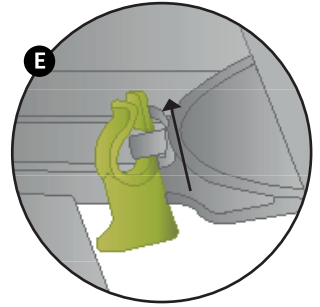

Mit der offenen Seite
nach oben gesichert

11.5 Befestigung des Töpfchens

Das Töpfchen wird zur Befestigung an den Schienen **A** entlang geschoben, bis die Vorderseite des Töpfchens den Spritzschutz am Sitz berührt.

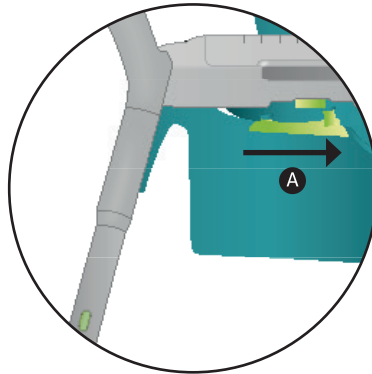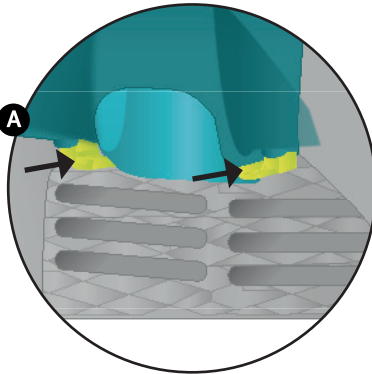

Achten Sie beim Einschieben des Töpfchens darauf, dass Sie es so weit wie möglich hineinschieben, so dass es unmittelbar unter dem Spritzschutz steht. Dadurch wird gewährleistet, dass das Töpfchen in Position gehalten wird und nicht herausrutscht.

ABSCHNITT 12: Einrichten im klinischen Umfeld

12.1 Einstellen der Sitzposition

Nach dem trockenen Probelauf sollte Sie wissen, welche Sitzposition für Ihr Kind geeignet ist. In der optimalen Position befinden sich die Füße hinter oder unter den Knien.

Entriegeln Sie die Sitzverbindungsstücke im Rahmen. Drücken Sie dazu die Seite des Sitzes leicht zum Rahmen hin und heben Sie dann die Verriegelung an. Dadurch wird es einfacher, sich nach vorne zu lehnen.

Verschieben Sie den Sitz entlang der Nut, bis die gewünschte Position erreicht ist und achten Sie darauf, dass der Sitz wieder arretiert wird.



Füße unter den Knien



Füße hinter den Knien




Füße vor den Knien



Verstellen Sie den Sitz nicht, während Ihr Kind darauf sitzt.

12.2 Einstellen der Fußraste


Befestigen Sie das Fußbrett auf einer Höhe, die eine Gewichtsverteilung auf die gesamte Länge des Oberschenkels ermöglicht. Wenn das Fußbrett zu hoch eingestellt ist, kann dadurch zu viel Druck auf das Gesäß ausgeübt werden, was der Entspannung entgegenwirkt.

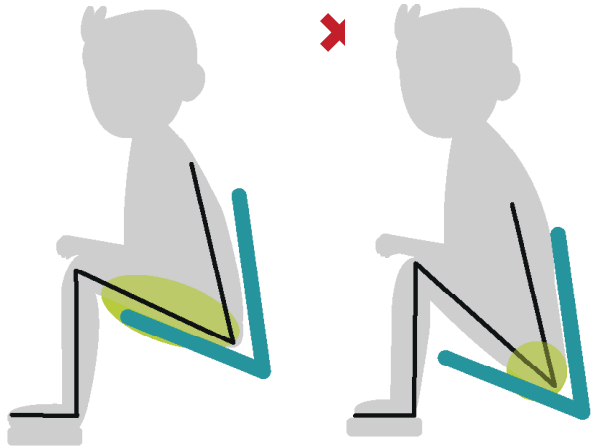


12.3 Einstellen des Rückenwinkels

Die Spanngurte können so eingestellt werden, dass Ihr Kind dazu angeregt wird, sich nach vorne zu lehnen, damit es die Arme auf den Armlehnen oder den Beinen aufstützen kann. Das sorgt für eine natürliche Abstützung des vorderen Oberkörpers und Kopfes. Dies bietet auch eine anatomisch geformte Unterstützung an den Seiten und hinten und trägt zur Entspannung der Darm- und Beckenbodenmuskulatur bei.

Wenn der Rückenwinkel geschlossen wird, kann das zur Reduzierung eines hohen Muskeltonus beitragen. Die Spanngurte können bei Bedarf auch asymmetrisch eingestellt werden.

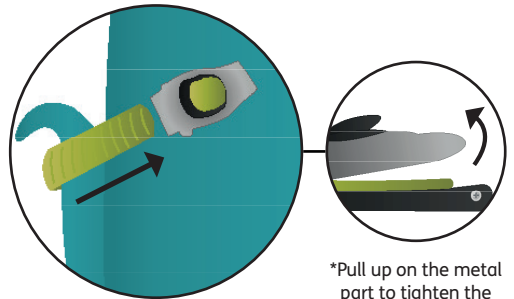

*Pull up on the metal part to tighten the ratchet strap.

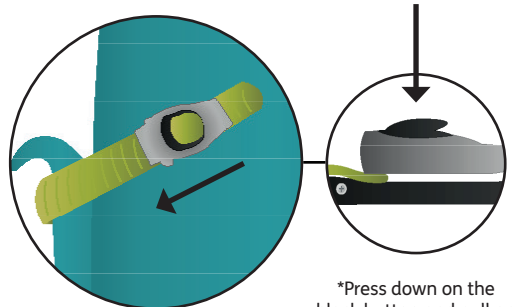


*Press down on the black button and pull on the strap to loosen.

ABSCHNITT 13: Demontage Ihres GottaGo

13.1 Abnehmen des Töpfchens

Wenn das Töpfchen benutzt wurde, schieben Sie es vorsichtig an den Schienen **A** entlang und vom Spritzschutz weg.






Entleeren Sie es und waschen Sie es gründlich aus, bevor Sie das Töpfchen in die Tragetasche geben.

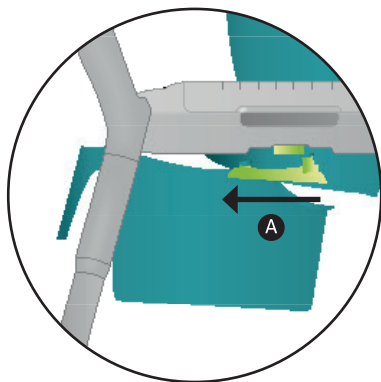

13.2 Abnehmen des Sitzes

Entriegeln Sie die Sitzverbinder im Rahmen **A**. Drücken Sie dazu die Seite des Sitzes leicht zum Rahmen hin und heben Sie dann die Verriegelung **B** an.


Lösen Sie die Spanngurte **C** indem Sie den Entriegelungsknopf **D** drücken und den Gurt aus der Ratsche herausziehen. Falten Sie die Seiten des Sitzes nach innen und dann den Rücken darauf. Verwenden Sie den Sitzgurt, um ihn in dieser Position zu halten.

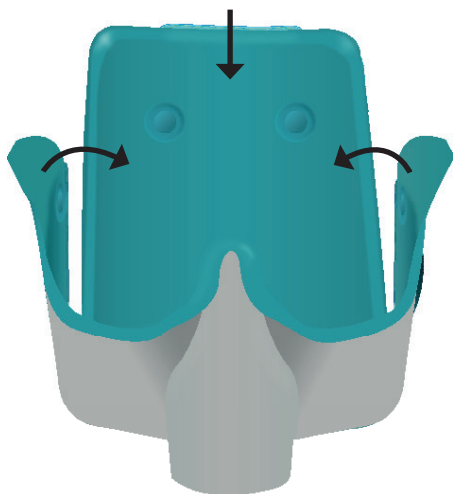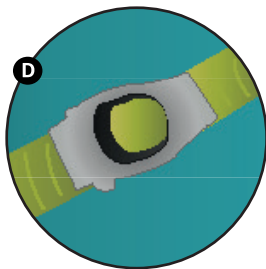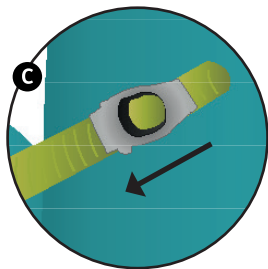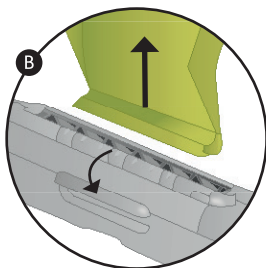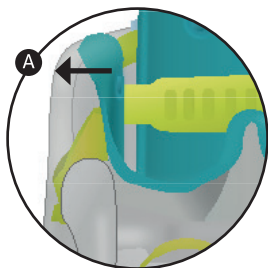

13.3 Abnehmen des Fußbretts

Achten Sie beim Abnehmen des Fußbretts darauf, dass die Verriegelungshaken **A** ausgehängt sind.

Drücken Sie mit dem Daumen auf die Arretierungen **B** auf beiden Seiten des Fußbretts und ziehen Sie es aus dem Schlitz heraus.

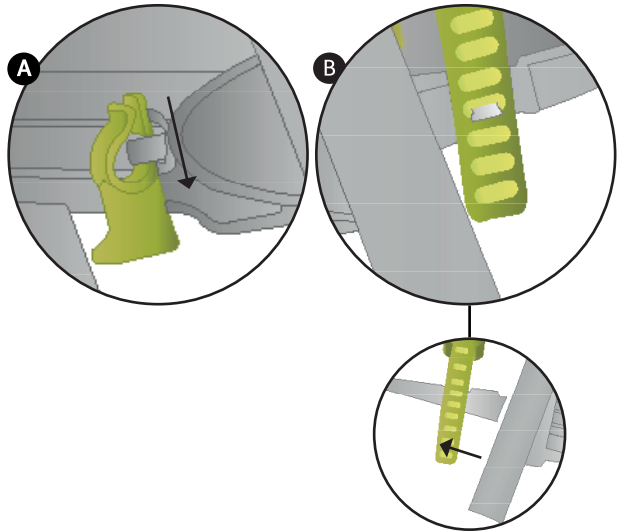


13.4 Falten des Rahmens

Lösen Sie die Sicherheitsverriegelung **A** aus der arretierten Position und drücken Sie den Knopf **B** an der Innenseite der Beine, um zur untersten Höheneinstellung zurückzukehren, in der er gefaltet werden kann.

Achten Sie vor dem Zusammenklappen darauf, dass der GottaGo auf dem Boden steht und die Beine vollständig auseinander stehen. Drücken Sie dann die Knöpfe an der Unterseite des Rahmens **C** ein. Heben Sie den Rahmen an und klappen ihn zusammen.

Falten Sie zuerst die hinteren Beine wie in der Abbildung gezeigt und dann die vorderen Beine, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

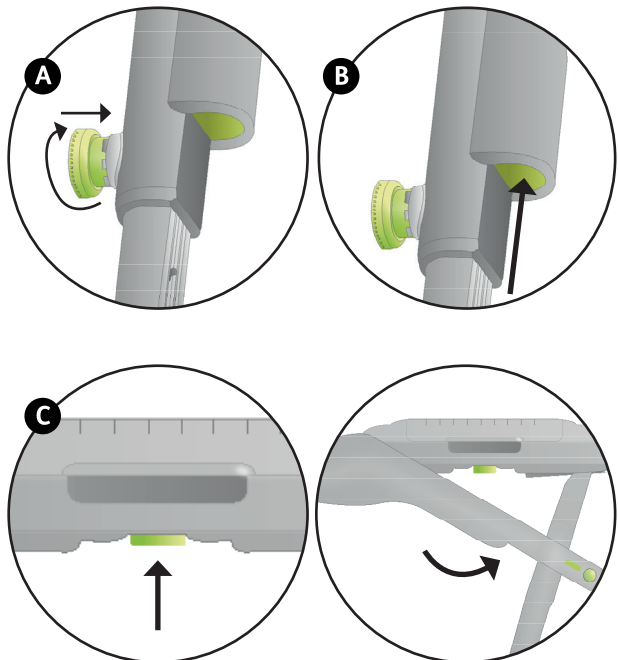

13.5 Bepacken des Rucksacks

Nehmen Sie den gefalteten Rahmen **A** halten Sie ihn am Rahmengriff fest und schieben Sie ihn in den Rucksack.

Nehmen Sie die Tragetasche **B** amit dem Töpfchen und legen Sie sie unten in den Rucksack. Es passt in den Zwischenraum zwischen den Rahmenbeinen.

Wenn das Fußbrett **C** abgenommen wird, schieben Sie es in den freien Platz hinter dem Rahmen. Nehmen Sie den gefalteten Sitz **D** und legen Sie ihn in den freien Platz im Rucksack.





SECTION 14: Technische Daten

Seat

	Größe 1	Größe 2
Alter	2-5 years	4-9 years
Hüftbreite	22.5cm	27 cm
Mindesttiefe des Sitzes*	22 cm	29 cm
Neigungswinkel des Rückens (nach vorne)	8°	25°
Oberschenkelwinkel (von der Waagrechten)	40°	40°
Rückenhöhe	24cm	36cm
Gewicht (Sitz und Rahmen)	5.8 kg	6.1 kg

Rahmen

Größe des gefalteten Rahmens	49 x 57 x 19 cm
Standfläche des Rahmens	52 x 72cm (at maximum height)
Standfläche des Rahmens	40cm
Maximales Körpergewicht des Benutzers	30 kg
Höhe (niedrigster Teil des Sitzes)	1 – 30cm 2 – 46cm 3 – 53cm

*Bei der Bemessung für Jungen wird empfohlen, die größere Größe zu wählen, vorausgesetzt, sie erfüllen die Anforderungen an die Mindestmaße für die Sitztiefe

GottaGo Überprüfung

Erstattungsfähige Hilfsmittel nach § 139 SGB V

Messung	Größe 1	Größe 2
Empfohlene Körpergröße:	46 cm	46 cm
Abmessungen (Länge / Breite /Höhe):	68,6 cm (L) 52 cm (B) 75,8 cm (H)	68,6 cm (L) 52 cm (B) 87,3 cm (H)
Sitzbreite:	22,5 cm (Hüftbreite)	27 cm (Hüftbreite)
Sitztiefe:	22 cm	29 cm
Sitzhöhe:	46 cm	50,5 cm
Sitzneigung:	40° (zurück) bis *	40 ° (zurück) bis *
Höhe Rückenlehne:	24 cm	36 cm
Breite Rückenlehne:	19,5 cm	24,5 cm
Innere Öffnung:	23 cm (B) x 21,5 cm (T)	29 cm (B) x 27 cm (T)
Rückenwinkel:	25° *	25° *
Rückenlehnenverstellung:	25° nach hinten (bis) 8° (nach vorne) *	25° nach hinten (bis) 25° (nach vorne) *
Höhe Armlehnen:	19,5 cm	24 cm
Breite zwischen den Armlehnen:	23 cm	29 cm
Gewicht:	5,8 kg	6,1 kg
Max. Belastbarkeit:	30 kg	30 kg
Materialien:	Überwiegend: Sitz - PP+TPE / Rahmen - PA66 - Nylon +30%GF. Für weitere Informationen siehe Liste der Produktmaterialien in der nachfolgenden Tabelle.	

Meine Interpretationen der Maßanfragen (02.09.2021):

Empfohlene Höhe – Wir empfehlen, den Gotta Go in der Standard-WC-Höheneinstellung zu verwenden. (niedrigster Punkt des Sitzes – Freiraum)

Abmessungen – Kompletter Sitzrahmen im ausgeklappten Zustand in der Standardhöhe

Sitzhöhe – Ausgehend vom Boden bis zur Innenseite der Standard-Höheneinstellung

Sitzneigung – Ausgehend, dass das die Sitzrampe ist, Oberschenkelwinkel (nicht horizontal)

Innere Öffnung – Öffnung (B) Breite an der Armlehne und (T) Sitztiefe zwischen Rückenlehne und Spritzschutz.

Rückenlehnenverstellung – Unter der Annahme, dass „nach hinten“ als Neigung und „nach vorne“ als Neigung gilt

***HINWEIS** – Gemessene Winkelmaße können aufgrund der flexiblen Beschaffenheit der Sitzstruktur und der ihr innewohnenden Materialien zwischen belastetem und unbelastetem Sitz variieren.

Komponente	Korrosions- beständigkeit	Material	Lange Beschreibung
SITZ			
Sitzformteil	Ja	PP + TPE	Polypropylen (Außenseite) & TPE Thermoplastisches Elastomer (Innenseite)
Ratschenteil und Gurt	Ja	316 Edelstahl + POM	316 Edelstahl und Polyoxymethylen (Acetal)
Sitz-Metallverschlüsse	Ja	316 SS	316 Edelstahl
Sitzverbindungselemente	Ja	PA66 + 304 SS	Nylon & 304 Edelstahl
Sitzband	Ja	TPE	Thermoplastisches Elastomer
RAHMEN			
Hauptrahmenformteile	Ja	PA6 +30% GF	Nylon mit 30% Glasfüllung
Untere Beine	Ja	ALU 6063 T6	Natürlich eloxiertes Aluminium
Buchsenfuß	Ja	Silikon	Latexfreies Silikon
Drehzapfen	Ja	316 SS	316 Edelstahl
Rahmen-Metallverschlüsse	Ja	304 SS	304 Edelstahl
Knöchel- und Beckengurte	Ja	TPU	Thermoplastisches Polyurethan
Töpfchen	Ja	PP	Polypropylen
Tasche	Ja	PolJater	PolJater

Achten Sie beim Einschieben des Töpfchens darauf, dass Sie es so weit wie möglich hineinschieben, so dass es unmittelbar unter dem Spritzschutz steht. Dadurch wird gewährleistet, dass das Töpfchen in Position gehalten wird und nicht herausrutscht.

Tabelle der Symbole

Symbol	Bezeichnung
	Medizingerät
	Bedienungsanleitung lesen
	CE-Kennzeichnung
	UKCA-Kennzeichnung
	Warnung
	Nicht im Haushaltsmüll entsorgen
	Temperaturbereich
	Luftfeuchtigkeitsbereich
	Hersteller
	Modellnummer
	Seriennummer:
	Max. Körpergewicht des Benutzers
	Adresse des Importeurs
	Adresse des Bevollmächtigten für die Schweiz

Notes

[illegible]



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera



Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch



USA Distributor

Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727

T: 1-800-333-4000
F: 1-800-300-7502
E: customseating@sunmed.com

sunrisemedical.com

Canadian Distributor

Sunrise Medical
237 Romina Drive, Unit 3,
Concord, ON, L4K 4V3

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

sunrisemedical.ca

Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



fireflyfriends.com

