



GottaGo

Manuel d'utilisation



La liberté en famille

Français

Le Firefly GottaGo est un siège portable léger conçu pour améliorer la vie des enfants en leur permettant d'utiliser les toilettes de manière indépendante. Il s'agit d'un siège sûr capable de soutenir le corps, pour une utilisation à la maison et à l'extérieur.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre GottaGo. Vous trouverez également toutes les instructions sur notre site **Web www.fireflyfriends.com/gottago** ainsi que des vidéos, des schémas et foire aux questions.

Sommaire

- 01 Utilisation prévue
 - 02 Certification
 - 03 Avertissements et mises en garde
 - 04 Conditions de garantie
 - 05 Information de sécurité
 - 06 Précautions et contre-indications
 - 07 Informations sur le nettoyage et l'entretien
 - 08 Inspection et entretien du produit
 - 09 Directives importantes
 - 10 Transfert du produit Firefly
 - 11 Manuel d'utilisation
 - 12 Installation clinique
 - 13 Démontage et emballage du siège de toilette
 - 14 Spécifications techniques
-

SECTION 01: Usage prévu

Usage prévu

Le siège de toilette GottaGo est destiné à fournir un soutien postural aux enfants handicapés afin de faciliter l'utilisation des toilettes.

Le GottaGo est un siège de toilette portable destiné à faciliter l'utilisation des toilettes à la maison et à l'extérieur.

Indications d'utilisation

Nous recommandons qu'un adulte inspecte le produit conformément à la section 08 de ce manuel d'utilisation pour garantir la sécurité du produit.

Le siège de toilette GottaGo est indiqué pour une utilisation dans un environnement de salle de bain à surface plane. Le siège est destiné à fournir un soutien postural aux enfants ayant diverses déficiences qui affectent leur capacité à s'asseoir sans soutien. Les utilisateurs peuvent inclure, entre autres, les enfants non ambulateurs présentant un trouble neuromusculaire, congénital ou chromosomique, une lésion de la moelle épinière ou un retard de développement global. GottaGo est conçu pour les enfants âgés d'environ 2 à 9 ans, d'un poids maximal de 30 kg (66 lb).



Les enfants ne doivent à aucun moment être laissés sans surveillance sur leur siège de toilette GottaGo, car ils risquent de se blesser.

SECTION 02: Certification

Le GottaGo est classé comme un dispositif médical de classe I en vertu des réglementations de l'UE et du Royaume-Uni. En tant que fabricant, James Leckey Design Limited déclare que ce produit est conforme au règlement sur les dispositifs médicaux (2017/745), au règlement britannique sur les dispositifs médicaux de 2002, à la directive sur les dispositifs médicaux (93/42 CEE) et à la norme EN 12182:2012 sur les produits d'assistance pour personnes handicapées, aux exigences générales et aux méthodes d'essai.



Remarque : Conseil d'utilisation. Le non-respect des présentes instructions peut causer des blessures physiques, l'endommagement du matériel ou la dégradation de l'environnement.

Remarque : Les enfants doivent porter la ceinture de sécurité en permanence lorsqu'ils sont assis dans le GottaGo.

SECTION 03:

Avertissements et mises en garde

Mise en garde - Contrôles quotidiens :

- Le GottaGo doit être vérifié quotidiennement avant toute utilisation pour s'assurer que toutes les sangles et tous les éléments de siège sont attachés solidement.
- Lisez toujours les instructions attentivement avant toute utilisation.
- Procédez toujours à une inspection visuelle du produit avant toute utilisation. En cas de doute, **ARRÊTEZ TOUTE UTILISATION**. Si vous soupçonnez ou savez que le produit ou une pièce est défectueux, **ARRÊTEZ TOUTE UTILISATION**. Contactez notre service client ou notre revendeur local dès que possible.
- Vérifiez toujours que le repose-pieds est bien fixé.
- Le soignant ne doit toucher aucune articulation ni aucun pivot mobile qui n'est pas verrouillé.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace tout autour du produit pour y accéder. Il est déconseillé de déplacer l'utilisateur lorsqu'il est assis ou de régler le GottaGo lorsque l'utilisateur est assis.

- Avant de placer l'utilisateur sur le produit, assurez-vous que le produit est configuré selon les besoins de l'utilisateur et vérifiez sa stabilité.
- Lors de l'assemblage ou du réglage de la position des composants du siège de toilette, veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- Assurez-vous que les quatre pieds sont entièrement verrouillés avant d'installer le produit sur l'utilisateur.
- Ne déplacez ou ne soulevez jamais le GottaGo lorsque l'enfant est dessus.

Lorsque l'on assoit l'utilisateur pour la première fois.

- Le transfert de l'utilisateur dans et hors du produit doit être effectué avec l'équipement approprié et le personnel adéquat.
- Si l'utilisateur présente une forme quelconque de détresse, il faut le retirer du produit aussi rapidement que possible en toute sécurité.

Mise en garde - Danger de pincement des doigts :

- Lors de l'assemblage ou du réglage de la position des composants du siège faites attention à ne pas vous pincer les doigts lors du positionnement des composants du siège et du serrage des fixations. En raison de la nature flexible du contour du siège de toilette GottaGo, veuillez être conscient

des risques de pincement des doigts autour des zones entre le siège et le cadre lorsque l'utilisateur est assis et actif.

Avertissement - Risque de renversement :

- Toujours attacher la ceinture de sécurité dès que l'utilisateur est assis dans le GottaGo.
- N'utilisez jamais le GottaGo sur un terrain accidenté.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance lorsqu'il est assis sur le produit.
- Toujours vérifier que le repose-pieds est bien fixé avant de transférer l'utilisateur dans le siège et que les sangles de soutien des pieds de l'utilisateur sont utilisées après la mise en place de la ceinture de sécurité.
- Avertissement –Risque de pincement des doigts : Veillez à ce que les doigts de l'opérateur ou des enfants à proximité ne soient pas coincés dans les espaces entre le siège et le cadre.
- Avertissement - Sécurité des occupants : Assurez-vous que tous les harnais de l'occupant et en particulier les sangles de sécurité pour les pieds sont fixés et ajustés pour maintenir l'occupant fermement en place avant d'utiliser les toilettes. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance lorsqu'il est assis sur le GottaGo.

Entretien général

Mise en garde - Nettoyage :

- Nettoyez le GottaGo régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté sur les éléments du siège et le cadre. La saleté accumulée peut engendrer une usure prématurée des pièces moulées du siège et encourager la formation de corrosion sur le cadre. Utilisez uniquement des nettoyeurs ménagers non abrasifs et des chiffons humides.

Mise en garde - Nettoyage au tuyau/à haute pression :

- N'utilisez pas de tuyaux ou de dispositifs de lavage sous pression sur le cadre, le cadre n'est pas étanche à l'eau courante et peut être endommagé par l'eau.

Mise en garde - Rangement :

- Le produit doit être conservé à l'écart de toutes les sources directes de chaleur, y compris les flammes nues, les cigarettes, les appareils de chauffage électriques et au gaz.

Mise en garde - Mise en service:

- Lorsque vous sortez le GottaGo de son espace de rangement, laissez-le d'abord s'acclimater à la température ambiante. Essayez toute humidité qui s'est condensée sur le produit.
- Mise en garde – recyclage : Pour mettre le GottaGo au rebut,

rendez-vous impérativement dans une déchetterie et jetez-le dans la bonne catégorie de recyclage.

- Nettoyage supplémentaire des composants métalliques et plastiques
- Vous pouvez utiliser du savon et de l'eau ou un spray antibactérien pour le nettoyage quotidien.
- N'utilisez pas de solvants pour nettoyer les composants en plastique ou en métal.
- Assurez-vous toujours que le produit est sec avant utilisation.

SECTION 04: Conditions de garantie

La garantie du GottaGo s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé conformément à son utilisation prévue et à toutes les spécifications du fabricant. Une garantie d'un an est fournie avec ce produit fabriqué par James Leckey Design Ltd.

Les marchandises peuvent nous être retournées pour une garantie, une réparation ou un remplacement jusqu'à 12 mois après réception. Une fois que vous nous aurez contactés, nous organiserons la collecte des marchandises à nos frais et, une fois retournées dans nos locaux, nous réparerons ou remplacerons les marchandises et nous vous les retournerons sous 14 jours. Dans tous les cas, il incombe au client

de s'assurer que les marchandises retournées sont correctement emballées, de préférence dans l'emballage d'origine.

SECTION 05: Informations relatives à la sécurité

1. Lisez toujours attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.
2. Les enfants ne doivent à aucun moment être laissés sans surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. Avant toute utilisation, vérifiez que tous les composants GottaGo sont assemblés en toute sécurité conformément aux instructions d'utilisation.
4. Veuillez vous assurer que la ceinture de sécurité et les sangles pour les pieds sont utilisées en permanence.
5. GottaGo doit être placé sur une surface sèche, solide et stable. N'utilisez jamais GottaGo sur une surface inclinée.
6. Le poids maximal autorisé sur le dispositif GottaGo est de 30 kg (66 lb). Cela ne doit jamais être dépassé.
7. N'utilisez jamais le repose-pieds pour soutenir l'enfant pendant les transferts.

8. Ne modifiez pas GottaGo ou n'utilisez jamais de composants autres que les composants approuvés par Firefly sur le GottaGo à quelque moment que ce soit. Cela peut mettre votre enfant en danger et également invalider votre garantie.
9. GottaGo doit être conservé à l'écart de toutes les sources directes de chaleur, y compris les flammes, les cigarettes, les appareils de chauffage électriques et au gaz.
10. Nettoyez régulièrement le produit conformément à la section 07 de ce manuel d'utilisation.
11. Effectuez régulièrement des vérifications d'entretien pour vous assurer que votre produit est en bon état de fonctionnement. GottaGo ne doit pas être utilisé si l'une des pièces est défectueuse.
12. Il ne nous est pas possible de fournir des conseils spécialisés en matière de transfert et de manutention, car les circonstances varieront pour chaque famille. Pour obtenir des conseils sur le transfert et la manutention, consultez votre thérapeute.
13. Si vous avez des doutes quant à l'utilisation sûre de GottaGo ou si des pièces deviennent défectueuses, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit et contacter le service clientèle de Firefly au Royaume-Uni au 0800 318265 ou au 1800 626020 pour l'Irlande.



Les enfants ne doivent à aucun moment être laissés sans surveillance sur leur siège de toilette GottaGo, car ils risquent de se blesser. Des précautions doivent être prises lors du dépliage du cadre, car vos mains sont à proximité immédiate des pièces

SECTION 06: Précautions et contre- indications

Précautions

Il est possible que le GottaGo ne soit pas adapté aux enfants et aux jeunes gens présentant les troubles suivants :

- Déformations rachidiennes telles que scoliose ou cyphose
- Contractures musculaires graves
- Asymétrie musculaire ou squelettique sévère (différences entre les côtés gauche et droit du corps), y compris luxation de la hanche
- Affections évolutives et perte musculaire
- Risque élevé de fractures osseuses
- Risque élevé de blessures liées à la pression ou plaies ouvertes

- Mouvements violents et incontrôlés
- Enfants dépendant d'une gastrostomie percutanée endoscopique .
- Instabilité médicale comprenant une fonction respiratoire altérée
- Enfants dépendant d'appareils de survie tiers tels que des réservoirs d'oxygène
- Troubles d'apprentissage et/ou problèmes de comportement
-

Contre-indications

Aucune contre-indication n'est associée au GottaGo.

SECTION 07: Informations sur le nettoyage et l'entretien

Lorsque vous nettoyez GottaGo, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau chaude et des détergents non abrasifs, et de ne jamais utiliser de solvants organiques ou de liquides de nettoyage à sec.

La ceinture de sécurité et les sangles de soutien des pieds peuvent être retirées et nettoyées à l'eau chaude savonneuse si nécessaire

De l'eau et du savon ou un spray antibactérien peuvent être utilisés pour nettoyer le cadre, n'utilisez pas de solvants lors du nettoyage du cadre.

SECTION 08: Inspection et entretien du produit

Nous recommandons d'effectuer diverses vérifications de GottaGo avant chaque utilisation pour confirmer que le produit est sûr. Les vérifications recommandées sont répertoriées ci-dessous :

1. Assurez-vous que le siège est connecté au cadre correctement et vérifiez qu'il est stable et sécurisé avant d'y placer l'enfant.
2. Assurez-vous que la ceinture de sécurité et les sangles de cheville sont solidement fixées au dossier du siège et au repose-pieds, respectivement.
3. Vérifiez l'usure de la ceinture de sécurité et des sangles de cheville.
4. Vérifiez que les sangles d'encliquetage ne présentent pas de fissures ou de dommages.
5. Vérifiez que les connexions du cadre sont exemptes de débris et ne présentent aucun signe d'usure.

Pour tous les problèmes liés à l'entretien, reportez-vous au site Web de Firefly : www.fireflyfriends.com ou contactez Firefly à l'adresse customer.enquiries@fireflyfriends.com

SECTION 09:

Directives importantes

Assurez-vous que GottaGo se trouve sur une surface stable avant de transférer un enfant sur le produit. Ouvrez le dossier en desserrant les sangles d'encliquetage tout en veillant à ce qu'elles restent attachées solidement, placez l'enfant dans le produit et effectuez les réglages nécessaires une fois qu'elles sont bien positionnées.

Assurez-vous que la ceinture de sécurité et les sangles de cheville sont prêtes à être réglées dès qu'un enfant est placé dans son GottaGo. Veuillez faire preuve de prudence et surveiller votre enfant de près pendant les réglages pour ajuster la ceinture de sécurité et/ou les sangles de cheville.

SECTION 10:

Transfert du produit Firefly

Si vous souhaitez transférer votre siège de toilette GottaGo à une autre famille une fois que votre enfant ne pourra plus s'en servir, nous vous conseillons de nettoyer soigneusement le siège,

le cadre et le sac à dos pour des raisons d'hygiène personnelle.

Assurez-vous qu'une copie du manuel d'utilisation est fournie avec le produit. Une copie vous sera fournie sur demande auprès de notre service clientèle à customer.enquiries@fireflyfriends.com ou sur notre site Web à www.fireflyfriends.com/gottago.

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation sûre et continue de votre produit Firefly ou si des pièces deviennent défectueuses, veuillez cesser d'utiliser le produit et contacter le service clientèle Firefly de Leckey à l'adresse [**customer.enquiries@fireflyfriends.com**](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

Avant de remettre un produit en service, il est recommandé de le désinfecter en suivant l'une des procédures suivantes :

Remarque : Toujours nettoyer le produit en premier pour éliminer les salissures accumulées avant de le désinfecter/stériliser.

1. Dans la mesure du possible, nous recommandons l'utilisation d'un système automatisé de désinfection par brouillard qui est utilisé pour recouvrir complètement les surfaces du produit avec un agent désinfectant. Il est indispensable de consulter les instructions du fabricant concernant le système choisi avant toute utilisation et de les suivre à la lettre.
2. Lorsqu'aucun système de désinfection automatisé n'est disponible, toutes les surfaces du



produit doivent être essuyées avec des lingettes désinfectantes ou un chiffon doux imbibé d'un désinfectant liquide. Les produits appropriés sont de l'IPA à 70 %, de l'alcool à 70 % ou de l'eau de Javel diluée. Il est indispensable de suivre les instructions du fabricant concernant le produit choisi. Le rembourrage et les tissus du produit doivent être soigneusement nettoyés conformément à la section « Informations sur le nettoyage et l'entretien » de ce manuel.


SECTION 11: Manuel d'utilisation

11.1 Dépliage du cadre GottaGo

Le cadre de votre GottaGo ressemblera à ceci à sa sortie de la boîte.

- | | |
|-----------|-----------|
| 1 Châssis | 4 Siège |
| 2 Sangle | 5 Pot |
| 3 Sac | 6 Palette |

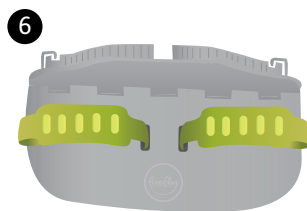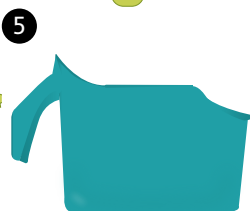

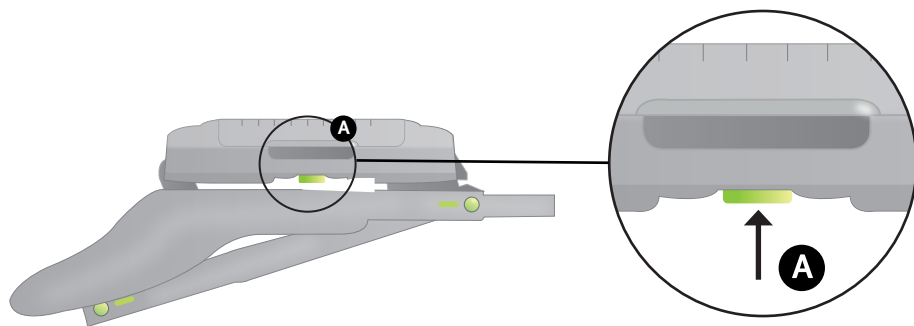

Le GottaGo est conçu pour être utilisé uniquement sur un sol plat.

Pour déplier le cadre, repérer les boutons **A** sur la partie inférieure du cadre.

Pour faciliter le montage, tenir le cadre GottaGo par l'arrière et le côté droit vers le haut (les pieds étant repliés en dessous) et appuyez simultanément sur les boutons **A** pour les pieds.

Lorsque vous dépliez les pieds, assurez-vous que qu'ils reposent bien sur le sol.


Dépliez les pieds jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Vérifiez que les quatre montants sont complètement écartés et verrouillés en position.

Posez le cadre GottaGo sur une surface plane.


11.2 Réglage de la hauteur du cadre GottaGo

Le GottaGo dispose de 3 réglages de la hauteur : hauteur d'un pot ❶, hauteur de toilettes standard ❷ et hauteur de toilettes pour personnes handicapées ❸.

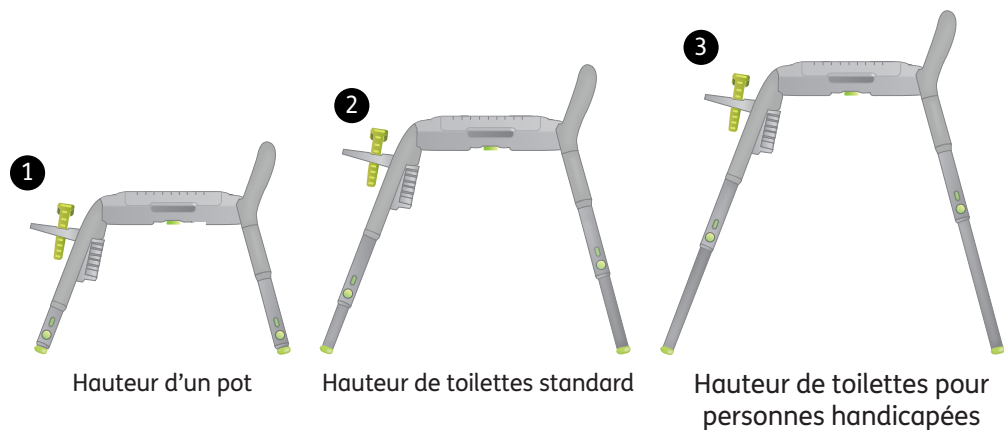


La hauteur est indiquée par des **indicateurs numérotés en vert** sur chacun des pieds.

Ensuite, repérer les boutons-poussoirs de réglage de la hauteur à l'intérieur de chacun des pieds du cadre **B**.

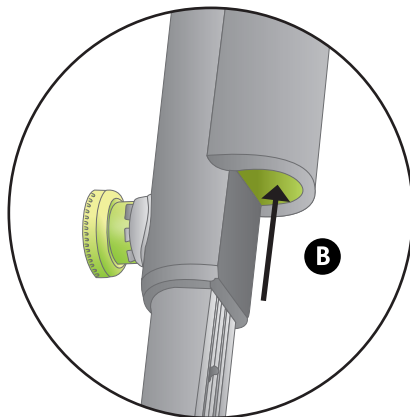


Pour régler la hauteur du cadre, chaque pied est doté d'un verrou de sécurité **A** qui doit être désengagé en premier. Tirez sur cette goupille de verrouillage **A** puis faites-la pivoter d'un quart de tour pour libérer le verrou de sécurité.

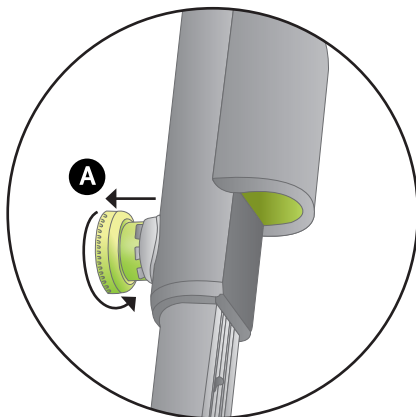


Pour un réglage à la hauteur standard :

Lorsque le cadre GottaGo est en position verticale, appuyez **simultanément** sur les boutons avant **B** et commencez doucement à soulever le cadre du GottaGo vers le haut. **Répétez** ce mouvement avec les boutons arrière.

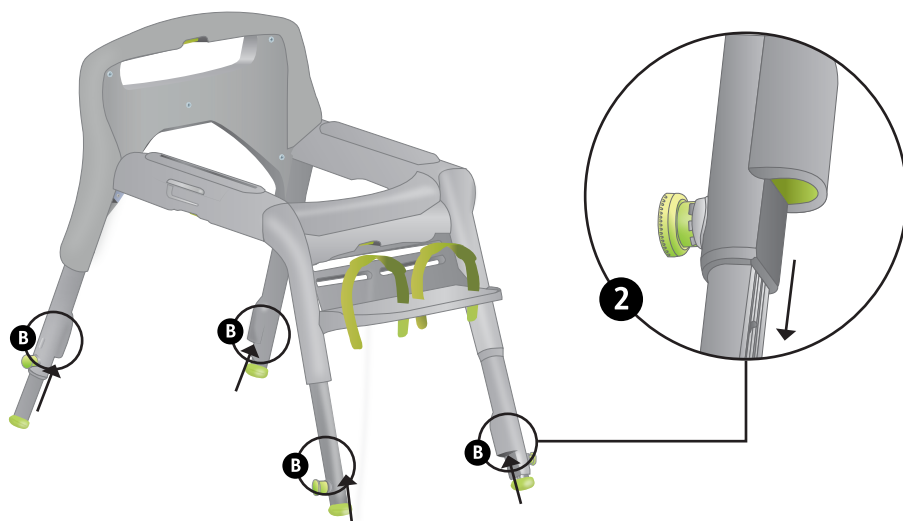

Lorsque vous soulevez, **relâchez le bouton**. Cela permettra aux pieds de descendre jusqu'à la hauteur standard **2**. Vous entendrez un clic audible. Répétez l'opération pour les 2 pieds arrière

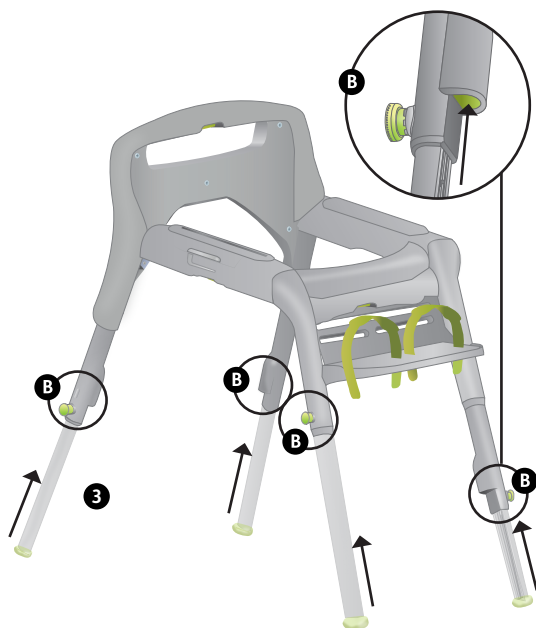

Pour un réglage à la hauteur des toilettes pour personnes handicapées :

Lorsque le cadre GottaGo est en position verticale, **maintenez** les boutons avant **B** enfoncés simultanément et commencez doucement à soulever le cadre du GottaGo vers le haut. Cela permettra aux pieds de descendre jusqu'à la hauteur la plus grande **3**. Vous entendrez un clic audible. Répétez cette opération pour les pieds arrière.


Assurez-vous que chacun des pieds est réglé au même niveau. Vous pouvez le vérifier à l'aide des **indicateurs numérotés en vert**.

Remettez le verrou de sécurité en position enclenchée en le faisant pivoter d'un quart de tour et en le poussant vers l'intérieur.

11.3 Fixation du siège GottaGo sur le cadre

Lorsque votre cadre est configuré conformément aux instructions énoncées aux sections **10:1** et **10:2**, vous pouvez placer le siège GottaGo sur le cadre. Le cliquet **A** and side straps **B** firstly need to be secured.




Pour cela, faire passer la sangle à cliquet dans le cliquet **A**. Vous saurez que ces éléments sont connectés lorsque vous entendrez des clics audibles au moment où la sangle **A** passera à travers le cliquet **B**.

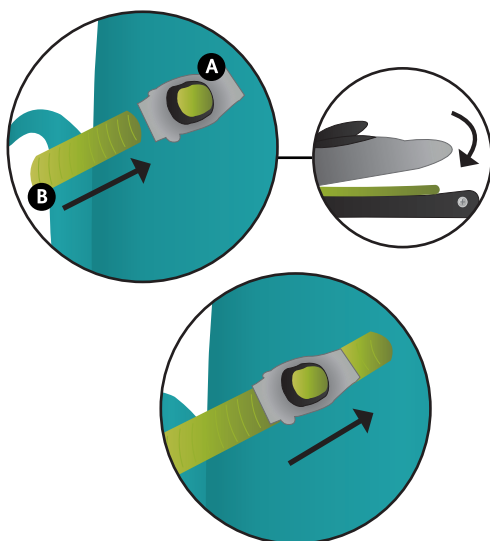



Mettez le siège de côté pendant que vous préparez le cadre.

Sur le cadre gris principal, déverrouillez les connecteurs de cadre **C** de chaque côté en tirant vers le haut.

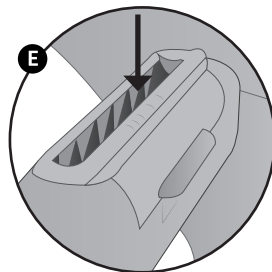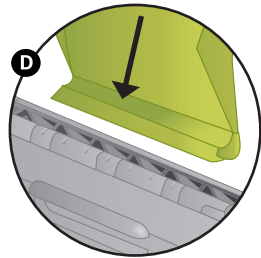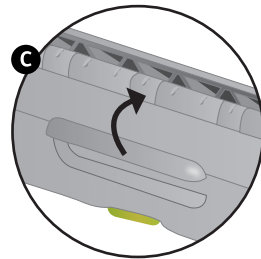





Attachez le siège GottaGo sur le cadre en alignant les connecteurs de siège **D** sur la rainure de réception **E**. La rainure **E** dispose d'indicateurs visuels qui vous aideront à aligner les connecteurs de siège sur le cadre de manière symétrique. Poussez les connecteurs de siège **D** dans la rainure de réception **E** puis verrouillez le siège en place sur les connecteurs de cadre **C** en les poussant vers le bas. Vous entendrez un petit clic indiquant qu'ils sont bien enclenchés.

11.4 Fixation du repose-pieds

Le repose-pieds **A** peut être attaché en se glissant facilement dans l'une des quatre positions désignées sur le cadre **B**. Vous entendrez un clic lorsque vous l'introduirez dans le cadre.



En cas d'erreur et si la hauteur doit être réajustée, reportez-vous à la section 12.3. Lorsque vous êtes satisfait(e) de la hauteur du repose-pieds, engagez les verrous secondaires. Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois, car le cadre pourra se replier avec le repose-pieds attaché.

Pour engager les verrous secondaires, attachez les crochets de verrouillage **C** aux récepteurs **D** à l'arrière du repose-pieds. Insérez les crochets de verrouillage **C** dans les récepteurs **D** de sorte que l'anneau se trouve en haut **E**.

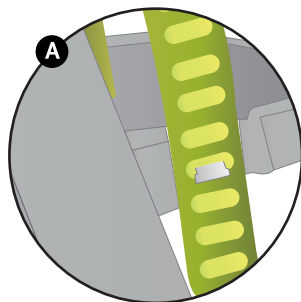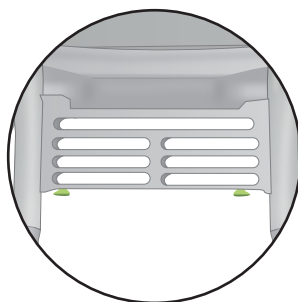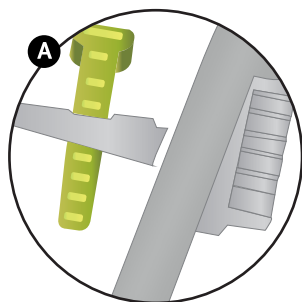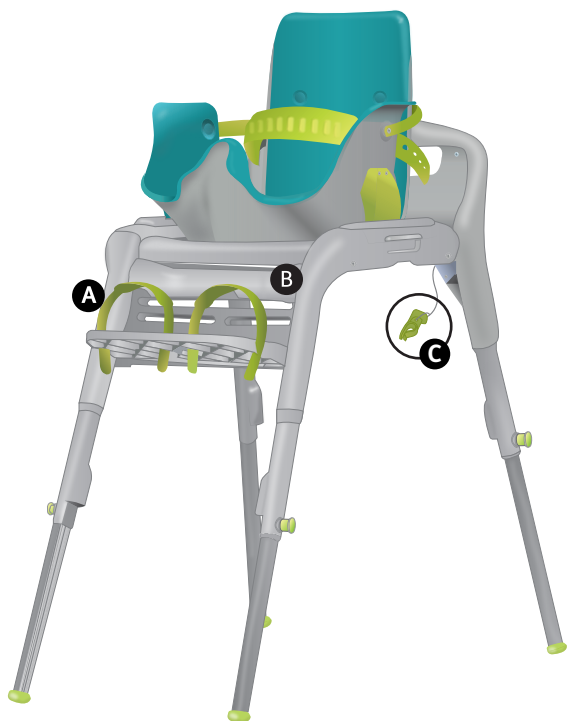

Rainures d'insertion du
repose-pieds

Languettes de fixation
des sangles de pied

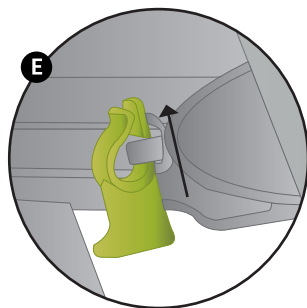
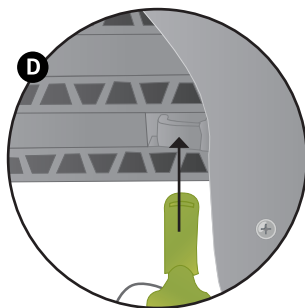


Fixation du verrou
secondaire

Fixé avec l'anneau en
haut

11.5 Fixation du pot

Le pot peut être fixé en le glissant le long des rails **A** jusqu'à ce que l'avant du pot atteigne la protection anti-éclaboussures du siège.

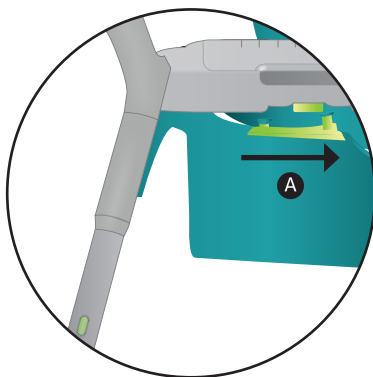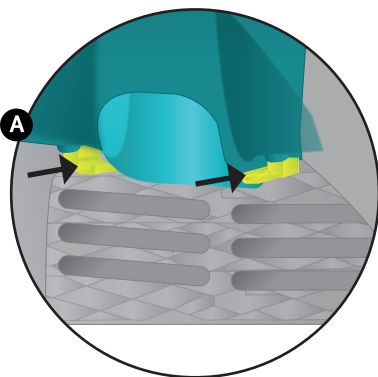


SECTION 12: Installation posturale

12.1 Réglage de la position du siège

Après avoir essayé le siège pour réglage, vous devriez avoir une idée de la position appropriée pour votre enfant. La position la plus adaptée consiste à avoir les pieds derrière ou sous les genoux.

Déverrouillez les connecteurs du siège sur le cadre. Pour ce faire, poussez doucement le côté du siège vers le cadre, puis soulevez le verrou. Il sera ainsi plus facile de se pencher vers l'avant.


Faites glisser le siège le long de la rainure jusqu'à la position désirée, puis assurez-vous que le siège est verrouillé en place.

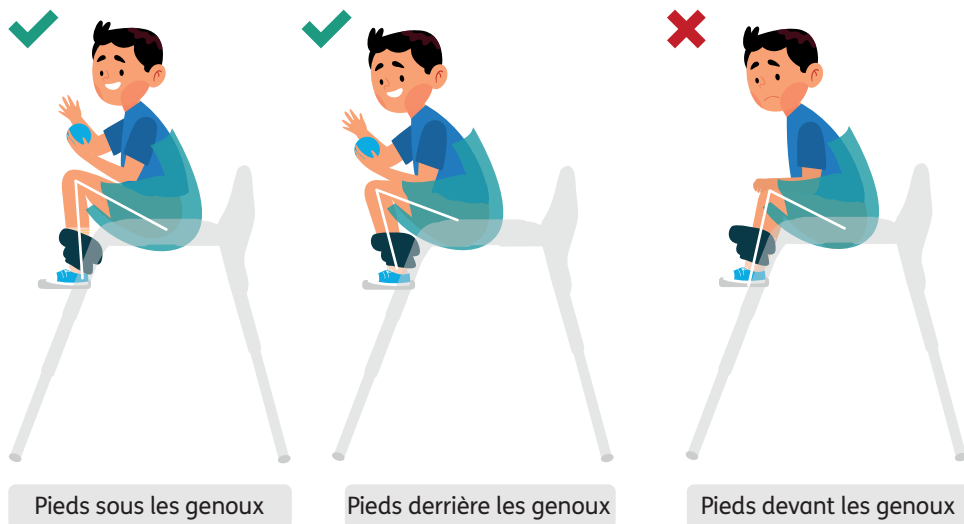

Ne réglez pas le siège
lorsque votre enfant se
trouve dessus.

12.2 Réglage du repose-pieds


Fixez le repose-pieds à une hauteur qui permet de répartir l'appui du corps sur toute la longueur de la cuisse. Si le repose-pieds est trop haut, cela peut provoquer un appui trop important vers le bas, ce qui empêche le relâchement.

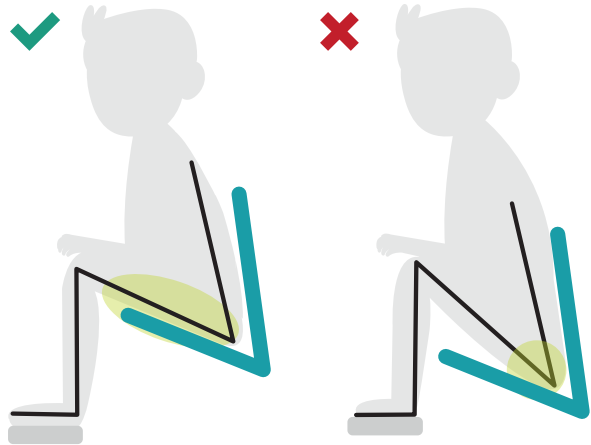

12.3 Réglage de l'angle arrière

Les sangles à cliquet peuvent être ajustées pour inciter votre enfant à se pencher vers l'avant et l'aider à poser ses bras sur les accoudoirs ou sur ses jambes pour faciliter le maintien naturel du tronc antérieur et de la tête. Cela aidera également au maintien latéral et postérieur et favorisera le relâchement des intestins et des muscles du plancher pelvien.

Un angle réduit au niveau du dos peut soulager un tonus musculaire élevé. Les sangles à cliquet peuvent être configurées de manière asymétrique si nécessaire.

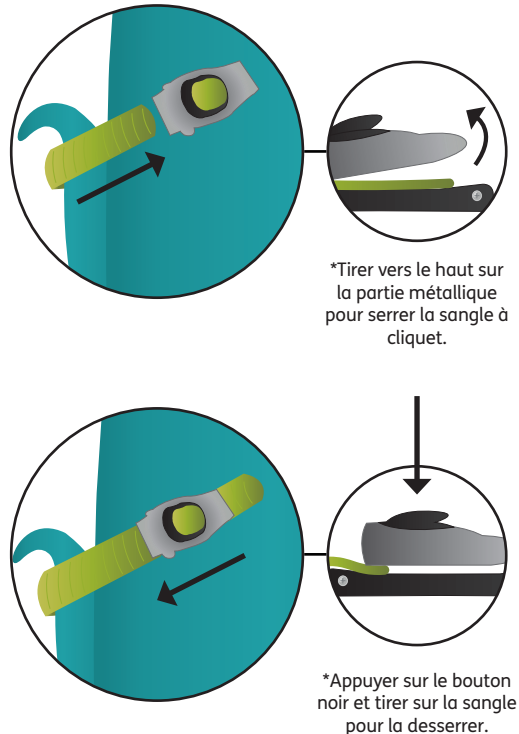


SECTION 13: Démontage de votre GottaGo

13.1 Retrait du pot

Si le pot a été utilisé, faites-le glisser soigneusement le long des rails **(A)** à l'écart du pare-éclaboussures.






Jetez le contenu au besoin et lavez-le soigneusement avant de mettre le pot dans le sac de transport.

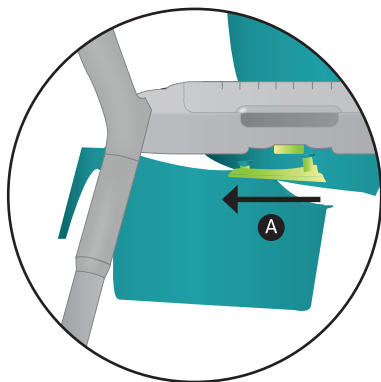

13.2 Dépose du siège

Déverrouillez les connecteurs de siège du cadre **(A)**. Pour ce faire, poussez doucement le côté du siège vers le cadre, puis soulevez le verrou **(B)**.


Relâchez les sangles à cliquet **(C)** en appuyant sur le bouton de verrouillage **(D)** et en tirant sur la sangle pour l'extraire du cliquet. Repliez les côtés du siège vers l'intérieur, puis repliez le dossier par-dessus. Utilisez la sangle du siège pour les maintenir en place.

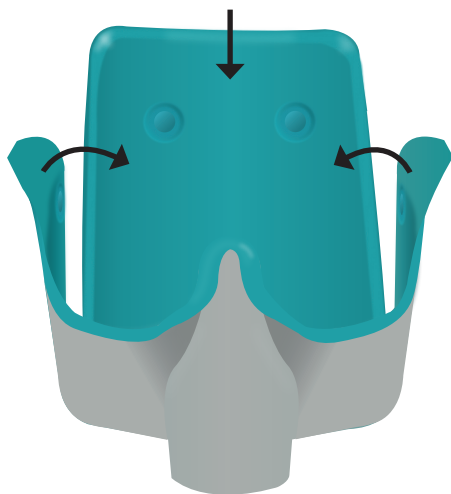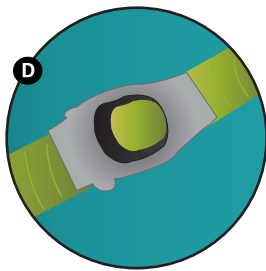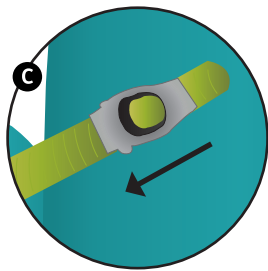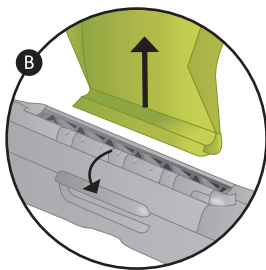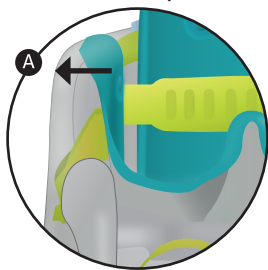

13.3 Retrait du repose-pieds

Si vous retirez le repose-pieds, assurez-vous que les crochets de verrouillage **A** sont défaits.

Appuyez sur les loquets de verrouillage **B** avec vos pouces de chaque côté du repose-pieds et faites-le glisser hors de la fente.

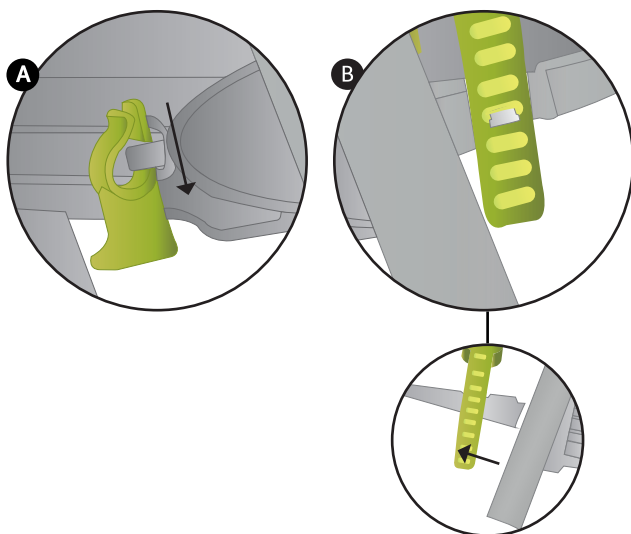


13.4 Pliage du cadre

Déverrouillez le verrou de sécurité **A** de sa position bloquée et appuyez sur le bouton **B** à l'intérieur des pieds pour revenir au réglage de hauteur le plus bas, prêt pour le pliage.

Avant de le replier, s'assurer que le GottaGo est posé sur le sol et que les montants sont complètement écartés, puis appuyer sur les boutons situés sous le cadre **C**, soulever et plier.

Pliez d'abord les pieds arrière comme illustré, puis les pieds avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


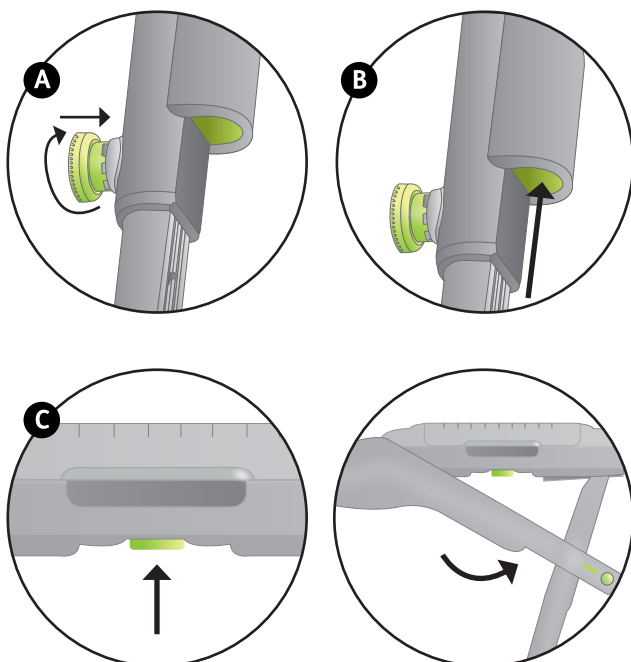



13.5 Refermer le sac à dos

Prenez votre cadre plié **A** et faites-le glisser dans le sac à dos en tenant la poignée du cadre.

Placez votre pot dans son sac de transport **B** en bas du sac à dos, il doit tenir dans l'espace entre les pieds du cadre.

Faites glisser le repose-pieds **C** dans l'espace situé derrière le cadre, si vous le retirez. Prenez votre siège plié **D** et placez-le dans l'espace disponible dans le sac à dos.

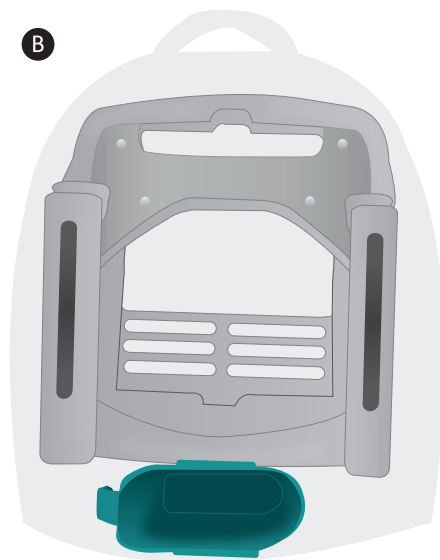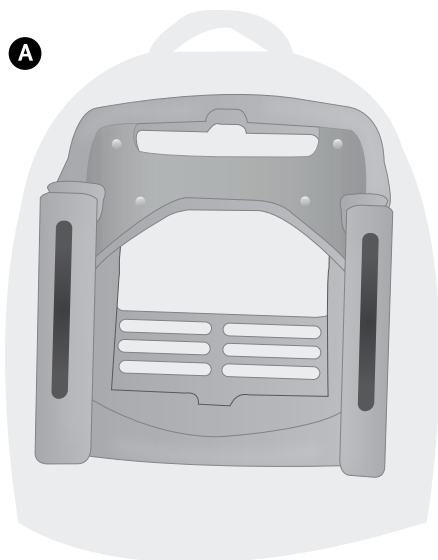

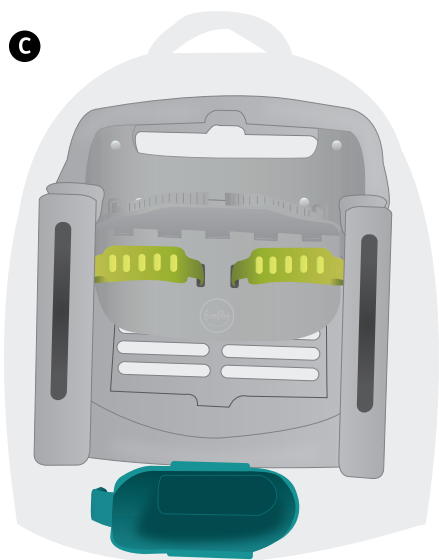

SECTION 14: Spécifications techniques

Siège

	Taille 1	Taille 2
Age	2-5 ans	4-9 ans
Largeur des hanches	22,5cm	27 cm
Profondeur minimale du siège*	22 cm	29 cm
Angle d'inclinaison du dossier (avant)	8°	25°
Angle au niveau des cuisses (par rapport à l'horizontale)	40°	40°
Hauteur du dossier	24cm	36cm
Poids (siège et cadre)	5,8 kg	6,1 kg

Châssis

Dimensions du cadre replié	49 x 57 x 19 cm
Empreinte au sol du cadre	52 x 72cm (à la hauteur maximale)
Empreinte au sol du cadre	40cm
Charge maximale	30 kg
Hauteur (partie la plus basse du siège)	1 – 30cm 2 – 46cm 3 – 53cm

*Pour les dimensions adaptées aux garçons, il est recommandé de choisir la plus grande taille à condition qu'ils répondent à la mesure de profondeur minimale du siège.

Tableau des Symboles

Symbole	Signification
	Dispositif médical
	Lire le manuel d'utilisation
	Marquage CE
	Marquage UKCA
	Avertissement
	Ne pas jeter dans les ordures ménagères
	Plage de température
	Plage d'humidité
	Fabricant
	Numéro de modèle
	Numéro de série
	Poids maximum
	Adresse de l'importateur
	Adresse du représentant en Suisse

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera

T: +41 (0)31 958 3838
F: +41 (0)31 958 3848
www.sunrisemedical.ch



French Distributor
Sunrise Medical SAS
ZI de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
www.sunrisemedical.fr

T: +(33) (0) 2 47 55 44 00
F: +(33) (0) 2 47 55 44 03
E: info@sunrisemedical.fr

Canadian Distributor
Sunrise Medical
237 Romina Drive,
Unit 3, Concord, Ontario,
L4K 4V3, Canada
www.sunrisemedical.ca

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

USA Distributor
Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727

T: 1-800-333-4000
F: 1-800-300-7502
E: customseating@sunmed.com

sunrisemedical.com

Canadian Distributor
Sunrise Medical
237 Romina Drive, Unit 3,
Concord, ON, L4K 4V3

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

sunrisemedical.ca

Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



fireflyfriends.com

